

Mit der Hybrid Technology werden die positiven Eigenschaften natürlichen Sonnenlichts und die Wirkung der Beauty Light Lampen vereint. Drei Anwendungsarten zur stehen Verfügung: die Besonnungsprogramme BEAUTY & SUN und SUN & BEAUTY oder die reine Collagenanwendung PURE BEAUTY. Wenn der Sensor verwendet wird, stellen sich die elektronisch gesteuerten UV-Lampen automatisch auf die individuelle Hautempfindlichkeit ein, so dass ein Sonnenbrand zuverlässig vermieden wird.

Mit dem neuen Glasbedienelement können alle verfügbaren Funktionen des Gerätes voreingestellt und der Professional Set-up Manager aufgerufen werden.

Hochwertige High Performance LEDs mit über 200 Farb- und Lichteffekten versprechen eine Wohlfühlatmosfera und gleichzeitig eine bis zu 80 %ige Energieersparnis und eine Lebensdauer von mehr als 30.000 Stunden.

Beauty Angel 770^{sun}


BEAUTY ANGEL 770^{sun}

Inhalt

Gerätebeschreibung.....	2
Technische Daten	3
Abmessungen.....	4
Maximale Abluftrohrängen	5
Gerätekühlung	6
Körperkühlung	6
Abluftzubehör	7
Elektrischer Anschluss	7
Sound-System.....	8
Steuerungen	8
Klimagerät	8
Aqua / Aroma System.....	5
Bedienelement	8
Anwendungsarten	9
Sensor	9

Gerätebeschreibung


1. Sensor mit Basisstation
2. Audio-System Lautsprecher (2.1),
Kopfhöreranschluss (2.2),
MP3-Anschluss (2.3)
3. Beauty Light-Lampen und
UV-Niederdrucklampen, Unterteil
4. Zwischenscheibe
5. Acrylasliescheibe Unterteil
6. Luftdüsen Körperkühlung Fußende
7. Beauty Light-Lampen und
UV-Niederdrucklampen, Seitenteil
8. Beauty Light-Lampen und
UV-Niederdrucklampen, Oberteil
9. Düsen AQUA/AROMA SYSTEM
10. Luftdüsen Körperkühlung
11. Bedienelement
12. Verstellbare Luftdüsen Gesichtskühlung/
AROMA
13. Innenraumbelichtung (LEDs)
14. Effektbeleuchtung Oberteil (LEDs)
15. Effektbeleuchtung Frontblende (LEDs)
16. Infrarot-Schnittstelle
17. Beauty Select
18. Climatronic

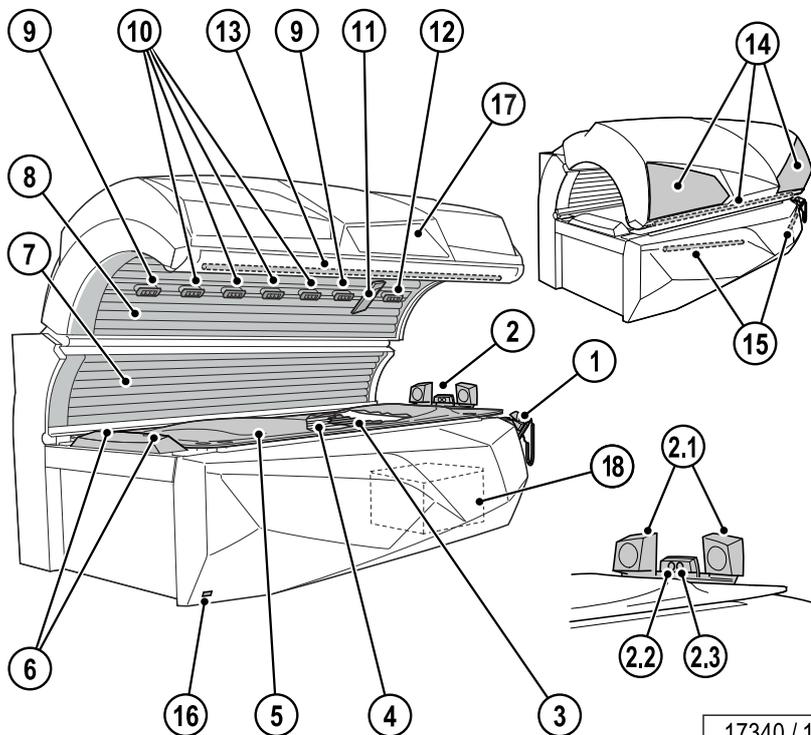

17340 / 1

Ausstattungsvarianten (optional)

1. Zentralabluftstutzen

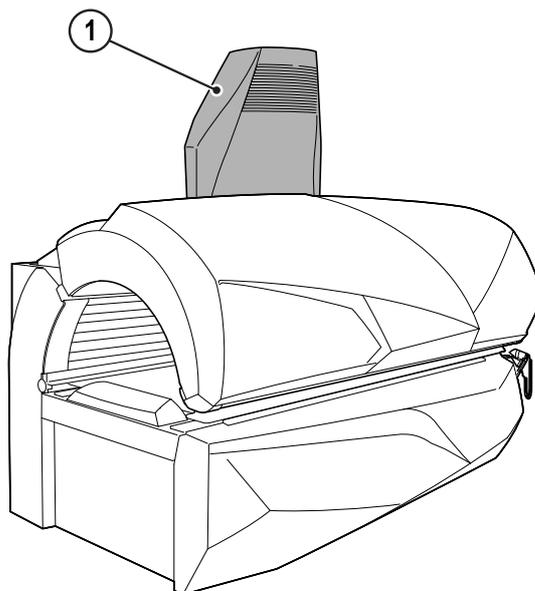

17341 / 0

Technische Daten

Elektrische Daten	
Nennleistungsaufnahme: mit Klimagerät	12800 W
Nennspannung:	400 – 415 V 3N~
Nennfrequenz:	50 Hz
Nennabsicherung:	3 x 25 A (träge)
Anschlussleitung (zum Beispiel):	H05VV-F 5G 4 mm ²
max. zulässige Netzimpedanz:	0,095 Ω
Leistung:	
Oberteil:	
UV-Niederdrucklampen BEAUTY ANGEL SUN LIGHT	14 x 180 W
Niederdrucklampen BEAUTY ANGEL BEAUTY LIGHT	6 x 180 W
Unterteil:	
UV-Niederdrucklampen BEAUTY ANGEL SUN LIGHT	12 x 160 W
Niederdrucklampen BEAUTY ANGEL BEAUTY LIGHT	6 x 160 W
Seitenteil:	
UV-Niederdrucklampen BEAUTY ANGEL SUN LIGHT	6 x 180 W
Niederdrucklampen BEAUTY ANGEL BEAUTY LIGHT	2 x 180 W
Gewicht:	ca. 584 kg

Geräuschemission

Schalldruckpegel: 68,9 db (A)

Zu- und Abluft

Temperaturdifferenz Abluft/Zuluft: 11°C

Max. Luftbedarf: 2800 m³/h

Optimale Umgebungstemperatur: 25 - 30 °C

Max. Umgebungstemperatur: 15 - 32 °C


Max. Zulufttemperatur: 32 °C

Abluftquerschnitt ohne Abluftsystem: 588 cm²Kabinen-Zuluftquerschnitt: 5200 cm²Abluftquerschnitt mit Abluftsystem: 710 cm²

Warmluftückführung: möglich

Abmessungen

B+	1378 mm
B	1328 mm
B-	1309 mm
B1	800 mm
B2	188 mm
L+	2350 mm
L	2260 mm
L1	2000 mm
L2	1730 mm
L3	238 mm
L4	265 mm
L5	867 mm
L6 (L7)	1116 mm
H	1410 mm
H1	1745 mm
H2	1078 mm
H4	400 mm
H5	114 mm
H6	1887 mm
H7	1974 mm
H8	2197 mm
H9	2342 mm
X	1101 mm
Y	572 mm
Z	2260 mm
∅	300 mm
BK	2400 mm
TK	2300 mm

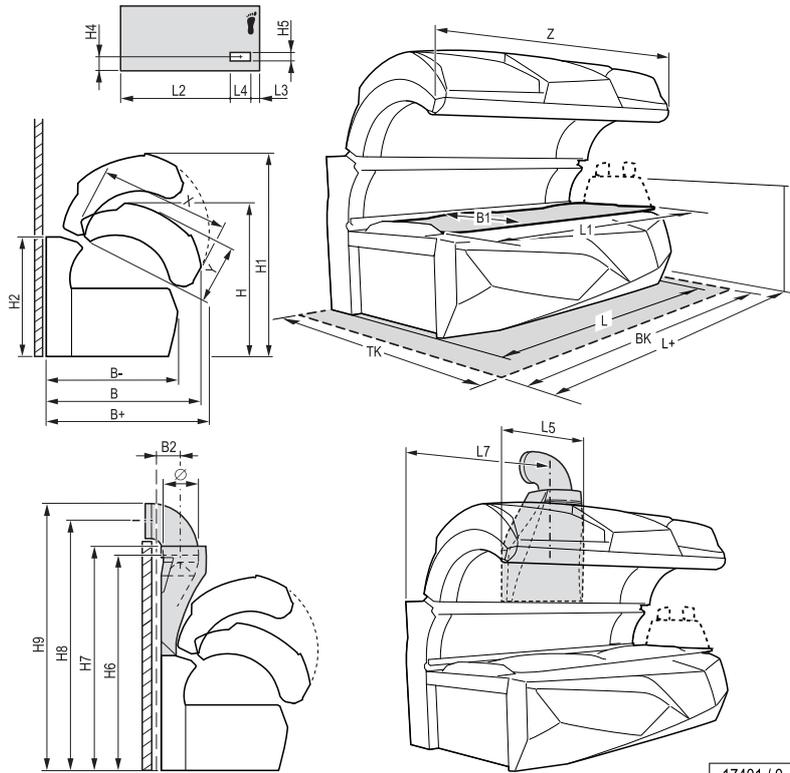

Beauty Angel 770^{sun}

Maximale Abluftrohrlängen

Berechnungsgrundlage (ohne Zusatzlüfter):

Gegendruck	100 Pascal
Luftdruck	100.000 Pascal
Lufttemperatur	32 °C
Dichte	1,112 kg/m ³
dynamische Zähigkeit der Luft	1,92E-05 Pa x s


Wellrohr ∅	Rauigkeit (im Mittel) k _{absolut}	Volumenstrom	Verlustbeiwert		90°-Bogen in der Leitung	zul. Länge der geraden Leitung
			des Rohres	des Bogens		
mm	mm	m ³ /h			Stück	m
300	8	2550	0,182 ¹⁾	0,21 ¹⁾	0	10
					1	9
					2	8
					3	7

Glattrohr ∅	Rauigkeit (im Mittel) k _{absolut}	Volumenstrom	Verlustbeiwert		90°-Bogen in der Leitung	zul. Länge der geraden Leitung
			des Rohres	des Bogens		
mm	mm	m ³ /h			Stück	m
300	0,1	2550	0,061 ¹⁾	0,21 ¹⁾	0	30
					1	26
					2	22
					3	18

1) zeta-Wert (ζ)

Gerätekühlung

Zur Gerätekühlung wird Kabinen- bzw. Studioluft durch die Luftschlitze in der Frontblende des Geräteunterteils (1) und über die Filtermatten im Oberteil (2) angesaugt (Zuluft). Die angesaugte Luft wird zunächst durch Filterpakete gereinigt, weiter an den erwärmten UV-Nieder- und Hochdrucklampen vorbeigeführt und schließlich als erwärmte Abluft über den Zentralabluftstutzen (3) an der Rückseite des Geräts nach außen geleitet.

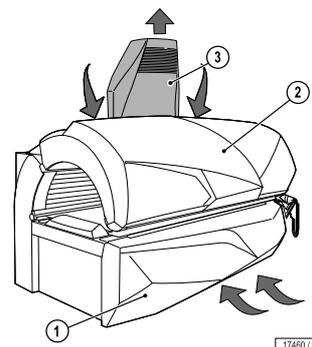


Körperkühlung

Die Körperkühlung des Nutzers erfolgt automatisch. Die Intensität ist 9-stufig regelbar. Hierzu wird die Kabinen- bzw. Studioluft angesaugt und zur Kühlung verwendet.

Im Geräteoberteil wird die Luft über mehrere Düsen in der Mitte des Oberteils verteilt. Im Kopfbereich gibt es zwei separat zuschaltbare Luftdüsen.

Durch die Luftschlitze in der Frontblende des Geräteunterteils wird ebenfalls Luft angesaugt und zu zwei Fußdüsen in Höhe der Liegefläche geleitet, um so den Körper mit kühlender Luft zu umströmen.

Aus den äußeren Düsen im Körperbereich kann der Benutzer einen angenehm kühlenden Nebel versprühen (Aqua System).

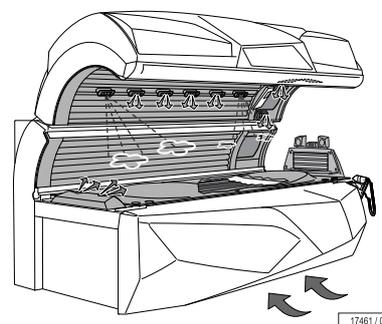

Abluftzubehör

Der Anschluss an ein Zentralabluftsystem ist nach oben, oben rechts, oben links und nach hinten möglich.

Die hierfür vorgesehenen Öffnungen befinden sich oberhalb am Zentralabluftstutzen.

Wellrohr

Eine ausreichende Geräteentlüftung ist bis zu einer Abluftrohrlänge von 10 Metern (ohne 90°-Bogen) möglich. Für Abluftrohrlängen von über 10 Metern benötigen Sie einen Hilfsventilator.


Glattrohr

Eine ausreichende Geräteentlüftung ist bis zu einer Abluftrohrlänge von 30 Metern (ohne 90°-Bogen) möglich. Für Abluftrohrlängen von über 30 Metern benötigen Sie einen Hilfsventilator.

Warmluftrückführung

Die Warmluftrückführung ist eine technisch ausgereifte, sichere Einrichtung, mit der ein Teil der aufgewärmten Kühlluft über eine motorgesteuerte Luftklappe in das Studio zurückgeführt wird. Dabei steuert die voreingestellte Temperatur im Professional Set-up Manager die Studiotemperatur vollautomatisch, wahlweise zwischen 15 °C und 25 °C.

Die Montage des Abluftstutzens und der Warmluftrückführung ist auch nachträglich möglich.

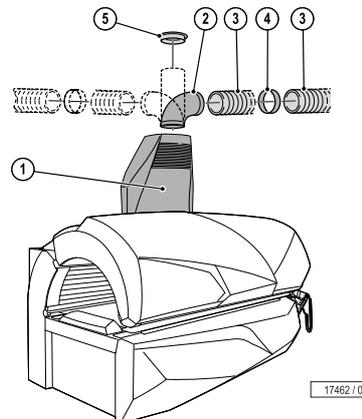

Pos.	Zubehörteile	Artikel-Nr.	Bemerkungen
1	Zentralabluftstutzen, mit Warmluftrückführung, thermostatisch gesteuert inklusive Anschlusssteil, siehe Pos. 4	500000872	mit direkter Anschlussmöglichkeit für Abluftrohre (Ø 300 mm) nach oben.
	Zentralabluftstutzen, ohne Warmluftrückführung	500000873	
2	90°-Rohrbogen in Brillant Silber	10001292	für Abluftrohrführung nach rechts, links oder hinten inkl. Rohradapter zum direkten Anschluss an Zentralabluftstutzen [mit Rohranschluss (Ø 300 mm) möglich]
3	Wellrohr (Ø 300 mm, 6 m Länge, flexibel, grau) inkl. 2 Schlauchschellen	34502800	–
4	Wellrohr-Verbindungsstück (Ø 300 mm)	34502700	für die Verbindung von zwei Wellrohren
5	Anschlussstutzen für Wellrohr (Ø 300 mm)	34503600	Anschluss des Wellrohres, z.B. an einen Kanal
6	Abluftadapter in schwarz (ohne Abbildung)	34526600	für doppelte Rückwand
7	Abluftadapter (ohne Abbildung)	100002461	gehört zu Pos. 1


Elektrischer Anschluss

Anschlussleitung	beigelegt
elektr. Steuerleitung für Münzgeräte	keine
Leitung für externe Musik und Kanalwahl	keine

Sound-System

Bezeichnung:	Artikel-Nr.	Bemerkung:
3D-Sound-Unit ¹⁾	100003074	Nachrüstbares Zubehör
Verdrahtungssatz Audio	50000060	inklusive Kanalwahl
Verdrahtungssatz Audio	50000061	ohne Kanalwahl

1) beinhaltet SD-Card Voice Guide, SD-Card Musik, MP3-Dock-in und 2 SD-Card-Slots

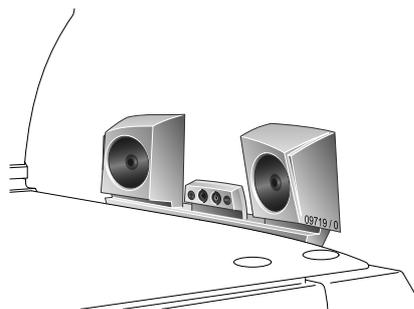

Steuerungen

Steuerung	Artikel-Nr.	Bemerkungen
MCS III plus Handfernsteuerung	500000456	mit Chipkartenterminal

Klimagerät


Serienausstattung für den Beauty Angel 770^{sun}: Climatronic für die Liegefläche und die Körperluft. Auf Wunsch lässt sich die Climatronic jederzeit ausstellen.

Aqua / Aroma System

Serienausstattung: Duft und fein vernebelte Essenzen für den Benutzer.

Bedienelement

Am Bedienelement können alle verfügbaren Funktionen eines Gerätes voreingestellt werden. Die Feineinstellung erfolgt während der Anwendung. Im Standby-Betrieb kann der Professional Set-up Manager aufgerufen werden.

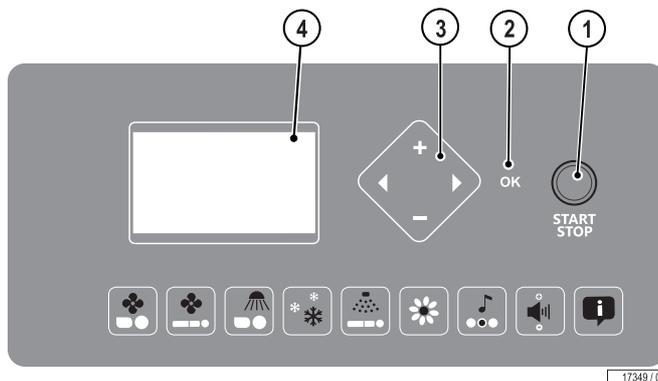

Anwendungsarten

Es gibt 3 Arten zur Auswahl.

- PURE BEAUTY: Nur die Beauty Light-Lampen sind eingeschaltet.
- BEAUTY & SUN: Beauty Light-Lampen und UV-Lampen sind eingeschaltet. Der Anteil der UV-Strahlung beträgt bis zu 30 %.
- SUN & BEAUTY: Beauty Light-Lampen und UV-Lampen sind eingeschaltet. Je nach Hauttyp und Vorbräune ist der Anteil der UV-Strahlung höher als der Anteil der Beauty Light-Lampen.

Sensor

Der Sensor wird bei den Anwendungsarten BEAUTY & SUN und SUN & BEAUTY benutzt. Der Sensor misst an zwei Hautstellen; an der Stirn und an der hellsten Stelle des Körpers wie zum Beispiel die Innenseite des Oberarms. Aus diesen Messwerten werden die Vorbräune und die Hautbeschaffenheit des Nutzers ermittelt. Die Strahlendosis der UV-Lampen kann somit für jeden Nutzer individuell angepasst werden.

Beauty Angel 770^{sun}