


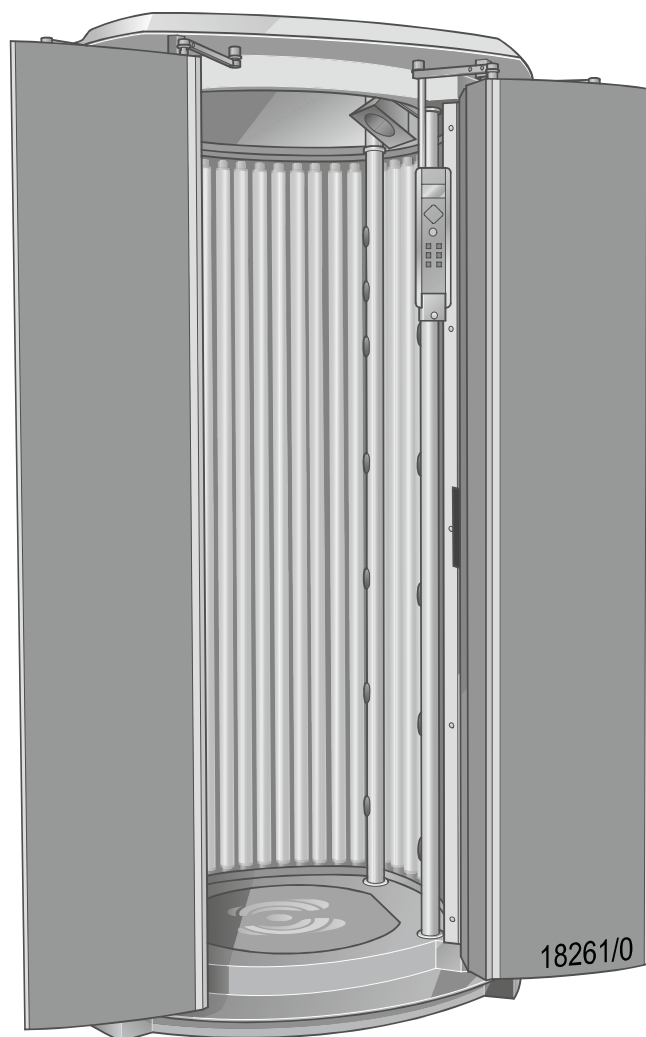

Naudojimo instrukcijos

Originalios naudojimo instrukcijos vertimai

RedWave Plus

1034455-00 / lt / 11.2025

wellsystem

Duomenys apie leidėjus



Gamintojas: JK-Products GmbH

Köhlershohner Straße 60

53578 Windhagen

GERMANY

Tel.: +49 (0) 22 24 / 818-0

Klientų aptarnavimo tarnyba / „JK-International GmbH“,
Division „JK-Global Service“

techninė priežiūra Köhlershohner Straße 60

(atsarginių 53578 Windhagen

konstrukcinių dalių GERMANY

užsakymas): Tel.: +49 (0) 22 24 / 818-861

El. paštas: service@jk-globalservice.de

Atsarginių naudojamųjų „JK-International GmbH“

medžiagų užsakymas: Köhlershohner Straße 60

53578 Windhagen

GERMANY

Tel.: +49 (0) 22 24 / 818-600

El. paštas: contact@wellsystem.com



PAVOJUS!



Nesilaikius šios naudojimo instrukcija:

- gali sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį,
- gali sukelti prietaiso gedimus arba žalą aplinkai.
- Prieš pradėdami eksploatuoti šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.
- Laikykitės nuorodų ir elgesio taisyklių, užtikrinančių saugų prietaiso naudojimą.
- Ši naudojimo instrukcija ir papildoma gamintojo informacija turi būti darbuotojų darbo vietoje.
- Jei prietaisą parduodate ar perduodate kitiems, būtinai kartu perduokite ir šią naudojimo instrukciją.

Autoriaus teisės / „Copyright“

Šio prietaiso autoriaus teisės priklauso bendrovei „JK-Holding GmbH“.

Šios instrukcijos turinio (viso arba dalimis) negalima dauginti, platinti arba be leidimo naudoti konkurenciniais tikslais, arba atskleisti tretiesiems asmenims.

Pasiliekame teisę keisti šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus brėžinius ir techninius duomenis!

Turinys



1	Saugos nurodymai ir įspėjimai	5
1.1	Bendroji informacija	5
1.1.1	Apibrėžtys	5
1.1.2	Simbolių paaiškinimas	6
1.2	Naudojimas pagal paskirtį	7
1.3	Numatomas netinkamas naudojimas	8
1.4	Saugos informacija apie „RedWave Plus“ sistemą	8
1.4.1	RedWave Plus Sistema	8
1.4.2	Svarbūs nurodymai	9
1.4.3	„Vibra Shape“ (vibroplotštė)	10
1.4.4	Naudojimosi laikas	11
1.5	Svarbūs saugaus naudojimo nurodymai ir įspėjimai	12
1.5.1	Ekspluatuotojo įsipareigojimai	12
1.5.2	Personalo kvalifikacija	12
1.5.3	Tiekimo apimtis	12
1.5.4	Transportavimas, montavimas ir naudojimo vieta	12
1.5.5	Paruošimas eksploatuoti	15
1.5.6	Valdymas ir techninė priežiūra	16
1.5.7	Ekspluatavimo nutraukimas	16
1.5.8	Laikymas	16
1.5.9	Atliekų šalinimas	17
1.5.10	Direktyvos	17
1.5.11	Eksportas	18
1.5.12	AUX (muzika, pasirinktinai)	18
1.5.13	Techniniai pakeitimai	18
1.6	Ženkilai ir lipdukai ant prietaiso	19
1.7	Trūkumo pašalinimas	23
1.8	Atsakomybės netaikymas	23
2	Aprašymas	24
2.1	Tiekimo apimtis	24
2.1.1	Pasirinktinai	24
2.2	Įranga	24
2.3	Prietaiso aprašymas	25
2.4	Priedai (pasirinktinai)	27
2.5	Veikimo principas	27
2.6	Vibracijos programų aprašymas	28



3	Valdymas.....	29
3.1	Saugos nurodymai naudotojui.....	29
3.2	RedWave Plus Sistema	29
3.3	Naudojimo nuorodos	30
3.4	Valdymo apžvalga	32
3.4.1	Navigacija	33
3.5	Funkcijos	34
3.6	Pradėti	36
3.7	Prijungimas prie prietaisų su „Bluetooth®“ funkcija	37
3.8	Sava muzika.....	39
4	Valymas ir techninė priežiūra	40
4.1	Valymo ir techninės priežiūros saugos nuorodos	40
4.2	Sutrikimai	41
4.3	Valymas	41
4.3.1	Paviršių valymas.....	42
4.4	Lempos	42
4.5	Valymo planas	43
4.6	Techninė priežiūra	44
4.7	Techninės priežiūros planas.....	44
4.8	Lempų keitimo nuorodos	48
4.8.1	Žemaslėgės lempos	49
4.9	Lempų duryse valymas arba keitimas	51
4.10	Lempų šoninėse sienelėse valymas arba keitimas	56
4.11	Filtro valymas	59
4.12	Filtro įdėklų valymas	60
4.13	AROMA rezervuaro keitimas.....	61
5	Techniniai duomenys.....	63
5.1	Galia, elektros įrangos parametrai ir triukšmo lygis.....	63
5.2	Matmenys	64
5.3	Lempos	65
5.3.1	RedWave Plus	65
5.4	Atsarginės dalys ir priedai	66
6	Priedas	67
6.1	JK laiko reguliatoriai.....	67
7	Rodyklė	68

1 Saugos nurodymai ir įspėjimai



Norint užtikrinti saugų prietaiso veikimą, reikia atidžiai perskaityti toliau pateiktus saugos nurodymus ir įspėjimus bei jų laikytis.

Išsaugokite šią instrukciją, kad galėtumėte pasinaudoti vėliau.

Jei reikia, čia pateikti saugos nurodymai pakartojami atitinkamuose skyriuose.

1.1 Bendroji informacija

1.1.1 Apibrėžtys

Ekspluatuotojas

Asmuo, kuris čia aprašytus prietaisus tiekia verslo paslaugų teikėjams. Ekspluatuotojas atsako už tvarkingą prietaiso naudojimą bei techninės priežiūros intervalų laikymąsi.

Naudotojas

Asmuo, besinaudojantis prietaisu paslaugų teikimo verslo patalpose.

Darbuotojai

Asmenys, atsakingi už naudojimą, valymą ir bendruosius techninės priežiūros darbus, ir išmokantys naudotoją, kaip elgtis su prietaisu.

Kvalifikuotas elektrikas

Asmuo, turintis atitinkamą techninį išsilavinimą, žinių ir patirties, susipažinęs su galiojančiomis nuostatomis, galintis numatyti elektros keliamus pavojus ir jų išvengti.

Įgalioti ir išmokyti specialistai

Trečiosios įmonės specialistai, gamintojo išmokyti ir įgalioti atlikti tam tikrų prietaisų montavimo ir techninės priežiūros darbus.



1.1.2 Simbolių paaiškinimas

Šioje naudojimo instrukcijoje pateikiamos šių rūšių saugos nuorodos:

PAVOJUS!



Pavojaus rūšis ir šaltinis

Ši saugos nuoroda reiškia tiesioginį pavojų sveikatai ir gyvybei.

PAVOJUS!



Pavojaus rūšis ir šaltinis

Ši saugos nuoroda perspėja apie pavojų sveikatai ir gyvybei, kurį gali kelti elektra.

DĖMESIO!



Pavojaus rūšis ir šaltinis

Ši saugos nuoroda įspėja dėl galimos žalos prietaisui, medžiagoms arba aplinkai.



PASTABA

Su šiuo simboliu pateikiamos ne saugos nuorodos, o papildoma informacija, padedanti geriau suprasti procesus.

1.2 Naudojimas pagal paskirtį



Šis prietaisas yra skirtas naudoti artimosios infraraudonosios šviesos ir raudonos šviesos technologiją visiems asmenims. Daugiau informacijos apie tai rasite 27 psl.

Prietaisas numatytas tik komerciniam naudojimui ir netinkamas naudoti namuose.

Šiuo prietaisu negali naudotis kūdikiai ir maži vaikai iki 7-erių metų.

Jaunuoliams nuo 17 metų imtinai prietaisu galima naudotis tik pasitarus su tėvais / globėjais arba gydytoju.

Kai kurie asmenys negali naudoti šio prietaiso, žr. 8 psl.

Draudžiama savarankiškai naudoti prietaisą asmenims su fizine, jutimine arba psichine negalia, taip pat asmenims, kuriems trūksta patirties ir (arba) nepakanka žinių. Už šių asmenų saugą atsakingas asmuo privalo prižiūrėti arba išmokyti, kad prietaisas būtų naudojamas tinkamai ir saugiai. Jeigu dėl to kyla abejonių, šiems asmenims draudžiama naudoti prietaisą!

Prietaisą naudokite tik su nurodytomis arba analogiškėmis lempomis. Šioje naudojimo instrukcijoje pateiktos naudojimo trukmės galioja tik naudojant nurodytą lempų kiekį.

Bet koks kitas naudojimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį. Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą, patirtą naudojant ne pagal paskirtį. Naudojimo ne pagal paskirtį rizika tenka vien tik eksploatuotojui.

Naudojimui pagal paskirtį taip pat priskiriamas gamintojo pateikiamų nuorodų, naudojimo ir techninės priežiūros sąlygų vykdymas. Prietaiso naudojimą, techninę priežiūrą ir remontą leidžiama atlikti tik išmanantiems šiuos darbus ir informuotiems apie grėšiančius pavojus asmenims.

„Vibra Shape“ funkcija

Naudojant šviesą galima papildomai įjungti vibroplokštę. Vibroplokštė naudojama sveikų asmenų raumenims stimuliuoti. Jei reikia, vibroplokštę galima naudoti ir atskirai nuo lempų, tačiau tik joms veikiant buėdėjimo režimu.

Vibroplokštė numatyta ne tik medicininei paskirčiai!

Vibroplokštės negalima naudoti nėščiosioms ir sergantiems ar fizinių negalavimų turintiems asmenims. Sąrašą būsenų, kai šios plokštės naudoti negalima, rasite 10psl.



1.3 Numatomas netinkamas naudojimas

Taip naudoti prietaiso jokia būdu negalima:

- Prietaiso vienu metu negali naudoti keli asmenys.
- Prietaisu negali naudotis daugiau nei 150 kg sveriantys asmenys.
- Naudojant prietaisą patalpoje negali būti kitų asmenų, ypač vaikų.
- Naudojant prietaisą patalpoje negali būti naminių gyvūnų.
- Šiame prietaise negali būti naudojamos UV lempos!

1.4 Saugos informacija apie „RedWave Plus“ sistemą

1.4.1 RedWave Plus Sistema

Prietaiso naudoti negali šie asmenys:

- nėščios moterys;
- epilepsija sergantys asmenys;
- asmenys, sergantys ūmiomis ligomis;
- karščiuojantys asmenys;
- asmenys, sergantys ūmia venų tromboze;
- asmenys, sergantys pigmentine kseroderma;
- asmenys, vartojantys azatiopriną arba tiopuriną;
- asmenys, sergantys porfirija ar turintys hemoglobino biosintezės sutrikimą;
- odos vėžiu sirgę arba sergantys asmenys;
- odos vėžio rizikos grupei priklausantys asmenys (pvz., odos vėžio atvejai šeimoje);
- asmenys, patyrę ūmų saulės nudegimą;
- Jeigu abejojate, būtinai kreipkitės į gydytoją!



Toliau išvardyti asmenys prietaisą gali naudoti tik pasitarę su gydytoju:

- chroniškomis, ypač odos, ligomis sergantys asmenys,
- asmenys, sergantys ligomis, kurias sukelia jautrumas šviesai,
- jautrumą šviesai sukeliančius medikamentus ar augalines priemones (pvz., antibiotikus, priešuždegiminius, priešgrybelinius preparatus ar jonažoles) vartojantys asmenys,
- imuninės / autoimuninės sistemos ligomis sergantys asmenys,
- kolagenoze (pvz., raudonąja vilklige, sklerodermija) sergantys asmenys,
- „Rosacea“ (rožinė) sergantys asmenys,
- venų varikoze, telangiektazija (pvz., kuperoze, paveldima telangiektazija, voratinkliniai apgamai) sergantys asmenys,
- asmenys, turintys žemą kraujo spaudimą, širdies kraujotakos sutrikimų,
- venų sutrikimų turinys asmenys,
- vėžiu sergantys asmenys,
- šviežių žaizdų po operacijos arba chirurginės intervencijos turintys asmenys,
- asmenys, kuriems dar neišgijo po tatuiravimo ar auskarų vėrimo likusios žaizdos.

Jei neturite jokių medicininių nusiskundimų, tačiau kyla abejonų dėl galimybės naudoti, pirmiausia turėtumėte atlikti daugiausia 5 minutes trunkantį bandymą ir stebėti reakciją. Jei po 48 valandų nepasireišk jokių nepageidaujamų reakcijų, galima pradėti naudotis įprastai.

1.4.2 Svarbūs nurodymai

Nerekomenduojama naudotis soliariumu šiais atvejais:

- asmenys, per paskutiniąsias 24 valandas naudoję rūgštinę veido kaukę,
- per paskutiniąsias 24 valandas buvo elektroniniais aparatais atlikta odos stangrinimo procedūra,
- asmenys, kuriems atlikta odos šlifavimo procedūra,
- per paskutiniąsias 24 valandas buvo atlikta injekcija.

Veiksmai prieš naudojantis, naudojantis ir baigus naudotis:

- Naudojant prietaisą patalpoje negali būti kitų asmenų, ypač vaikų.
- Prieš naudodamiesi nusiimkite visus papuošalus (išsiimkite įvertus auskarus).
- Prieš naudodamiesi laiku nusivalykite kosmetiką ir nenaudokite jokių apsaugos nuo saulės priemonių.
- Kadangi šviesa yra labai intensyvi, rekomenduojame naudojantis užsimerkti. Kad patirtis būtų malonesnė, taip pat rekomenduojame užsidėti apsauginius akinius.
- Vadovaukitės nuorodomis dėl naudojimo trukmės.



1.4.3 „Vibra Shape“ (vibroplokštė)

Kontraindikacijos



PAVOJUS!



Pavojus sveikatai!

Vibracija gali sukelti arba sustiprinti sveikatos sutrikimus.

Prietaiso naudoti negali šie asmenys:

- nėščios moterys;
- asmenys su TVT (giliųjų venų trombozė);
- šviežių žaizdų po operacijos arba chirurginės intervencijos turintys asmenys;
- epilepsija sergantys asmenys;
- asmenys, sergantys ūimomis ligomis / turintys uždegiminių procesų;
- asmenys, turintys širdies stimuliatorių;
- asmenys, turintys tinklainės atšoką;
- asmenys, sergantys ūmia osteoporoze.

Asmenys, sergantys toliau išvardytomis ligomis, prietaisą gali naudoti tik pasitarę su gydytoju:

- širdies kraujotakos sutrikimai;
- klubo ir kelio implantai;
- sunkus diabetas;
- stiprūs migrenos priepuoliai;
- vėžiniai susirgimai;
- tulžies ir inkstų akmenys;
- ūminė trombozė;
- ūminiai judėjimo aparato uždegimai;
- nauji lūžiai treniruojamoje srityje;
- švieži infekcijos židiniai;
- ūminė išvarža / tarpslankstelinio diskų liga / spondilolizė;
- reumatoidinis artritas;
- aktyvi artrozė ir artropatija (sąnarių ligos).

Moterys, kurioms neseniai buvo įdėtos gimdos (intrauterinės) spiralinės, asmenys, kuriems neseniai buvo įstatyti metaliniai strypai, sraigčiai ar plokštelės, taip pat gali naudoti prietaisą tik pasitarę su gydytoju.

Šalutiniai poveikiai

Vibroplikštės naudojimas gali sukelti šį šalutinį poveikį:

- niežulys treniruojamose srityse;
- pykinimas ir svaigulys;
- staigus, trumpalaikis kraujospūdžio sumažėjimas;
- greita hipoglikemija sergant diabetu.

Diabetikai visada su savimi turi turėti gliukozės! Šalutinis poveikis: pykinimas, svaigulys, kraujospūdžio sumažėjimas ir niežulys paprastai yra nepavojingi. Ypač vyresnio amžiaus naudotojus būtina perspėti, kad jiems gali pasireikšti svaigulys arba sumažėti kraujospūdis. Asmenims, turintiems odos pažeidimų, pvz., pūslių, arba žaizdų ant pėdų, vibroplikštės naudoti negalima.



1.4.4 Naudojimosi laikas

Mūsų rekomenduojama naudojimo trukmė yra 15–30 minučių.



1.5 Svarbūs saugaus naudojimo nurodymai ir įspėjimai

1.5.1 Eksploatuotojo įsipareigojimai

Eksploatuotojas privalo paruošti ir pateikti aiškias valdymo, valymo ir techninės priežiūros nuorodas, tinkamai išmokyti ir instruktuoti darbuotojus, kad būtų užtikrintas tinkamas prietaiso naudojimas pagal paskirtį, bei valdymas.

Atsižvelgiant į nacionalines darbų saugos ir aplinkos apsaugos nuostatas, Jūsų eksploatavimo nuorodomis turi būti užtikrinamas nepavojingas prietaiso eksploatavimas ir valdymas bei atsižvelgiama į Jūsų įmonės skiriamuosius bruožus ir patirtį. ES galioja

ES direktyva 89/391/EEB (Vokietijoje Bendrosios saugumo technikos ir darbų saugos taisyklės (BetrSichV)).

1.5.2 Personalo kvalifikacija

Eksploatuotojas privalo savo darbuotojus apmokyti ir instruktuoti apie galiojančius teisės aktus bei nelaimingų atsitikimų prevencijos taisykles. Užtikrinkite, kad Jūsų darbuotojai perskaitytų šią naudojimo instrukciją ir jos laikysis. Ypač tai galioja

- informacijai, pateiktai skyriuose „Naudojimas pagal paskirtį“ ir „Numatomas naudojimas ne pagal paskirtį“,
- saugos nuorodoms, pateiktoms skyriuje „Valdymas“,
- aptarnavimo nuorodoms,
- valymo ir techninės priežiūros nuorodoms.
- Ši naudojimo instrukcija ir papildoma gamintojo informacija turi būti darbuotojų darbo vietoje.
- Reguliariai tikrinkite, ar Jūsų darbuotojai dirba saugiai ir suvokdami pavojus bei laikydamiesi eksploatavimo nuorodų.
- Pasirūpinkite, kad būtų laikomasi valymo intervalų, ypač valymo po kiekvieno naudojimo.
- Pasirūpinkite, kad Jūsų darbuotojai tinkamai konsultuotų klientus, ypač apie naudojimo trukmę, galimą riziką ir prietaiso valdymą.

1.5.3 Tiekimo apimtis

Informaciją apie tiekimo apimtį žr. skyriuje „Aprašymas“ 24 psl.

1.5.4 Transportavimas, montavimas ir naudojimo vieta

Prietaisą pristato specializuota įmonė, o sumontuoja ir pastato gamintojo klientų aptarnavimo tarnyba arba įgaliota klientų aptarnavimo tarnyba.

Eksploatuotojas atsako, kad įrengimo vietoje būtų laikomasi oro apykaitos užtikrinimo ir elektrotechnikos reikalavimų, žr. 13 psl.

Montavimas



PAVOJUS!



Elektros smūgio ir nudegimo pavojus žmonėms!

- Montavimo ir prijungimo prie elektros tinklo darbai turi būti atliekami pagal nacionalines taisykles.
- Įrengimo vietos elektros įvade reikia sumontuoti laisvai prieinamą visų kontaktų atskyrimo įtaisą (pagrindinį jungiklį), atitinkantį III viršįtampių kategorijai taikomus reikalavimus. Tai reiškia, kad visi atskyrimo tarpai tarp kontaktų turi atitikti III viršįtampių kategorijos visiškam atskyrimui taikomus reikalavimus.
- Jeigu prijungiama kištukinėmis jungtimis, reikia naudoti kištukų sistemą pagal EN 60309.
- Prietaiso montavimo, pastatymo, išplėtimo arba einamojo remonto darbus leidžiama atlikti tik specialiai įgaliotiems ir išmokytiems specialistams.

Informaciją apie prietaiso išmontavimą ir sumontavimą žr. atskiroje montavimo instrukcijoje. Ši montavimo instrukcija skirta tik gamintojo klientų aptarnavimo tarnybai arba kvalifikuotiems ir gamintojo įgaliotiems specialistams.

Oro technika



DĖMESIO!



Sutrikus oro apykaitai kyla perkaitimo pavojus!

Galimi eksploataciniai sutrikimai.

- Nekeiskite, neperstatykite ir neužstatykite prietaiso oro tiekimo ir oro išleidimo srities, ir neatlikite jokių prietaiso konstrukcijos keitimų savo nuožiūra. Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą, patirtą dėl tokių prietaiso konstrukcijos pakeitimų.
- Atkreipkite dėmesį į oro apykaitos techninius duomenis.
- Nestatykite ir nenaudokite prietaiso ant transportavimo paletės!

Dėl oro padavimo ir išmetimo sistemų projektavimo kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą (žr. 2 psl.).



Naudojimo vieta



DĖMESIO!



Druskingas oras! Kenksmingas oras!

Prietaiso pažeidimas dėl korpuso ir elektrinių konstrukcinių dalių korozijos.

- Nestatykite prietaiso prie baseino.
- Nenaudokite prietaiso vietose, kuriose yra agresyvios aplinkos sąlygos (pvz., oro su chloro priemaisomis).

Galimi prietaiso pažeidimai!


Esant didesniems temperatūrų skirtumams transportavimo kelyje ir pastatymo vietoje, prietaiso negalima pradėti eksploatuoti iš karto, kai jis pastatomas.

- Palaukite bent 2 valandas ir tik paskui prijunkite prietaisą prie elektros srovės tiekimo tinklo.

Sutrikus oro apykaitai kyla perkaitimo pavojus!

Galimi eksploataciniai sutrikimai.

- Nekeiskite, neperstatykite ir neužstatykite prietaiso oro tiekimo ir oro išleidimo srities, ir neatlikite jokių prietaiso konstrukcijos keitimų savo nuožiūra. Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą, patirtą dėl tokių prietaiso konstrukcijos pakeitimų.
- Atkreipkite dėmesį į oro apykaitos techninius duomenis.
- Nestatykite ir nenaudokite prietaiso ant transportavimo paletės!

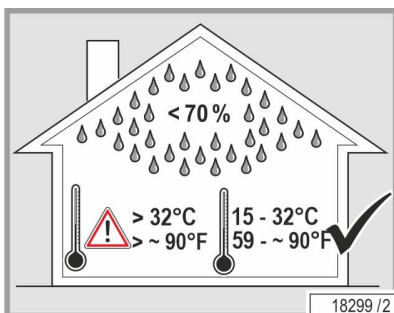

Aplinkos sąlygos

Prietaisas gali būti pažeistas!

Draudžiama naudoti prietaisą lauke.


Laikykite prietaisą atokiai nuo atviros ugnies ar užsidegimo šaltinių.

- Optimali aplinkos temperatūra: nuo +15 °C iki +32 °C
- Sandėliavimo temperatūra: nuo -15 °C iki +60 °C

Norint tinkamai naudoti didesniame nei 2 000 m virš jūros lygio aukštyje, jį būtina pertvarkyti.

Iš esmės prietaisas nepritaikytas naudoti mobiliuose objektuose (laimuose, autobusuose, traukiniuose). Norint užtikrinti tinkamą naudojimą mobiliuose objektuose, būtina prietaisą pertvarkyti.

Prieš pradėdami naudoti prietaisą būtinai kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą – žr. 2 psl.

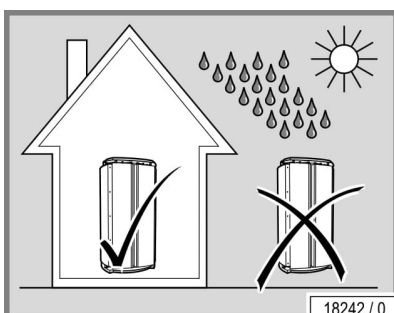

1.5.5 Paruošimas eksploatuoti



PAVOJUS!



Pažeistas maitinimo laidas!

Elektros smūgio ir nudegimo pavojus žmonėms.

- Maitinimo laidus gali pakeisti tik gamintojas arba specializuotos įmonės darbuotojas.



Pirmą kartą prietaisą pradeda eksploatuoti gamintojo klientų aptarnavimo tarnyba arba įgaliota klientų aptarnavimo tarnyba. Prietaisas perduodamas parengtas eksploatuoti.

Jeigu prietaisas ilgesnį laiką nebuvo naudojamas, prieš vėl pradedant eksploatuoti jį privalo patikrinti mūsų klientų aptarnavimo tarnyba arba įgaliota bendrovė.

Prietaisą leidžiama eksploatuoti tik su išoriniu laiko reguliatoriumi.

Laiko reguliatorius turi būti sukonstruotas taip, kad, net ir jam sugedus, prietaisas būtų automatiškai išjungiamas ne vėliau nei po <110 % pasirinktos trukmės. Prietaiso veikimo trukmė turi būti užtikrinama laiko reguliatoriumi pagal EN 60335-2-27 standartą.

Priklausomai nuo vietinių elektros energijos tiekimo įmonių naudojamų įrangos, prietaisai gali perduoti į pastato elektros tinklą triktis, turinčias įtakos elektros energijos tiekimo įmonės naudojamai centralizuotajai valdymo sistemai (TRA). Taip, pvz., gali būti sutrikdytas naktį veikiančių kaupiamųjų šildytuvų veikimas.

Jeigu prietaisai skleidžia trikdžius, eksploatuotojas privalo namo elektros instaliacijoje įrengti garsinio dažnio filtrą. Šiuo klausimu kreipkitės į specializuotą elektros įmonę. Specializuota elektros įmonė žino technines vietos elektros energijos tiekimo įmonės įvado sąlygas, todėl garsinio dažnio filtrą galima pritaikyti elektros energijos tiekimo įmonės elektros tinklui.

Galimas laikinasis arba nuolatinis režimas prijungus prie autonominio arba su tinklu sinchronizuoto energijos tiekimo šaltinio (pvz., izoliuotų tinklų, rezervinių sistemų). Prieš pradėdami naudoti prietaisą būtina kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą – žr. 2 psl.



PASTABA

Jei įtariate, kad kilo gaisras, nedelsdami atjunkite elektros srovės tiekimą, jei tai įmanoma padaryti saugiai.

Taip pat vadovaukitės įstatymų galios, oficialiųjų ir Profesinių sąjungų pateiktų teisės aktų, kuriems minėti nurodymai netaikomi.



1.5.6 Valdymas ir techninė priežiūra

Tinkamas aptarnavimas, techninė priežiūra ir einamasis remontas – tai būtina sąlyga siekiant užtikrinti, kad prietaiso naudojimas nekeltų pavojaus naudotojų sveikatai ir saugai ir kad bus garantuotas prietaiso funkcionalumas, užtikrinantis sklandų eksploatavimą.

Laikykitės šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų ir rekomendacijų. Užtikrinkite, kad būtų laikomasi patikros, techninės priežiūros ir einamojo remonto intervalų. Pasirūpinkite, kad baigusis nurodytai naudojimo trukmei būtų pakeistos lempos.

Draudžiama savavališkai rekonstruoti prietaisą arba reguliatorių ir atlikti jų pakeitimus. Nesilaikant šių reikalavimų panaikinamas eksploatavimo leidimas!

Norint išvengti grėsmių, prietaiso negalima naudoti esant pažeistam maitinimo laidui. Pažeistą maitinimo laidą turi pakeisti gamintojas, jo klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojas arba atitinkamą išsilavinimą turintis ir išmokytas kvalifikuotas personalas.




PASTABA

Jei įtariate, kad kilo gaisras, nedelsdami atjunkite elektros srovės tiekimą, jei tai įmanoma padaryti saugiai.

Taip pat vadovaukitės įstatymų galios, oficialiųjų ir Profesinių sąjungų pateiktų teisės aktų, kuriems minėti nurodymai netaikomi.

1.5.7 Eksploatavimo nutraukimas

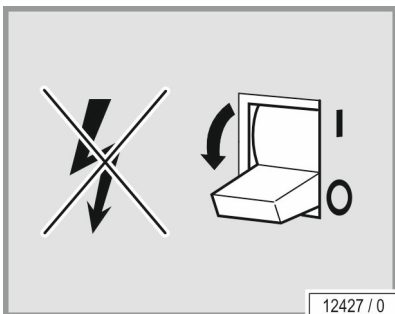

Norint laikinai arba galutinai nutraukti prietaiso eksploatavimą, prietaisą reikia atskirti nuo elektros srovės tinklo.

Galutinai nutraukiant prietaiso eksploatavimą reikia laikytis su utilizavimu susijusių teisės aktų.

1.5.8 Laikymas

Laikykite prietaisus sausoje ir nuo temperatūros svyravimų apsaugotoje vietoje. Apsaugai nuo įbrėžimų atvėsusį prietaisą galima uždengti plėvele.

- Sandėliavimo temperatūra: nuo $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ iki $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$

1.5.9 Atliekų šalinimas

Aplinkosaugos nuostatos – lempų ir maitinimo elementų utilizavimas



Lempose yra apšvietimo elementų ir kitų atliekų su gyvsidabriu. Maitinimo elementuose yra sunkiųjų metalų junginių.

Europos Sąjungoje galioja naudojimo šalyje pritaikyta direktyva dėl atliekų 2018/851/EB. Pagal Vokietijos atliekų įstatymą ir atitinkamus komunalinius atliekų įstatus, lempas ir baterijas reikia utilizuoti, pateikiant tai patvirtinančius dokumentus.

Vietos pardavimo tarnyba mielai padės Jums utilizuoti lempas ir baterijas:

- Telefonu arba raštu praneškite savo tarnybai apie lempų ir baterijų skaičių.

Tarnyba nurodys nemokamą lempų pristatymo punktą ir kartu su utilizavimo įmone pasirūpins, kad lempos būtų paimitos ir tinkamai utilizuotos. Ši paslauga yra mokama. Už Vokietijos ribų galioja atitinkami vietos teisės aktai. Kreipkitės į vietos pardavimo tarnybą.

Pakuotė

Pakuotei naudojamos 100 % perdirbamos medžiagos. Nebenaudojamas ir iš JK įmonių grupės gautas pakuotės galima grąžinti JK įmonių grupei. Pardavimo agentūra arba prekybos įmonė mielai suteiks konsultaciją.


Senų prietaisų utilizavimas

Prietaisas pagamintas iš pakartotinai perdirbamų medžiagų. JK įmonių grupė informuos Jus apie naudojamas medžiagas ir šių medžiagų pavojingumo aplinkai lygį.

Pagal direktyvą 2012/19/EB (Vokietijoje – Elektros ir elektrotechninės įrangos įstatymas (ElektroG) gamintojas privalo priimti atgal tam tikrus elektrinius ir elektroninius komponentus bei juos utilizuoti.

Susiję konstrukciniai elementai ir prietaisai ženklina šalia pateiktu simboliu.

Jums pageidaujant, JK įmonių grupė padės tinkamai utilizuoti prietaisą. Ši paslauga yra nemokama. Pardavimo agentūra arba prekybos įmonė mielai suteiks konsultaciją.

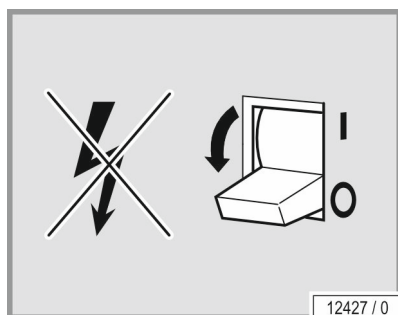

Registracijos Nr.

JK grupės įmonės registruotos kaip gamintojai Vokietijoje ir prisiima visus įsipareigojimus pagal Vokietijos elektros ir elektrotechninės įrangos įstatymą.

„JK-International GmbH, Division JK-Licht GmbH“ registracijos Nr. (lempos):

WEEE-DE 61515020

„JK-Products GmbH“ registracijos Nr. (prietaisai):

WEEE-DE 62655951

1.5.10 Direktyvos

Žr. pristatytą EB atitikties deklaraciją.



1.5.11 Eksportas

Mes nurodome, kad šie prietaisai skirti tik Europos rinkai; juos draudžiama eksportuoti į kitas šalis, pvz., JAV ar Kanadą bei šiose šalyse eksploatuoti! Mes neprisiimame atsakomybės už šios nuorodos nepaisymą! Pabrėžtinai informuojame, kad nepaisant šios nuorodos, eksportuotojui ir (arba) eksploatuotojui gali būti taikomos didelės su atsakomybe susijusios baudžiamosios arba administracinės priemonės.

1.5.12 AUX (muzika, pasirinktinai)

Asmeninis išmaniojo telefono naudojimas deginantis nėra laikomas viešu transliavimu pagal autoriaus teisių reikalavimus, todėl soliariumo eksploatuotojas neprivalo registruotis ir mokėti už kūrinių transliavimo teisių suteikimą atsakingai organizacijai.

Viešai naudojant muzikos failus taikomi tokie pat reikalavimai, kaip ir kitiems muzikos šaltiniams: kaip soliariumo operatorius arba savininkas, savo patalpose ir (arba) „JK-International GmbH“ prietaisuose įrengtais MP3 muzikos grotuvais galite transliuoti tik originalius garso failus, įsigiję tam reikiamas transliavimo teises. Šias teises suteikia organizacija, atsakinga už komercinių transliavimo teisių suteikimą Jūsų šalyje (Vokietijoje: GEMA / GVL).

Garso failus su apsauga nuo kopijavimo ir garsajuostėse įrašytus kūrinius draudžiama konvertuoti MP3 formatu ir (arba) išsaugoti juos standžiuosiuose, CD, MC, DVD garso diskuose, jei naudojama programinė įranga pašalina arba apeina garso ir duomenų laikmenų kopijavimo apsaugą.

Už kūrinių transliavimo teisių suteikimą atsakingos organizacijos darbuotojo arba kitos kontrolės institucijos reikalavimu bet kuriuo metu privalote pateikti išduotą pažymą apie įgytas transliavimo teises.

Laikydami visų anksčiau minėtų reikalavimų ir įgiję visas reikiamas teises naudoti MP3 muzikos modulį, galite konvertuoti savo originalius garso failus MP3 formatu, kurio reikia grotuvui. Tačiau leidžiama daryti tik vieną teisėtai įsigytų garso failų kopiją (vieną kopiją arba konvertavimą MP3 formatu). Įrašų šaltinius (originalias laikmenas) privaloma išlaikyti, tačiau negalima jų naudoti vienu metu su kopijomis.



PASTABA

Už komerciniam naudojimui įrašytas SD kortelės, kurios pristatomos kartu su JK garso sistema, taip pat privaloma sumokėti, jei jose yra LATGA turinys.

1.5.13 Techniniai pakeitimai


Prietaisas sukonstruotas pagal technikos lygį ir galiojančias saugos taisykles. Pasilieka teisę atlikti šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų brėžinių ir duomenų pakeitimus, reikalingus prietaisui tobulinti.

Draudžiama savavališkai rekonstruoti prietaisą bei reguliatorių ir atlikti kitus jo pakeitimus. Nesilaikant šių reikalavimų EB deklaracija netenka galios!

Naudokite tik originalias atsargines dalis. Nesilaikant šių reikalavimų EB deklaracija netenka galios!

1.6 Ženkliai ir lipdukai ant prietaiso

Prie prietaiso pritvirtinti ženklai, rodantys pavojaus sritis arba suteikiantys svarbios informacijos apie konstrukcinę dalį. Toliau pateikti ženklai yra pavyzdžiai. Pasirūpinkite, kad nurodomieji ženklai visada būtų gerai matomi ir įskaitomi. Jei trūksta nurodomųjų ženklų ir lipdukų, juos būtina priklijuoti.

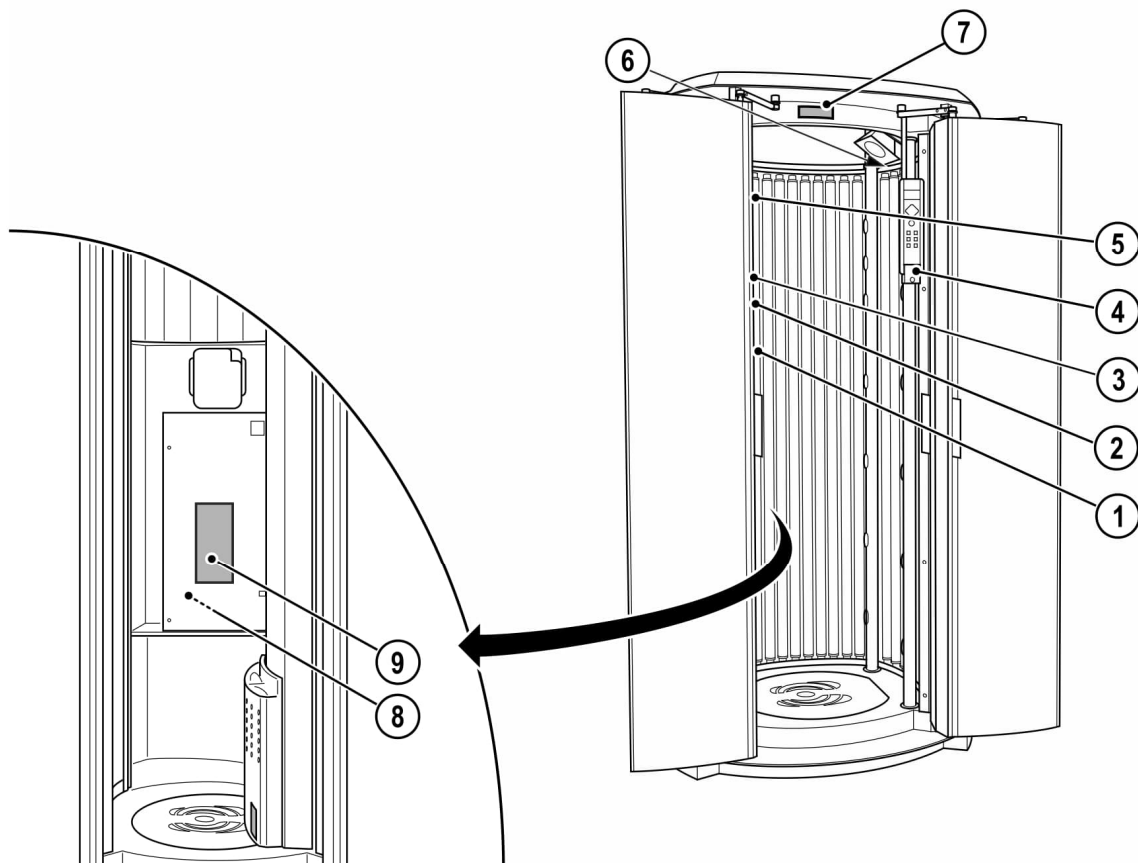

18515 / 0

1: Techninių duomenų lentelė


<i>Ergoline</i>	JK-Products GmbH 53578 Windhagen / Germany	2011
Typ: 100001410	Spannung/Voltage ~	Lstg./Input
Art.-No.: 000000000	400 - 415V 50Hz / 50Hz	5000W
Serial-No.: 0000000		

11991 / 2

Techninių duomenų lentelė yra ant lempos gaubto viršuje, kairėje. Joje pateikiama svarbi prietaiso identifikavimo informacija (pvz., serijos numeris = serijos Nr.).



2: įspėjamųjų nuorodų lipdukas (1019018-..)

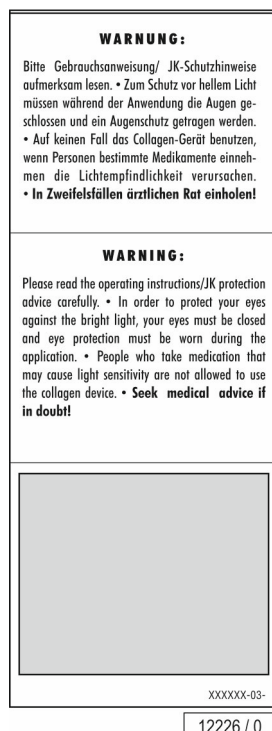

Lipdukas yra ant lempos gaubto dešinėsios šoninės dalies.

Šiam lipdukui priklauso lapas su nurodymais 1019017-.. (žr. priedą „Techniniai dokumentai“).

3: Apsauginio išjungimo lipdukas (1018687-..)



Šiam lipdukui priklauso lapas su nurodymais 1018688-.. (žr. techninių dokumentų).

4: Techninės priežiūros nurodymo lipdukas (800701-..)

ACHTUNG!
Dieses Gerät muß regelmäßig nach Hersteller-
vorschrift technisch gewartet bzw. über-
prüft werden, um jegliche Gefahr körperlicher
Schäden vollständig auszuschließen.
Plakettenbeschriftung = "Geräteproduktion ...
Quartal / Jahr"

ATTENTION!
This sunbed must be checked and serviced
at regular intervals in accordance with the
manufacturer's specifications in order to
rule out entirely any risk of physical injury.
Label wording = "Date of manufacture ...
quarter/year"



XXXXXX


12225 / 1

5: Lipdukas „Neeksportuoti į JAV / Kanadą“ (84829-..)

HINWEIS Wir weisen darauf hin, daß die Geräte nicht in die USA oder nach Kanada exportiert und dort betrieben werden dürfen. Bei Nichtbe- achtung dieses Hinweises wird keine Haftung übernommen.	NOTE We emphasize that these devices must not be exported to or operated in the USA or Canada! The manufacturer does not accept any liability in case of non-observance of this notice!	REMARQUE Nous attirons votre attention sur le fait que les appareils ne doivent pas être exportés ni utilisés aux Etats-Unis ou au Canada! Nous ne pourrions nullement être tenus responsables de dommages si cette remarque n'est pas respectée!
---	---	---

11977 / 2

6: Iešų duomenų lipdukas (pavyzdys)

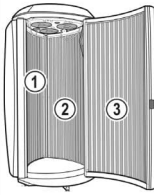
		Ergoline SUNRISE 488 DYNAMIC POWER		
		①	16x Ergoline TREND 80-200 W E14	1005900-
		②	16x Ergoline TREND 80-200 W E14	1005900-
		③	16x Ergoline TREND 80-200 W E14	1005900-
EN EN 60335-2-27, max. 6x4 0,3 W/m²				
JK-Products GmbH / GERMANY				1003086-01

13738 / 0

Lipdukas yra ant lempos gaubto, kairėje šoninėje dalyje.



7: Konstrukcinių dalių valdymo lipdukas ES 1510515-..

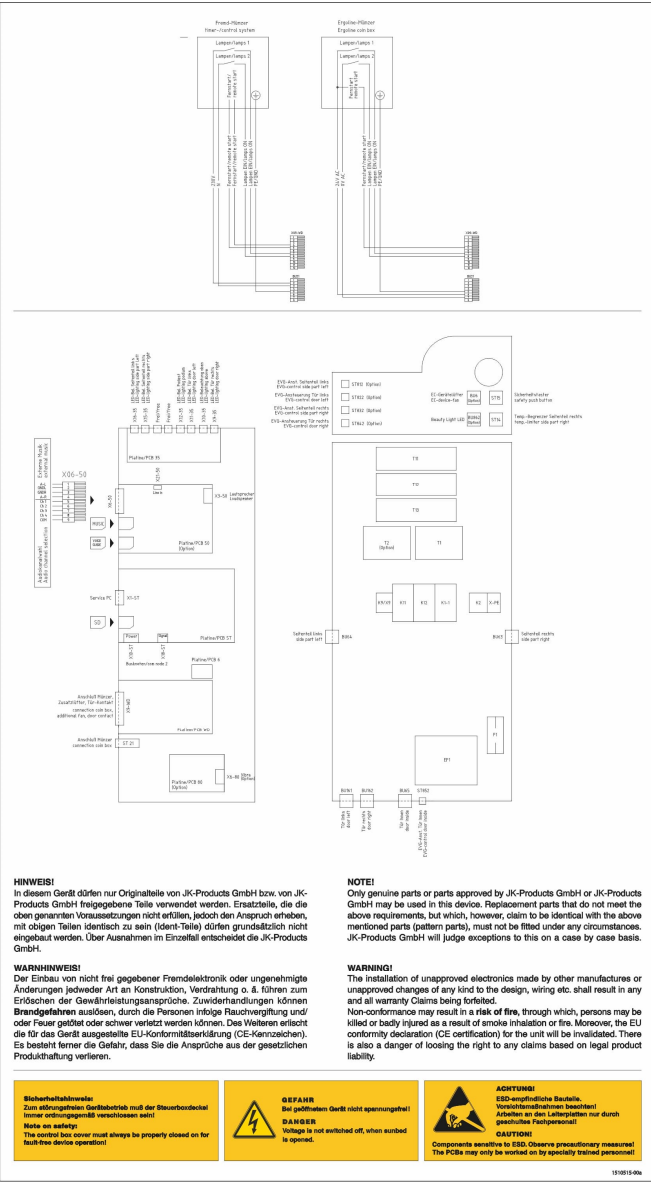

Lipdukas yra ant valdymo dėžutės dangčio.

1.7 Trūkumo pašalinimas



Klientams, įsigijusiems „RedWave Plus“ prietaisą iš „JK-International GmbH“ partnerių asmeniniam naudojimui arba verslo tikslais, pagal toliau nurodytas taisykles suteikia garantiją pašalinti prietaiso trūkumus; garantija netaikoma susidėvintioms detalėms, pavyzdžiui, aukštaslėgėms UV lempoms (degikliams), žemaslėgėms lempoms (vamzdeliams) ir starteriams, susidėvintioms medžiagoms („AQUA SYSTEM“, „AROMA SYSTEM“ priedams) bei akrilo stiklo plokštėms.

Jei gaminys yra nekokybiškas, tuomet „JK-International“ turi teisę ir įsipareigoja pasirinkti, ar gaminį pataisys, ar pristatys kitą gaminį. Jei gaminio pataisyti ar pristatyti naują gaminį neįmanoma arba tai atlikti nepavyko, pirkėjas gali nutraukti pirkimo sutartį arba atitinkamai sumažinti įsigijimo kainą.

Garantijos suteikimo terminas yra dveji metai nuo pristatymo arba, jei reikia atlikti priėmimo darbus, nuo priėmimo. Kliento teisės pagal šios garantijos sąlygas papildo kliento teises pagal galimą pirkimo sutartį bei neturi įtakos šioms teisėms.

1.8 Atsakomybės netaikymas

Pretenzijos dėl garantijos ir atsakomybės už asmenų sužalojimus ir materialinę žalą nepriimamos, jei žala buvo padaryta dėl vienos ar kelių iš šių priežasčių:

- prietaiso naudojimas ne pagal paskirtį;
- netinkamas prietaiso montavimas, eksploatacijos pradžia, valdymas ir techninė priežiūra;
- prietaiso eksploatavimas su sugedusiais saugos įtaisais arba su netinkamai sumontuotais arba neveikiančiais saugos ir apsauginiais įtaisais, įskaitant įspėjamuosius lipdukus;
- naudojimo instrukcijoje pateiktų nuorodų, susijusių su prietaiso transportavimu, laikymu, montavimu, eksploatacijos pradžia, naudojimu ir technine priežiūra, nesilaikymas;
- neinstruktuojų darbuotojų arba nekvalifikuotų technikų įdarbinimas;
- savavališki prietaiso arba regulatoriaus pakeitimai;
- nepakankama eksploatacinių dalių kontrolė;
- netinkamai atliktas remontas;
- ne originalių atsarginių dalių naudojimas;
- katastrofos dėl svertinių poveikių ir nenugalimos jėgos.

2 Aprašymas



2.1 Tiekimo apimtis

- „RedWave“ soliariumas
- RED LIGHT TECHNOLOGY lempos
- Apsauginiai akiniai
- Raktas su vidiniu šešiabriauniu
- Garso sistema
- AUX laidas
- Jungiamasis laidas
- Techniniai dokumentai (naudojimo instrukcija, klaidų kodų ir Professional Setup Manager brošiūra bei kiti dokumentai)

2.1.1 Pasirinktinai

- „Bluetooth®“
- „Vibra Shape“
- 3D garsas
- AROMA SYSTEM


2.2 Įranga


Prietaisų konstrukcija priklauso nuo tipo.

Šiame aprašyme pateikiami visi serijiniai ir papildomai pasirenkami konstrukciniai elementai / funkcijos, į kurias reikia atsižvelgti valdant prietaisą ir (arba) atliekant jo techninę priežiūrą.

Valdymo elementai taip pat gali būti skirtingi, atsižvelgiant į įrangą: iš antros pusės apšviesti tik tie mygtukai, kuriais galima naudotis; t. y. atitinkama funkcija turi įeiti į prietaiso įrangą.

2.3 Prietaiso aprašymas

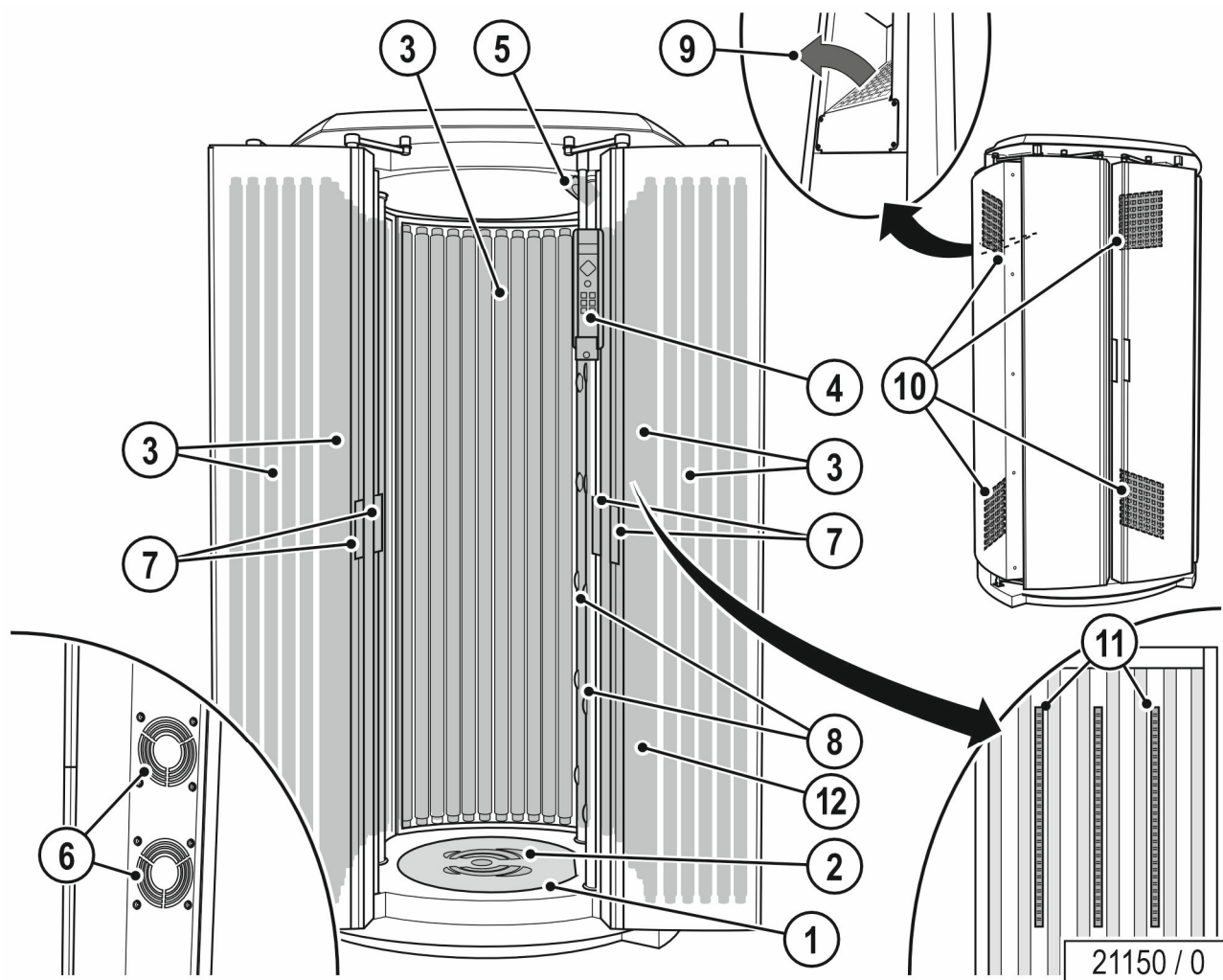


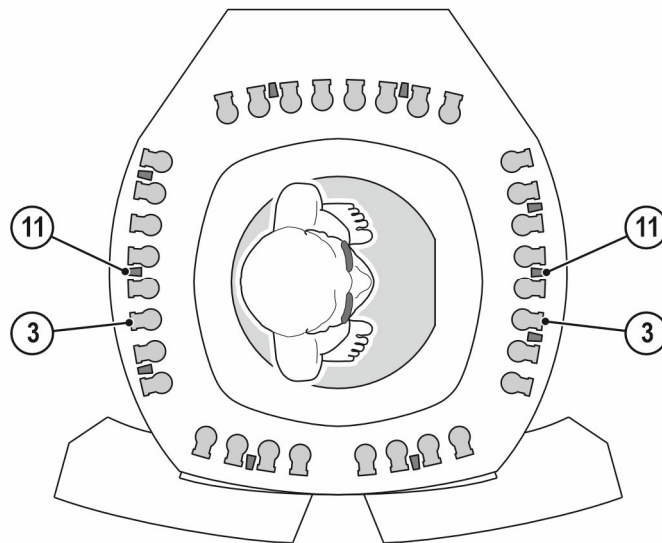

21060 / 0

1. Jėjimo sritis
2. Kilimėlis (silikonas) ir vibroplokštė (pasirinktinai)
3. Žemaslėgės lempos
4. Aptarnavimo elementas
5. Garsiakalbis
6. Ventiliatoriai (durų vėsinimas)
7. Durų rankenos (išorėje / viduje)
8. Kūno vėsinimo orapūtės
9. Šiam prietaisui netaikoma.
10. Oro tiekimo filtras
11. „Red Light“ ir infraraudonųjų spindulių šviesos diodai
12. AROMA SYSTEM (pasirinktinai)

2.4 Priedai (pasirinktinai)

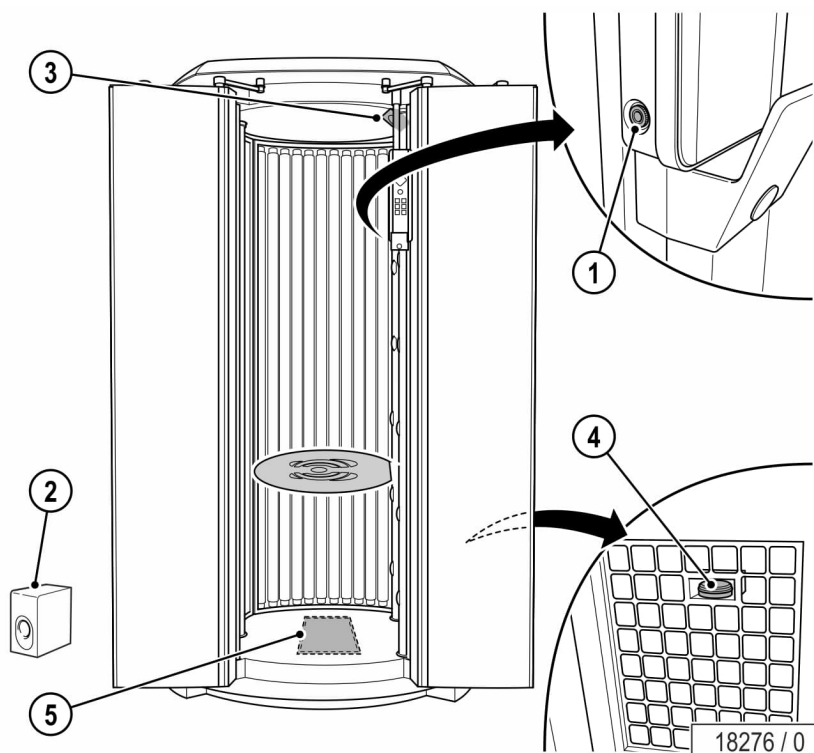

1. AUX jungtis
2. Garsiakalbis
3. Garsiakalbis
4. AROMA SYSTEM
5. Vibroplokštė

2.5 Veikimo principas

Raudonos šviesos ir infraraudonųjų spindulių sąveika turi įvairų biologiškai teigiamą poveikį kūniui.



„Vibra Shape“

Kūnas tiesiogiai reaguoja į patentuotus ir iš anksto užprogramuotus vibroplokštės judesius. Raumenys automatiškai įsitempia ir vėl atsilaudoja, o „Vibra Shape“ technologija stimuliuoja raumenų aktyvumą ir laikinai paskatina kraujotaką tam tikrose vietose.

Jūsų oda tampa lygesnė ir minkštesnė, o raumenys – tvirti ir stangrūs.

2.6 Vibracijos programų aprašymas

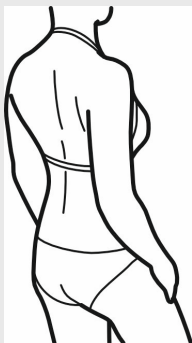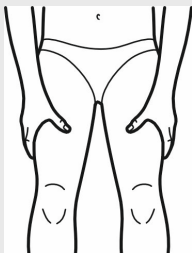

Programa ¹⁾	Eiga	Dažnis
	Raumenų atpalaidavimas (RECOVER)	žemas vibravimo dažnis
	Sveikatingumo programa pradedantiesiems	vidutinis vibravimo dažnis
	Sveikatingumo programa pažengusiems (RECHARGE)	aukštas vibravimo dažnis
	Odos būklės gerinimas ir celiulito profilaktika	kintamas vibravimo dažnis

¹⁾kiekviena programa pradedama šildymu ir baigiama vėsinimu.

3 Valdymas



3.1 Saugos nurodymai naudotojui



PAVOJUS!



Klausos pažeidimų pavojus!

Klausantis stipraus garso per uždedamąsias arba įstatomąsias ausines galima negrįžtamai pažeisti klausą.

- Nenustatykite per stipraus garso.

3.2 RedWave Plus Sistema

Atkreipkite dėmesį į 1 skyriuje pateiktas saugos nuorodas ir įspėjimus.

Veiksmai prieš naudojantis, naudojantis ir baigus naudoti šviesos procedūrą:

- Deginantis patalpoje negali būti kitų asmenų, ypač vaikų.
- Naudojant prietaisą patalpoje negali būti naminių gyvūnų.
- Prieš naudodamiesi nusiimkite visus papuošalus (išsiimkite įvertus auskarus).
- Prieš naudodamiesi nusivalykite makiažą.
- Kadangi šviesa yra labai intensyvi, rekomenduojame naudojantis užsimerkti. Kad patirtis būtų malonesnė, taip pat rekomenduojame užsidėti apsauginius akinius.
- Vadovaukitės nuorodomis dėl naudojimo trukmės.



3.3 Naudojimo nuorodos



PAVOJUS!




Pavojus prispausti!

Tarp dugno plokštės ir vibracinės plokštės yra maža ertmė, kurioje galima prispausti kūno dalis.


- Niekada nenaudokite prietaiso be kilimėlio (iš sili-kono)!

Veiksmai prieš naudojantis, naudojantis ir baigus naudotis:

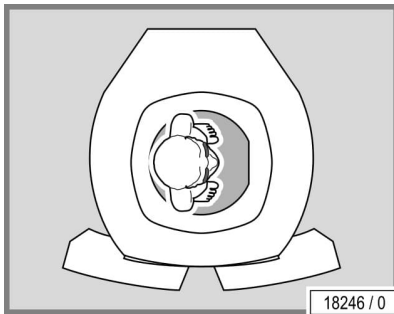

18246 / 0

- Naudojant prietaisą patalpoje negali būti kitų žmonių.
- Prieš naudodamiesi nusiimkite visus papuošalus (išsiimkite įver-tus auskarus).
- Prieš naudodamiesi laiku nusivalykite kosmetiką ir nenaudokite jo-kių apsaugos nuo saulės priemonių.
- Visada laikykitės rekomenduojamos naudojimo trukmės.

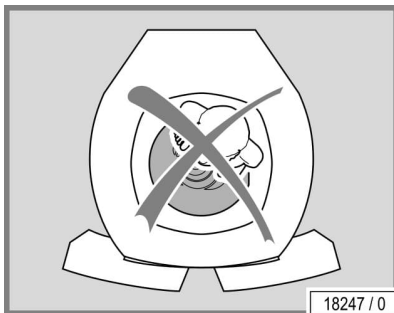

18247 / 0

RedWave Plus Prietaisas

- Naudodamiesi prietaisu stovėkite tiesiai ir viduryje.

„Vibra Shape“




PAVOJUS!




Fizinių sužalojimų pavojus!

Vibroplokštė tinka ne visiems naudotojams.

- Vadovaukitės kontraindikacijomis, nurodytomis 10 psl.

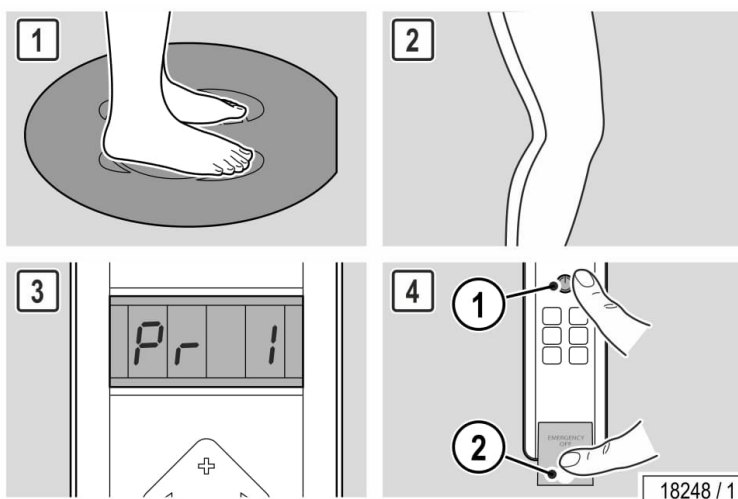


18248 / 1

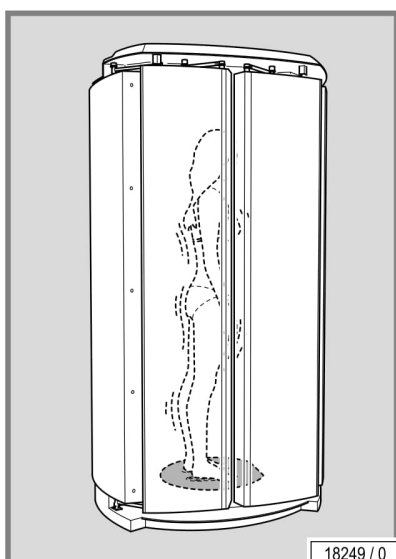


18249 / 0

- Pastatykite pėdas ant pėdų žymų (1).
- Lengvai sulenkite kojas per kelius (2).
- Pirmąkart naudodamiesi pasirinkite 1 programą, kad galėtumėte patikrinti savo (3) atsparumą.
- Pasijutę prastai arba ėmus svaigti galvai pristabdykite vibroplokštę paspaudę START / STOP mygtuką (4/1). Norėdami sustabdyti prietaisą, paspauskite mygtuką AVARINIS ATVEJIS, IŠJUNGTI (4/2). Jei paspaudžiamas mygtukas AVARINIS ATVEJIS, IŠJUNGTI, išsijungia visas prietaisas, išskyrus valdymo skydelį. Situaciją AVARINIS ATVEJIS, IŠJUNGTI galima atšaukti praėjus 2 sekundės trunkančiam blokavimo laikui. Paskui prietaisas vėl įjungia naudojimo režimą.

3.4 Valdymo apžvalga

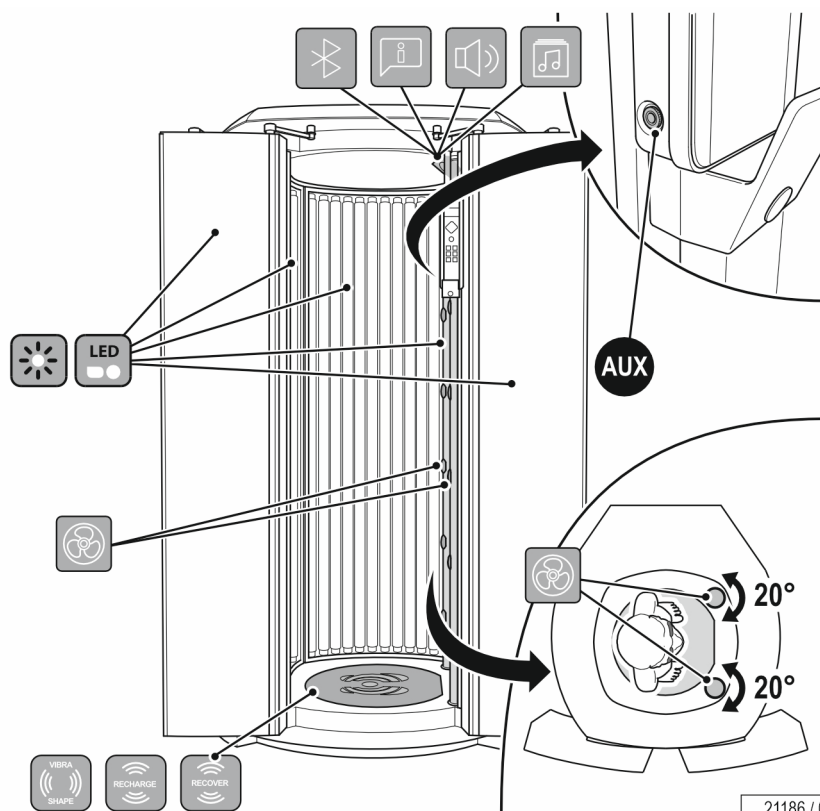

21186 / 0

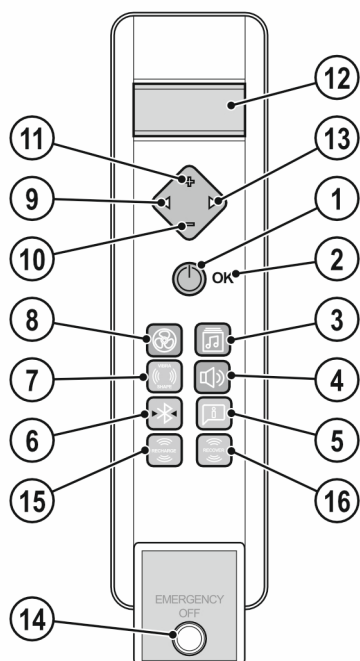

21187 / 0


1. START / STOP mygtukas
2. OK mygtukas (matomas ne visada)
3. Piktograma „Garso sistema“
4. Piktograma „Garso stipris“
5. Piktograma „VOICE GUIDE“
6. Piktograma „Bluetooth®“ (tik prieš naudojimąsi)
7. Piktograma „Vibra Shape“ (pasirinktinai)
8. Piktograma „Kūno vėsinimas“
9. Perkėlimo į kairę mygtukas
10. Mažinimo mygtukas
11. Didinimo mygtukas
12. Ekranas – funkcijos ...
13. Perkėlimo į dešinę mygtukas
14. AVARINIS ATVEJIS, IŠJUNGTI mygtukas
15. Piktograma „Vibra Shape RECHARGE“ (pasirinktinai)
16. Piktograma „Vibra Shape RECOVER“ (pasirinktinai)

3.4.1 Navigacija

Svarbiausias nuostatas valdymo pultu ir valdymo elementu galima parinkti dar prieš įjungiant prietaisą „Control Center“. Prietaiso viduje esančiu valdymo skydeliu galima funkcijas išjungti arba įjungti naudojantis prietaisu.



Navigacijos blokas – valdymo pultas

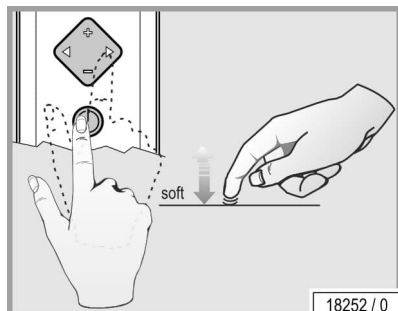

„Control Center“ galima patogiai valdyti specialiąsias funkcijas.




Patvirtinkite parinktį.

Atsižvelgiant į pasirinktą funkciją valdymo elemente rodoma, ar galima naudoti šį mygtuką.



Patvirtinkite parinktį.

Atsižvelgiant į pasirinktą funkciją valdymo elemente rodoma, ar galima naudoti šį mygtuką.

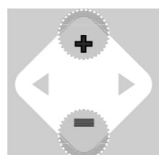

Pasirinkti įrenginio funkciją.

Įjungus „RedWave Plus“ prietaisą pagrindiniu režimu šviečia funkcijų, kurias galima naudoti, piktogramos. Parinkus vieną iš funkcijų, trumpai mirksi atitinkama piktograma. Tuo metu galima keisti nuostatus.

Informacijos apie galimas nuostatus rasite atskirame naudotojui skirtame žinyne „Professional Setup Manager“ (užsakymo numeris: 1017127-..) techniniuose dokumentuose.



PASTABA

Tik soliariumo savininkui:

norėdami atverti PROFESSIONAL SETUP MANAGER,

budėjimo režime paspauskite mygtuką  ir laikykite apie 3 sekundes.



PASTABA

Paspaudę mygtuką  ir palaikę 3 sekundes pateksite į parodomąjį režimą.. Galimas naudoti funkcijas čia galite parinkti nesinaudodami prietaisu.



PASTABA

Jei per 8 sekundes nepaspaudžiamas joks mygtukas, grąžinamas pagrindinis režimas.

3.5 Funkcijos



Piktogramų parinktis / mygtukų spaudimo seka	Navigacija	Aprašymas / ekrano indikatoriai	Informacija
		START / STOP RED LIGHT TECHNOLOGY lempų ir šviesos diodų išjungimas ir įjungimas naudojantis prietaisu Veikimas sustabdomas.	Jei RED LIGHT TECHNOLOGY lem- pos ir šviesos diodai išjungianti naudojantis prietaisu, naudojimo trukmė skaičiuojama toliau.
9 1		Kūno ventiliatoriaus reguliavi- mas, 1–9 pakopos	
14 14		Garsumo reguliavimas: 0–14 pakopos	
		Garso sistemos parinktės SD kortelė: paspauskite pliuso mygtuką.	Pasirinkus vidinę muziką, spau- džiant + / – mygtuką galima paro- domajame režime ir naudojantis prietaisu pasirinkti muzikos kūrinį.
		Studijos kanalų pasirinkimas: paspauskite pliuso mygtuką.	
		Savo muzikos pasirinkimas, AUX arba „Bluetooth®“: paspauskite pliuso mygtuką.	
		Garso sistemos išjungimas: paspauskite minuso mygtuką.	„Bluetooth®“ režime + / – mygtu- kais galima pasirinkti muzikos kū- rinį naudojantis prietaisu.
 	 	VOICE GUIDE išjungimas: paspauskite minuso mygtuką –. VOICE GUIDE įjungimas: paspauskite pliuso mygtuką + .	VOICE GUIDE sistema suteikia a- kustinę pagalbą, kaip valdyti prie- taisą, ir gali būti naudojama tik kartu su garso sistema. VOICE GUIDE sistema įprastai būna įjungta parengties režime ir naudojantis prietaisu.

Piktogramų parinktis / mygtukų spaudimo seka	Navigacija	Aprašymas / ekrano indikatoriai	Informacija
 ✓  ✗		„Bluetooth®“ išjungimas: paspauskite minuso mygtuką. „Bluetooth®“ įjungimas: paspauskite pliuso mygtuką.	
		AVARINIS ATVEJIS, IŠJUNGTI	Budėjimo režime mygtukas AVARINIS ATVEJIS, IŠJUNGTI neatlieka jokios funkcijos. Paspaudus mygtuką AVARINIS ATVEJIS, IŠJUNGTI, išsijungia visas prietaisas, išskyrus valdymo elementą. Esant šiai būsenai, ekrane rodoma, kad buvo paspaustas mygtukas AVARINIS ATVEJIS, IŠJUNGTI. Naudojimo trukmė pasibaigė. „VOICE GUIDE“ naudotojui teikia nuorodas, kaip naudotis funkcija AVARINIS ATVEJIS, IŠJUNGTI. Funkciją AVARINIS ATVEJIS, IŠJUNGTI galima pašalinti praėjus 2 sekundės trunkančiam blokavimo laikui. Tada prietaisas vėl įsijungia.
 0		„Vibra Shape“	
 1		RECHARGE: paspauskite pliuso mygtuką.	
 2		2 programa: paspauskite pliuso mygtuką.	
 3		RECOVER: paspauskite pliuso mygtuką.	
 4		4 programa: paspauskite pliuso mygtuką.	




3.6 Pradėti

- Uždarykite duris.
- Paspauskite mygtuką START / STOP.

Paleidžiant įjungiamos šios funkcijos:

- RED LIGHT TECHNOLOGY lempos ir šviesos diodai
- Kūno vėsinimas
- Garso sistema (parinktis)
- „Voice Guide“ (parinktis)

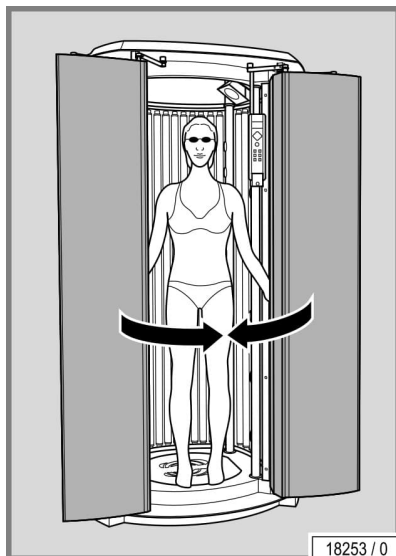

3.7 Prijungimas prie prietaisų su „Bluetooth®“ funkcija



PAVOJUS!



Klausos pažeidimų pavojus!

Klausantis stipraus garso per uždedamąsias arba įstatomąsias ausines galima negrįžtamai pažeisti klausą.

- Nenustatykite per stipraus garso.

Lankytojai gali per „Bluetooth®“ prie prietaiso prijungti asmeninį išmanųjį telefoną, jei yra specialus garso sistemos priedas.

Prietaisas ir asmeninis lankytojo išmanusis telefonas prijungiami naudojant „Bluetooth® Connect“¹ arba stereokištukas. Įjungęs „Bluetooth® Connect“ funkciją lankytojas gali soliariume klausyti savo mėgstamos muzikos, kuri išsaugota, pavyzdžiui, jo išmaniajame telefone. Laidų prijungti nereikia. Valdoma labai paprastai – naudojantis paspaudžiami „Control Center“ mygtukai.



PASTABA

- „Ergoline“ negali užtikrinti, kad ši funkcija yra suderinama su visais prietaisais su „Bluetooth®“ funkcija.
- Prieš sujungdami prietaisą su šia sistema, perskaitykite naudotojui skirtą žinyną, kuriame pateikiama daugiau informacijos apie „Bluetooth®“ suderinamumą.
- Įsitikinkite, kad Jūsų prietaise aktyvinta „Bluetooth®“ funkcija ir prietaisas matomas visiems kitiems prietaisams su „Bluetooth®“ funkcija.

Prijungimas prie grotuvo su „Bluetooth®“ funkcija

Aktyvinkite „Bluetooth®“ funkciją ir įjunkite prietaisą su „Bluetooth®“ paiešką.

„Bluetooth®“ funkcijos aktyvinimas „iPhone®“:

„iPhone®“:

Nustatymai → Bendrieji → „Bluetooth®“ → ĮJUNGTI (paleidžiama prietaisų paieška)

„Bluetooth®“ funkcijos aktyvinimas išmaniajame telefone su „Android®“ operacine sistema:

Išmanusis telefonas su „Android®“ operacine sistema:

Paspauskite „Bluetooth®“ simbolį → NUSKAITYTI (paleidžiama prietaisų paieška)

¹ Ryšio sistema: „Bluetooth®“ standartinė 3.0 versija, 2.1 versija ir EDR; maks. veikimo nuotolis: apie 10 m; dažnio diapazonas: 2,4 GHz diapazonas (2,4000–2,4835 GHz); tarpusavyje suderinami „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP; kartu galimi naudoti prietaisai (poravimas): prietaisas


**PASTABA**

Prietaise gali būti išsaugota daugiausia dešimt prijungtų prietaisų su „Bluetooth®“ funkcija. Prijungiant iš naujo, pirmiausia reikia ištrinti prietaisą iš prietaiso su „Bluetooth®“ funkcija. Paskui reikia iš naujo pakartoti aktyvinimo procesą.

Aktyvinkite „Bluetooth® Connect“ „Control Center“.



- Paspauskite „Bluetooth®“ simbolį „Control Center“.

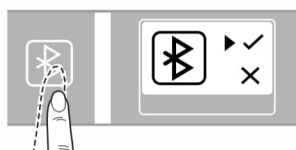


- Aktyvinkite „Bluetooth® Connect“ savo garso prietaise.
- Pasirinkite, pvz., „RedWave Plus 01“.



Sėkmingai susieta „Control Center“.

**PASTABA**

Pradėkite klausytis garso grotuve įrašytos muzikos.

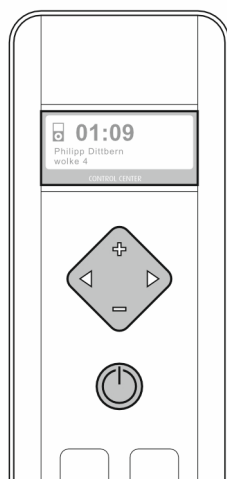

18254 / 0

Rodmuo valdymo elemente sėkmingai prijungus.

**PASTABA**

Sėkmingai prijungus „Bluetooth®“ simbolis nuolat šviečia mėlynai.

**PASTABA:**

„Bluetooth®“ funkcija veikia tik prietaiso viduje. Naudojant už prietaiso ribų, galimos signalo priėmimo triktys.

3.8 Sava muzika



PAVOJUS!



Klausos pažeidimų pavojus!

Garsios muzikos klausymas gali visam laikui pakenkti klausai.

- Nenustatykite per stipraus garso.



DĖMESIO!



Išmanusis telefonas gali būti pažeistas dėl karščio.

- Nedėkite grotuvo tiesioginių spindulių veikiamoje vietoje.

Gali nutrūkti kabelis ir sugesti lizdai.




- Atjungdami išmanųjį telefoną netraukite už laido.

Klientai gali prie prietaiso prijungti savo išmanųjį telefoną.

1. Medž. Nr. 1001855-.. pateikia eksploatuotojas (1,5 m / 2 x 3,5 mm stereokištukas).
2. Prijungimas prie išmaniojo telefono: žr. išmaniojo telefono gamintojo dokumentaciją.

Prijungimas:

- Prijunkite AUX laidą (stereokištuką) prie garso sistemos.
- Prijunkite AUX laidą prie išmaniojo telefono.
- Išsirinkite kūrinio pavadinimą ir paleiskite.
- Jei reikia, išmaniajame telefone pareguliuokite garsumą, kad garso sistema atpažintų išmaniojo telefono garso signalą.

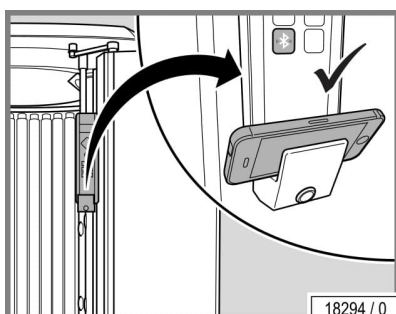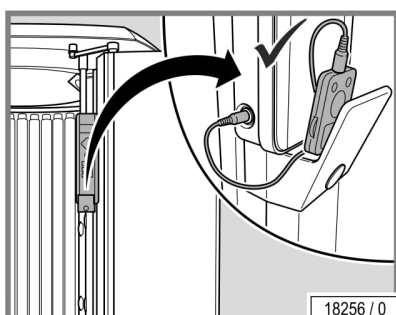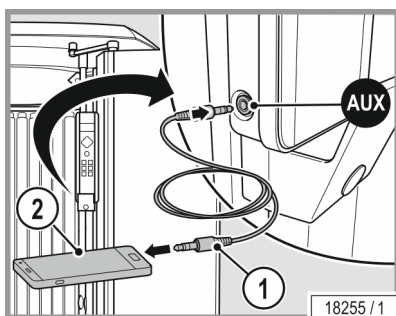

4 Valymas ir techninė priežiūra



4.1 Valymo ir techninės priežiūros saugos nuorodos


PAVOJUS!



Elektros įtampa visame prietaise

Elektros smūgio ir nudegimo pavojus žmonėms.

- Prieš pradėdami darbus su prietaisu, atjunkite visus įtampą tiekiančius laidus.
- Užtikrinkite, kad atjungti laidai nebūtų per klaidą prijungti.
- Patikrinkite, ar nėra įtampas.
- Visi darbai ir elektros sujungimai turi būti atliekami pagal nacionalinius atitinkamos eksploatuotojo šalies reikalavimus (pvz., VDE taisyklės Vokietijoje) ir juos turi atlikti specialiai paruošti specialistai.

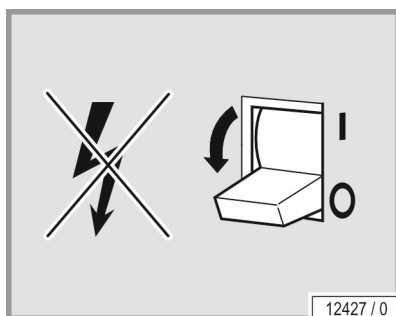

12427 / 0

Jei reikia atlikti atitinkamus darbus su prietaisais, juos būtina atjungti nuo elektros tinklo. Tai reiškia, kad visi įtampą tiekiantys laidai turi būti atjungti.

Nepakanka tik išjungti prietaisą, nes atitinkamose jo dalyse gali likti įtampa. Todėl atlikdami darbus su prietaisu išjunkite visus saugiklius ir, jei įmanoma, juos išimkite.

Nenumatyto įjungimo atveju gali įvykti sunkūs sužalojimai. Iškart po prietaiso išjungimo apsaugokite visus jungiklius arba saugiklius, panaudotus prietaisui išjungti, nuo įrenginio pakartotinio įjungimo.

- Užrakinkite saugiklių dėžutę pakabinama spynele.


Jeigu apsauginių automatų negalima išsukti, virš kirtiklio lipnia juosta galima užklijuoti užrašą 'Neįjungti – pavojinga'.

Visada nedelsdami ir patikimai pritvirtinkite draudžiamąjį ženklą su užrašu:

'Atliekami darbai!'

'Vieta:'

'Ženklą leidžiama nuimti tik:'

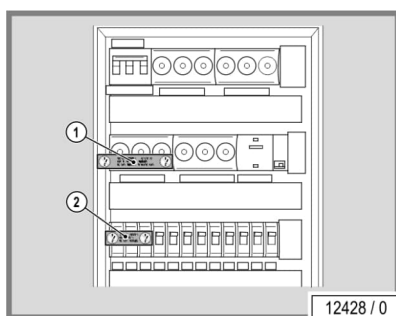

12428 / 0

4.2 Sutrikimai

Ekrane rodomi klaidų kodai, kad būtų lengviau nustatyti klaidos priežastį:

- Atsiradus sutrikimui, ekrane ima mirksėti klaidos kodas.
- Atsiradus kelioms klaidoms, klaidų pranešimai rodomi pakaitomis.
- Klaidos pašalinimas patvirtinamas paspaudus START / STOP mygtuką.
- Jei klaidos pašalinti nepavyksta, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą – žr. 2 psl.

Daugiau informacijos apie klaidų aprašymą ir šalinimą rasite skyriuje „Klaidų kodai“ (užsakymo Nr. 1011811-..).



4.3 Valymas



PAVOJUS!



Per sąlytį su oda gali būti pernešamos infekcijos! Visus daiktus / prietaiso dalis, prie kurių naudodamasis prietaisu gali prisiliesti naudotojas, po kiekvieno naudojimo reikia dezinfekuoti:

- rankenos ir valdymo skydas;
- apsauginiai akiniai;
- AUX laidas;
- akrilo stiklo plokštės;
- visa dugno plokštė, įskaitant kilimėlį (iš silikono).



PAVOJUS!



Suspaudimo pavojus valant dugno plokštę ir vibroplokštę!

Tarp dugno plokštės ir vibroplokštės yra maža ertmė, kurioje galima prispausti pirštus.

- Valydami neikiškite pirštų į šią ertmę.

Greitai ir kruopščiai dezinfekcijai atlikti rekomenduojame naudoti greitaveikį paviršių dezinfekavimo valiklį.



PASTABA

- Norėdami gerai dezinfekuoti, išlaikykite nurodytą poveikio trukmę. Vadovaukitės gamintojo pateikta naudojimo informacija.
- Praėjus nustatytai poveikio trukmei, nuvalykite valiklio / dezinfekavimo priemonės likučius.
- Tai darykite minkštu ir švariu vienkartinį popieriniu rankšluosčiu.
- Patikrinkite apžiūrėdami. Jei matote nešvarių vietų arba valiklio / dezinfekavimo priemonės likučių, nuvalykite dar kartą.
- Dar kartą patikrinkite apžiūrėdami.

4.3.1 Paviršių valymas

Akrilo stiklo paviršiai



DĖMESIO!



Netrinkite sausų, nes galite subraižyti!

Nesilaikant šios nuorodos, garantinės pretenzijos nepriimamos.

- Akrilo stiklo plokščių paviršiams greitai ir higieniškai nepriekaištingai valyti naudokite tik akrilo stiklo plokščių greitaveikį paviršių dezinfekavimo valiklį.
- Dezinfekavimo preparatus arba tirpiklius (pvz., lizoformą, etilo alkoholį ir kitus skysčius, savo sudėtyje turinčius alkoholio) naudoti draudžiama.

Užsiteršęs akrilo stiklas tampa netinkamas naudoti!

Karštos lempos prikepina nešvarumus prie stiklų, ilgainiui stiklai tampa netinkami naudoti.

- Kruopščiai nuvalykite pirštų atspaudus, valymo priemonių likučius ir kitus nešvarumus.

Plastikiniai paviršiai

Kitus dažytus ir nedažytus plastikinius paviršius geriausia valyti tik šiltu vandeniu ir zomšiniu audiniu. Jokiu būdu nenaudokite edžių alkoholinių valiklių arba eterinių aliejų. Jie gali sukelti pažeidimų, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai.

Valymo metu nuo guminių sandariklių zomšinis audinys gali šiek tiek pajuoduoti. Tai yra dėl gamybos technologijos.

Stenkitės nepažeisti akrilo stiklo ir plastikinių paviršių.


- Prieš atlikdami valymo darbus, nusiimkite žiedus, laikrodžius, apyrankes ir t. t.



4.4 Lempas

- Jei reikia, lempas galima nuvalyti drėgna šluoste be valiklių.

4.5 Valymo planas

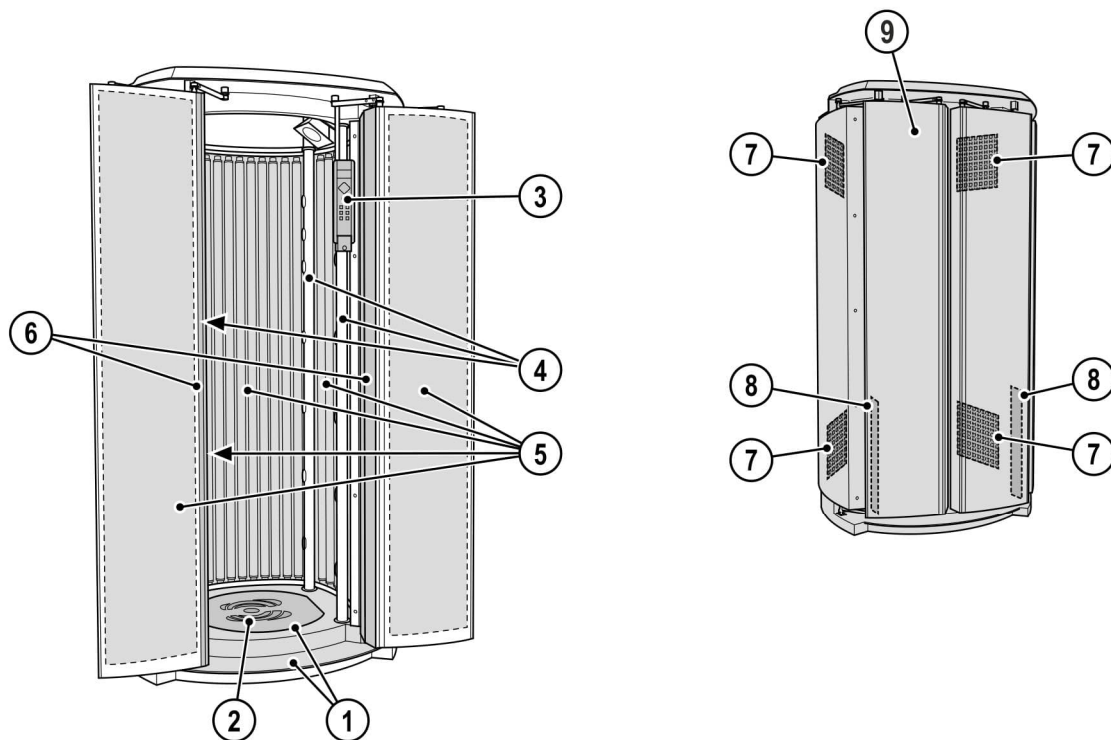

18257 / 1

Konstrukcinė dalis		Intervalas			Darbas	Skat. lpp.
		Kiekvieną kartą po naudojimo	Kai reikia	Kas 50 val.		
1	Jėjimo sritis	X			Valyti ir dezinfekuoti	41
2	Kilimėlis (iš silikono)	X			Valyti ir dezinfekuoti	41
3	Control Center	X			Valyti ir dezinfekuoti	41
4	Rankena (viduje)	X			Valyti ir dezinfekuoti	41
5	Akrilo stiklo plokštės		X		Valyti	42
6	Rankena (išorėje)	X			Valyti ir dezinfekuoti	41
7	Filtrai			X	Išmontuoti ir išvalyti filtrus	59
8	Filtro įdėklai			X	Išmontuoti ir išvalyti filtrus	59
9	Paviršiai		X		Valyti	42
	Apsauginiai akiniai	X			Valyti ir dezinfekuoti	41
	AUX laidas	X			Valyti ir dezinfekuoti	41



PASTABA

Po kiekvieno naudojimosi atliktą valymą reikia patvirtinti START / STOP mygtuku (pasibaigus prietaiso ventiliatoriaus inercinio veikimo laikui).

4.6 Techninė priežiūra

Nuo techninės priežiūros darbų atlikimo priklauso, ar prietaisas atitinka jam keliamus reikalavimus. Todėl būtina laikytis nustatytų techninės priežiūros intervalų ir kruopščiai atlikti techninės priežiūros darbus.

Dalių, kurių techninę priežiūrą reikia atlikti, esamą veikimo valandų skaičių galite pasižiūrėti pirminių nuostatų režimu (žr. „Professional Setup Manager“, užsakymo Nr. 1017127-..).

Nurodome, kad tinkamai prietaiso būklei užtikrinti, kas 12 mėnesių (nuo eksploatavimo pradžios) prietaisą turi periodiškai patikrinti mūsų klientų aptarnavimo tarnyba arba įgaliota bendrovė!

Atliktas patikras ir techninės priežiūros darbus turite įrašyti prietaiso, eksploatavimo ir techninės priežiūros vadove (užsakymo Nr. 1010933-..).

4.7 Techninės priežiūros planas




DĖMESIO!



Naudokite tik originalias tokio paties tipo atsargines dalis! Naudojant kitas dalis prietaisas nebeatitinka atitikties deklaracijos ir jo nebegalima eksploatuoti!

Už žalą, kuri aiškiai patirta dėl neoriginalių atsarginių dalių naudojimo, jokios atsakomybės neprisiimame.

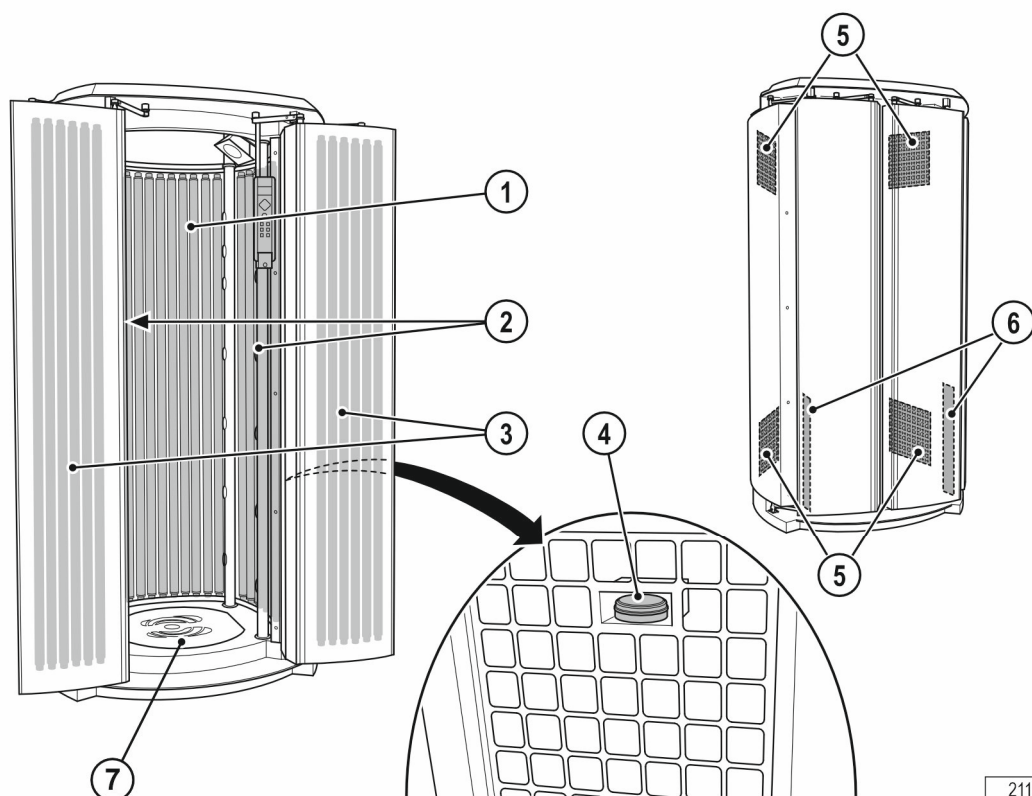

21151/0

Konstrukcinė dalis		Intervalas			Darbas	Skat. lpp.
		Kiekvieną kartą prieš naudojant	800 veikimo valandų	1000 veikimo valandų	3000 veikimo valandų	
1	Žemaslėgės lempos, Galinė sienelė		X		Pakeisti	51
2	Žemaslėgės lempos, Šoninės sienelės		X		Pakeisti	56
3	Žemaslėgės lempos, Priekinės durys		X		Pakeisti	51
1	Akrilo stiklo plokštė, Galinė sienelė	X			Patikrinti, prireikus pakeisti	51
2	Akrilo stiklo plokštės, Šoninės sienelės	X			Patikrinti, prireikus pakeisti	56
3	Akrilo stiklo plokštės, Priekinės durys	X			Patikrinti, prireikus pakeisti	56
1	Akrilo stiklo plokštė, Galinė sienelė			X	Pakeisti	56
2	Akrilo stiklo plokštės, Šoninės sienelės			X	Pakeisti	56



Konstrukcinė dalis		Intervalas			Darbas	Skat. lpp.
		Kiekvieną kartą prieš naudojant	800 veikimo valandų	1000 veikimo valandų	3000 veikimo valandų	
3	Akrilo stiklo plokštės, Priekinės durys				X	Pakeisti 51
4	AROMA rezervuaras		X			Patikrinti, prireikus pakeisti 61
5	Filtrai				X	Pakeisti 59
6	Filtro įdėklai			X		Pakeisti 59
7	Kilimėlis (iš silikono)		X			Patikrinti, prireikus pakeisti

Techninę priežiūrą gali atlikti tik įgaliotas, išmokytas ir kvalifikuotas personalas



DĖMESIO!



Pavojus asmenims neatlikus techninės priežiūros darbų!

Jei techninės priežiūros darbai nebuvo atlikti, gali būti padaryta žalos medžiagoms ir asmenims!

- Techninės priežiūros darbus gali atlikti tik įgalioti ir išmokyti specialistai, įgalioti, išmokyti ir kvalifikuoti bendrovės „JK-International GmbH“ Division „JK-Global Service“!
- Už techninės priežiūros intervalų laikymąsi atsako eksploatuotojas!

Techninės priežiūros darbus pagal kontrolinį sąrašą 1019858-.. turi atlikti gamintojo techninės priežiūros tarnybos technikas arba gamintojo įgalioti, atitinkamą išsilavinimą ir kvalifikaciją įgiję asmenys.

Kontroliniame sąraše 1019858-.. turi būti įrašyta ir patvirtinta, kad techninės priežiūros darbai buvo atlikti tinkamai.

Techninės priežiūros darbus reikia atlikti pagal toliau nurodytus intervalus:

- Kasmet arba kas 2000 veikimo valandų, atsižvelgiant į tai, kuris terminas ateina anksčiau.
- Kas 3000 veikimo valandų
- Kas 5000 veikimo valandų
- Po 10 metų arba kas 20000 veikimo valandų, atsižvelgiant į tai, kuris terminas ateina anksčiau.

Jei, remiantis ant prietaiso nurodyta pagaminimo data, prietaisas naudojamas jau 10 metų, prietaiso būklę turi patikrinti sertifikuotas „JK-International GmbH“ Division „JK-Global Service“ techninės priežiūros technikas. Tik tuomet galima prietaisą naudoti toliau.

Jei toks prietaiso įvertinimas neatliekamas, gali būti padaryta žalos asmenims arba materialiniam turtui.

Neprisiimame atsakomybės, jei praėjus 10 metų prietaisas naudojamas toliau, neatlikus būsenos įvertinimo.



4.8 Lempų keitimo nuorodos

PAVOJUS!



Pavojus nusideginti palietus karštas lempas ir prietaiso dalis!

Jei „RedWave Plus“ prietaisas prieš išjungiant ir atidarant buvo eksploatuojamas, lempos ir korpuso dalys gali būti karšti.

- Prieš keisdami lempas ar atsargines dalis palaukite, kol prietaiso lempos ir metalinės dalys pakankamai atvės.

RED LIGHT TECHNOLOGY lempos

- Prietaisą naudokite tik su nurodytomis arba analogiškėmis lempomis. Niekada nenaudokite UV lempų!
- Sugedusias lempas iš karto pakeiskite.
- Praėjus nurodytam eksploatacijos laikotarpiui visada pakeiskite visą lempų komplektą.
- Kilus klausimų dėl lempų ar atsarginių lempų, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba (žr. 2 puslapį).
- Pasukite 90 laipsnių ir atsargiai ištraukite iš lizdų.



PASTABA

Įtrūkus degiklių / lempų stiklui gali prasiskverbti nedidelis kiekis gyvsidabrio! Laikykitės toliau pateiktų nuorodų:

- Nedelsdami atjunkite prietaisą nuo srovės tinklo.
- Vaikai turi nedelsdami išeiti iš patalpos.
- Patalpą vėdinkite mažiausiai 15 minučių.
- Mūvėkite vienkartinės pirštines.
- Atvėrę langą: šukes ir prasiskverbusį gyvsidabrij surinkite į uždromą rezervuarą.
- Nugabenkite rezervuarą į senų lempų surinkimo vietą.

4.8.1 Žemaslėgės lempos




PAVOJUS!




Pavojus nusideginti palietus karštas lempas ir paviršius!

Keičiant lempas kyla pavojus nusideginti pirštus ir rankas.

- Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus palaukite, kol prietaisas pakankamai atvės.

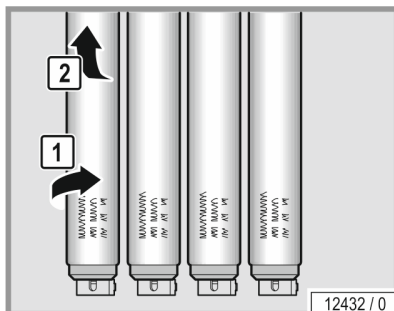

12432 / 0

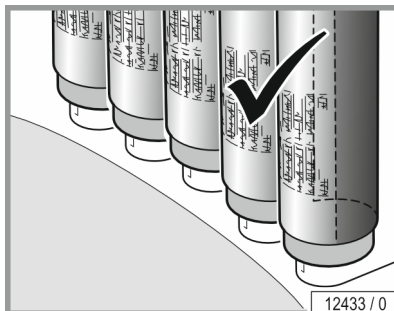

12433 / 0

- Sugedusias žemaslėgės lempas iš karto pakeiskite.
- Praėjus nurodytam eksploatacijos laikotarpiui visada pakeiskite visą lempų komplektą.
- Pasukite 90° ir atsargiai ištraukite iš lizdų.

- Žemaslėgėse lempose yra reflektorius, kuris šviesą tikslingai nukreipia į išorę.
- Lempas reikia įstatyti užpakaline reflektoriaus puse į prietaiso vidinę pusę.




PAVOJUS!



Gaisro pavojus netinkamai išlygiavus lempas!


Netinkamai išlygiavus lempas atsiranda blogas kontaktų sąlytis. Įranga gali perkaisti ir pradėti kibirkščiuoti.

- Patikrinkite, ar lizdas tinkamai išlygiuotas!

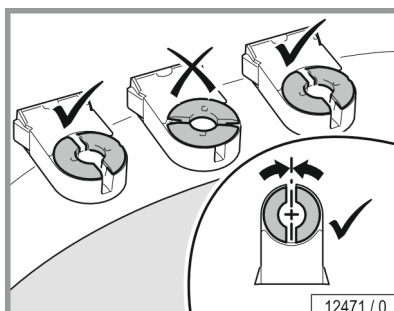


12471 / 0

- Prieš įstatant naujas lempas reikia patikrinti lizdo vidinės dalies išlygiavimą.

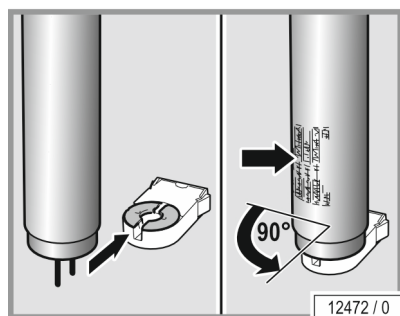

- Lempų kontaktinius kaiščius įstatykite į lizdą iš viršaus, stumdami vertikaliai.
- Siekiant užtikrinti tinkamą kontaktą, reikia pasukti lempą 90° aplink jos ašį.
- Užrašas turi būti nukreiptas į išorę (t. y. į soliariumo kabiną arba naudotoją).

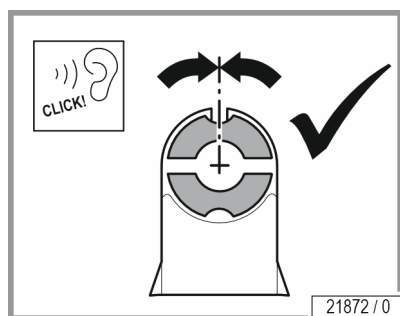

4.9 Lempų duryse valymas arba keitimas



DĖMESIO!



Užsiteršęs akrilo stiklas tampa netinkamas naudoti! Karštos lempos prikepina nešvarumus prie stiklų, ilgainiui stiklai tampa netinkami naudoti.

- Kruopščiai nuvalykite pirštų atspaudus, valymo priemonių likučius ir kitus nešvarumus.




PASTABA


gali būti pažeisti valdymo bloko ir ventiliacijos vamzdžių akrilo stiklo plokštės!

- Išimdami akrilo plokštės stiklą nepažeiskite valdymo bloko ir ventiliacijos vamzdžių.


Galinės durys

- Įsukite varžtą.

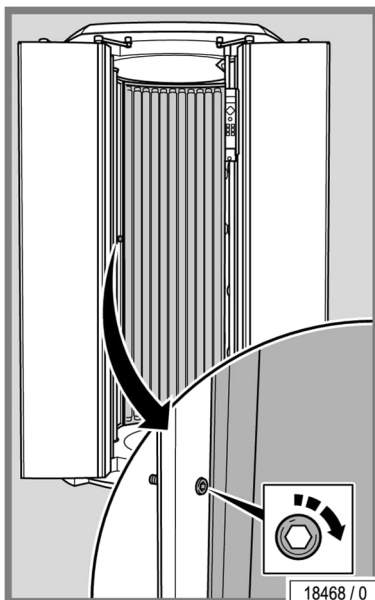


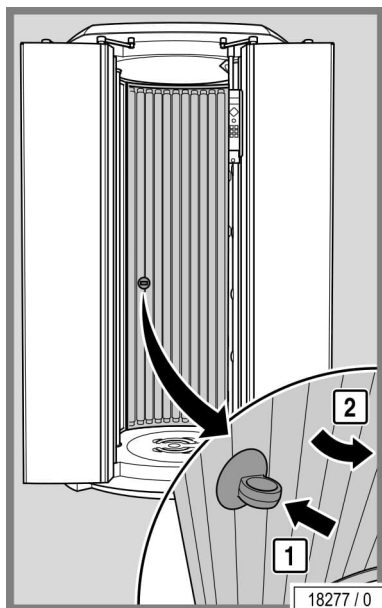


- Atidarykite galinę sienelę suėmę už siurbtuko.

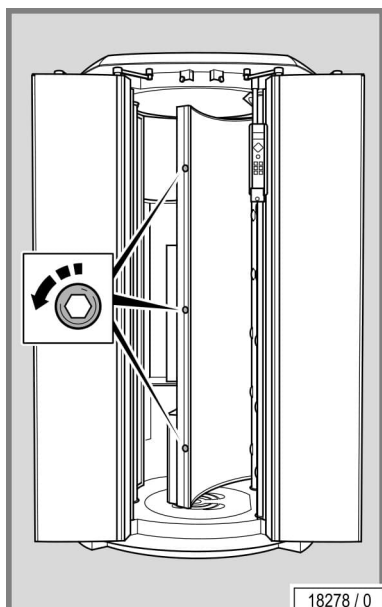


- Išsukite varžtus iš juostos.

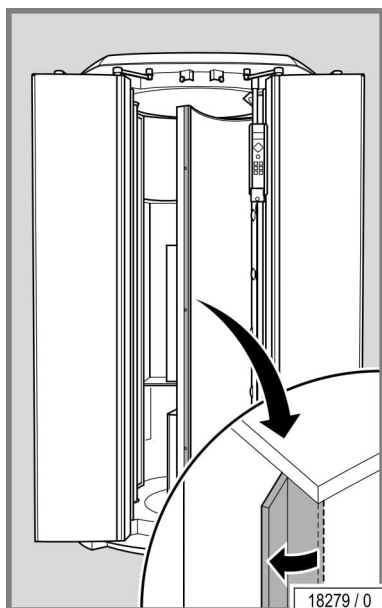


- Užlenkite juostą.

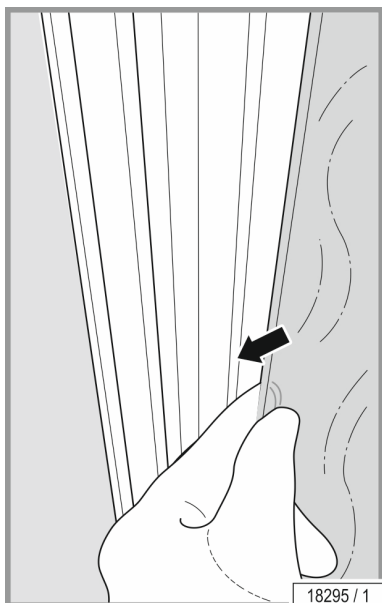


- Išimkite akrilo stiklo plokštę ir atsargiai ją padėkite.
- Pakeiskite lempą: žr. 48 psl.

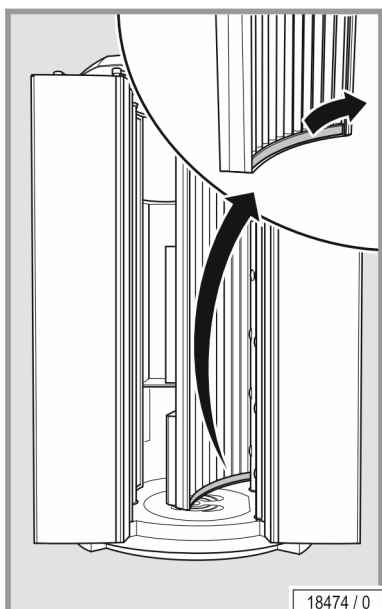

- Nuimkite lempos dangtį.

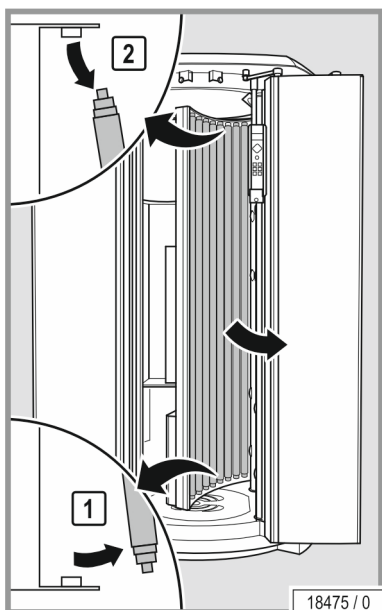


- Išimkite lempą ją traukdami.

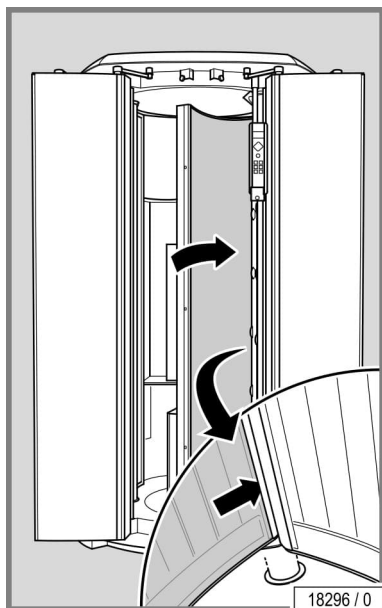


Sumontuojama atvirkštine eilės tvarka.

Montuodami atkreipkite dėmesį į šią nuorodą:

- atsargiai įstatykite stiklą į galinį kreiptuvą.
- Uždarykite sklendę ir priveržkite varžtais.

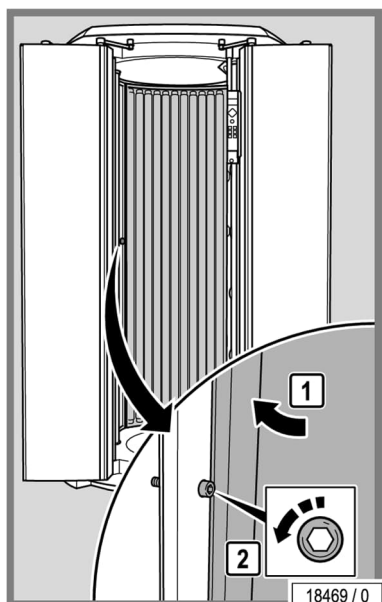


- Lengvai stumtelėdami uždarykite galinę sienelę.
- Norėdami užfiksuoti durys, atleiskite varžtą.

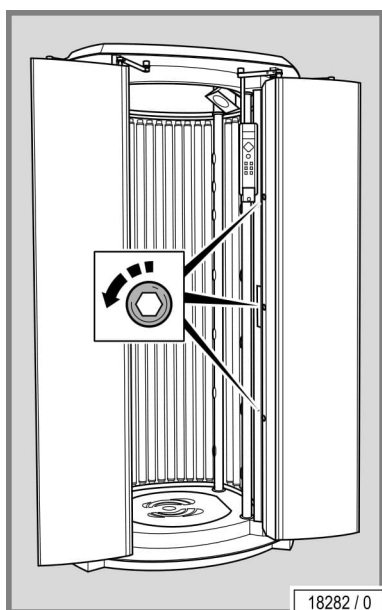


Priekinės durys


- Išsukite varžtus.

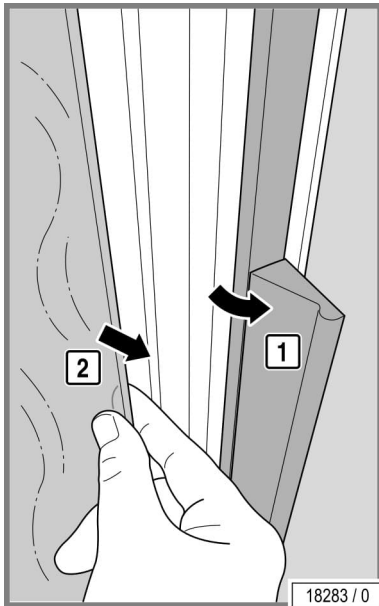


- Atlenkite juostą.
 - Išimkite akrilo stiklo plokštę ir atsargiai ją padėkite.
- Pakeiskite lempą: žr. 48 psl.

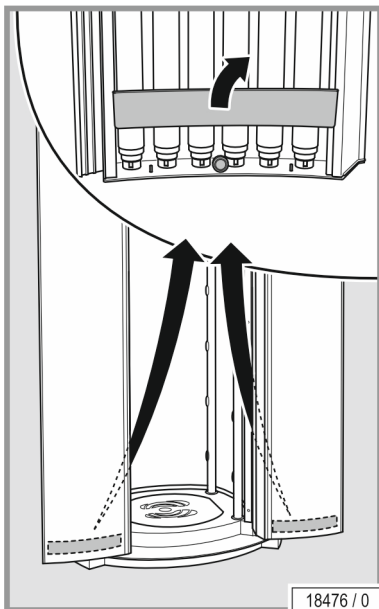

- Nuimkite lempos gaubtą.

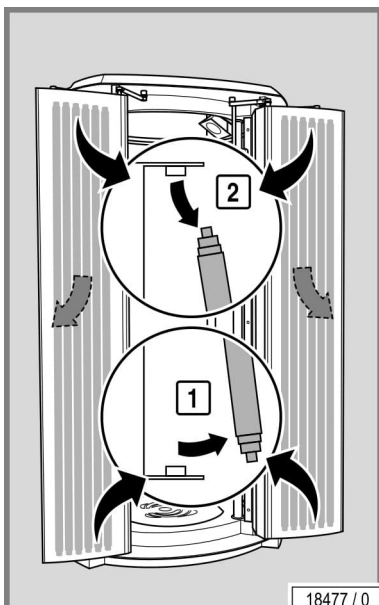

- Išimkite lempas jas traukdami žemyn.

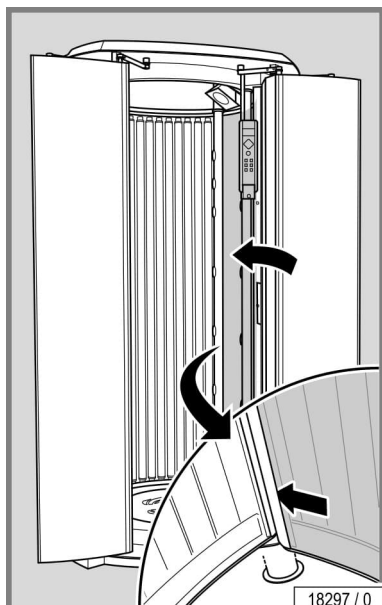

Sumontuojama atvirkštine eilės tvarka.
Montuodami atkreipkite dėmesį į pateiktą nuorodą:

- Atsargiai įstatykite stiklą į galinį kreiptuvą.

4.10 Lempų šoninėse sienelėse valymas arba keitimas

 DĖMESIO!



Užsiteršęs akrilo stiklas tampa netinkamas naudoti!
Karštos lempos prikepina nešvarumus prie stiklų, ilgai
stiklai tampa netinkami naudoti.


- Kruopščiai nuvalykite pirštų atspaudus, valymo
priemonių likučius ir kitus nešvarumus.



PASTABA

gali būti pažeisti valdymo bloko ir ventiliacijos vamz-
džių akrilo stiklo plokštės!


- Išimdami akrilo plokštės stiklą nepažeiskite val-
dymo bloko ir ventiliacijos vamzdžių.

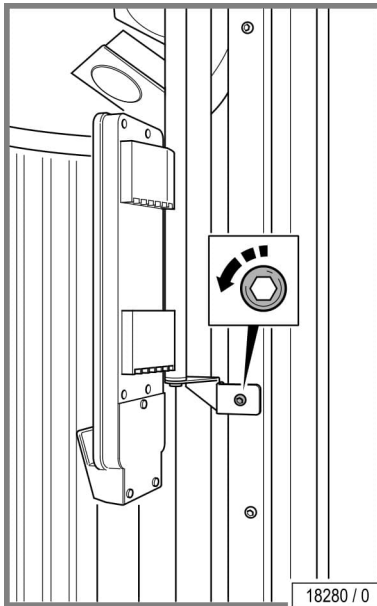

Dešinioji šoninė sienelė:


- Išsukite varžtą.

Jei reikia, galima nusukti valdymo bloką.

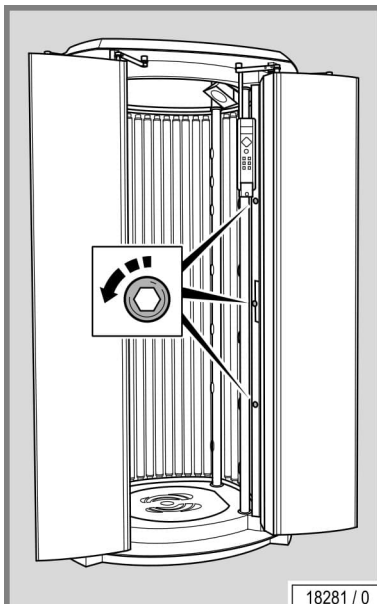


Šiuos darbo etapus reikia atlikti su abiem šoninėmis sienelėmis.

- Išsukite varžtus iš juostos.
- Atlenkite juostą.

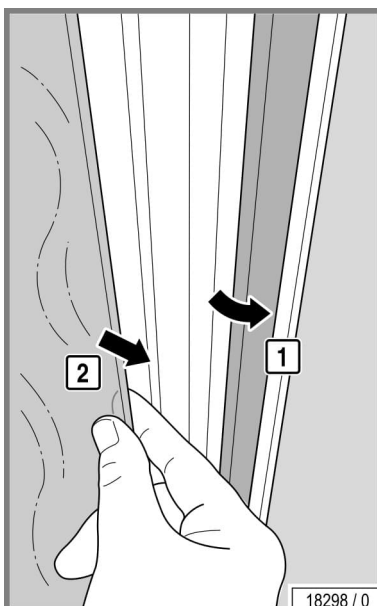


- Išimkite akrilo stiklo plokštę ir atsargiai ją padėkite.


Pakeiskite lempą: žr. 48psl.

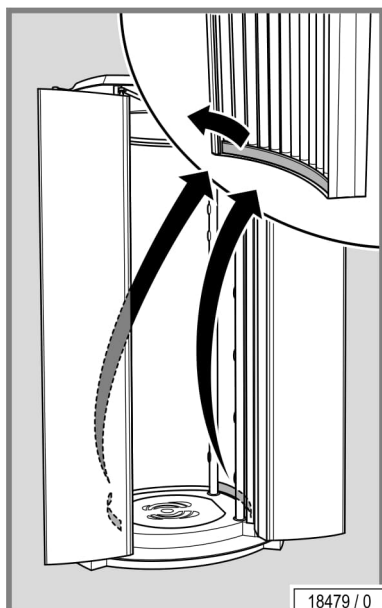

- Nuimkite lempos gaubtą.

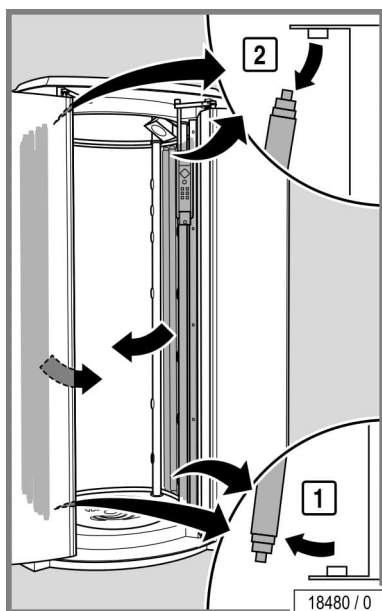

- Išimkite lempas jas traukdami žemyn.

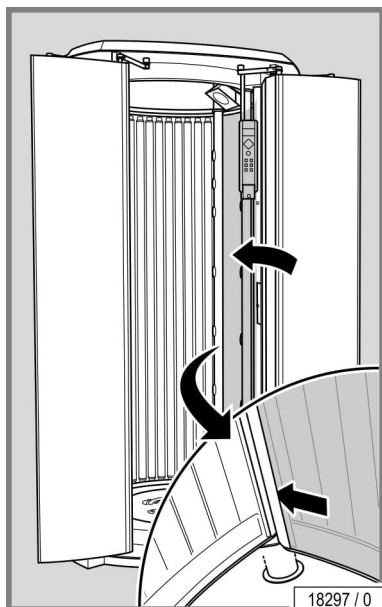

Sumontuojama atvirkštine eilės tvarka.
Montuodami atkreipkite dėmesį į pateiktą nuorodą:

- Atsargiai įstatykite stiklą į galinį kreiptuvą.

4.11 Filtro valymas


PAVOJUS!




Aštrios ventiliatoriaus sparnuotės!

Kyla pavojus įsipjauti palietus neuždengtus ventiliatorius.

- Šoninius ir durų dangčius gali atidaryti tik klientų aptarnavimo tarnyba.

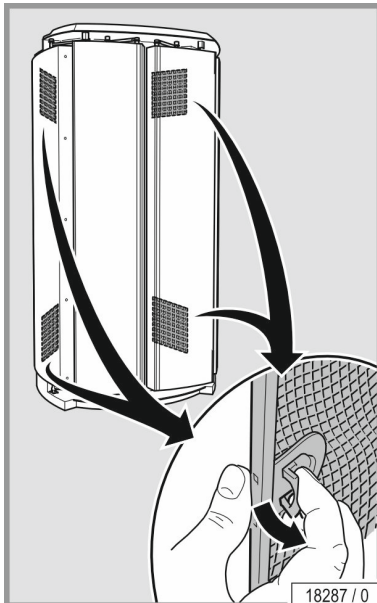

- Išimkite filtrą.

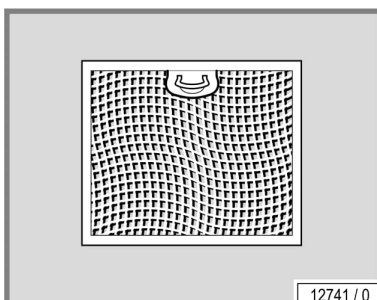

- Naudokite filtro sausojo arba drėgnojo valymo metodą.


Sausasis valymas: dulkių siurbiu (atsižvelgiant į užterštumo lygį)
Drėgnasis valymas: vandeniu ir valymo priemonėmis, taip pat indaplovėje

DĖMESIO!



Drėgmė gali pažeisti prietaisą!


Išvalyti filtrai prieš įstatymą turi būti sausi.

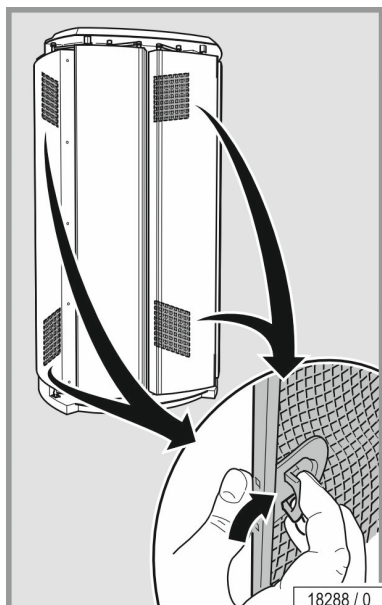


- Išvalytą ir išdžiovintą filtrą įstatykite atgal.

Sumontuokite atvirkštine eilės tvarka.

4.12 Filto įdėklų valymas

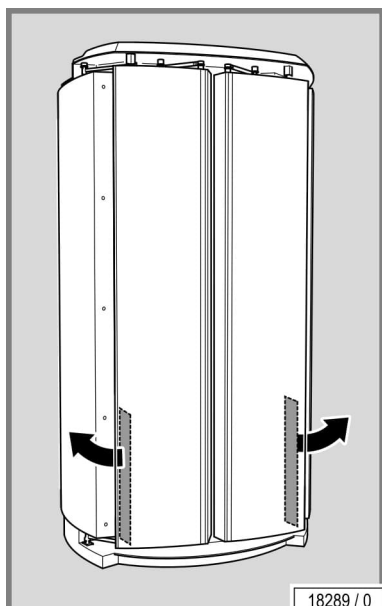

- Išimkite filtro įdėklus, įmontuotus durų antroje pusėje.

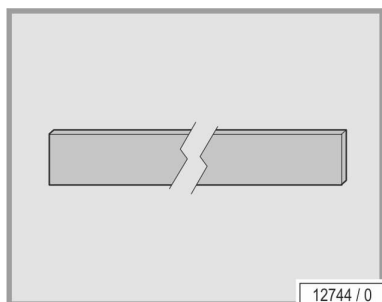

- Išvalykite filtro įdėklus naudodami sausojo arba drėgnojo valymo metodą, arba filtro įdėklus pakeiskite.

Sausasis valymas: dulkių siurbio (atsižvelgiant į užterštumo lygį)
Drėgnasis valymas: vandeniu ir plovimo priemonėmis


- Neplaukite indaplovėje!

 **DĖMESIO!**



Drėgmė gali pažeisti prietaisą!


Išvalyti filtrai prieš įstatymą turi būti sausi.

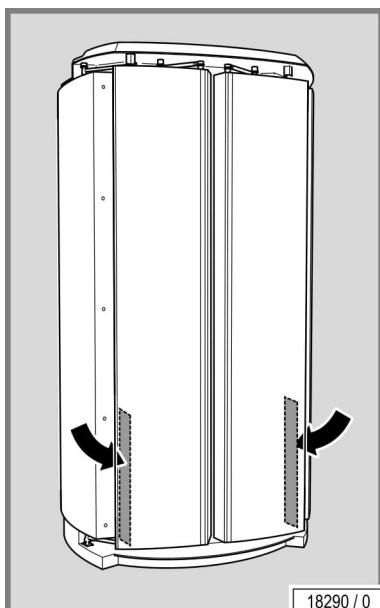


- Išvalytus ir išdžiovintus filtro įdėklus įstatykite atgal.




4.13 AROMA rezervuaro keitimas

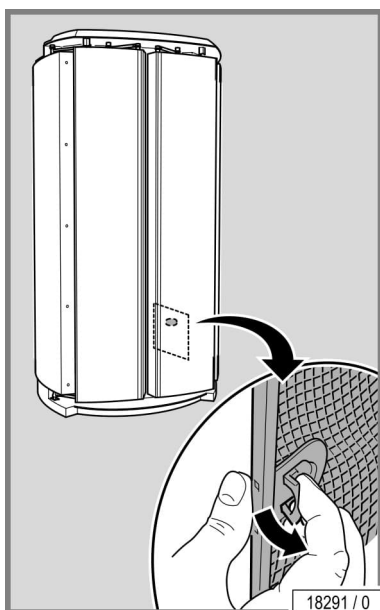

- Išimkite filtrą.

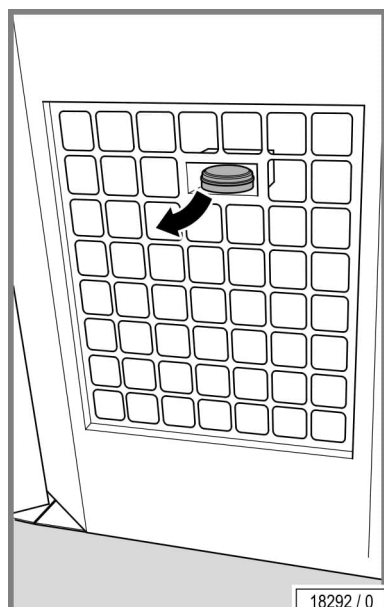

- Išimkite VITAL kvapų dėžutę.

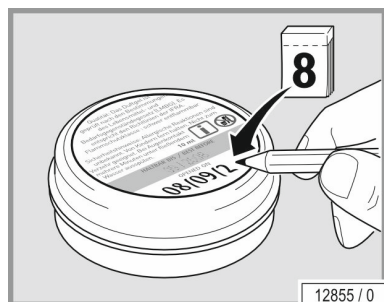

- Ant naujos kvapų dėžutės antros pusės užrašykite dabartinę datą.
- Nuimkite rezervuaro dangtelį.
- Įstatykite naują kvapų dėžutę.
- Vėl įstatykite filtrą.


5 Techniniai duomenys



5.1 Galia, elektros įrangos parametrai ir triukšmo lygis

RedWave Plus			
Nominalus naudojamas galingumas:	6000 W		
Nominalusis dažnis:	50 Hz		
Nominalioji įtampa:	400-415 V 3N~		230-240 V ~3
Nominalieji saugiklio parametrai:	3 x 16 A (inercinis)	arba	3 x 20 A (inercinis)
Jungiamasis laidas:	H05VV-F 5G 2,5 mm ²		H05VV-F 4G 4 mm ²
Triukšmo lygis 1 m atstumu nuo prietaiso:	71,6 dB(A)		
Triukšmo lygis prietaise:	<70 dB(A)		
Grindų plokštės apkrova:	max. 150 kg		
Masė:	415 kg		

5.2 Matmenys

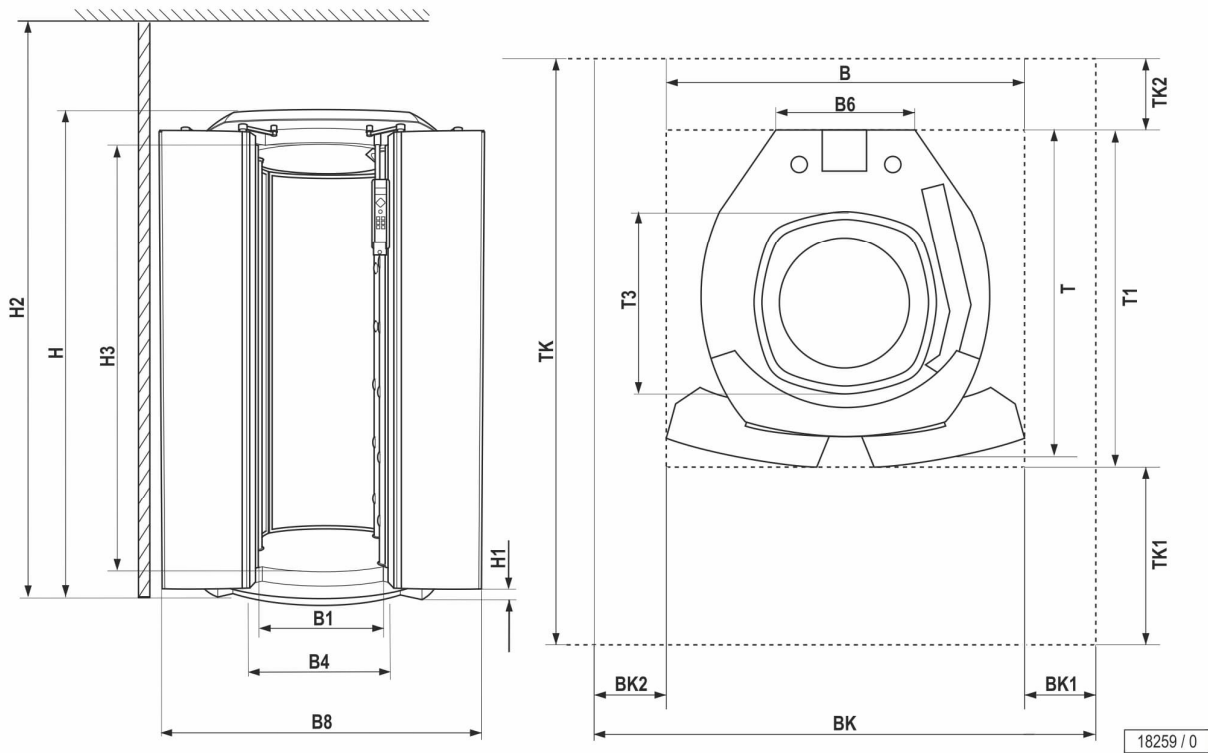

BK = 1935 mm

BK1 = 346 mm

BK2 = 346 mm

TK = 2400 mm

TK1 = 730 mm

TK2 = 300 mm

B = 1242 mm

B6 = 590 mm

B1 = 580 mm

B4 = 760 mm

B8 = 1440 mm

T = 1340 mm

T1 = 1370 mm

T3 = 770 mm

H = 2315 mm

H1 = 145 mm

H2 = 2400 mm

H3 = 2170 mm

5.3 Lempas



PAVOJUS!




Pavojus nusideginti palietus karštas lempas ir prietaiso dalis!

Jei „RedWave Plus“ prietaisas prieš išjungiant ir atidarant buvo eksploatuojamas, lempos ir korpuso dalys gali būti karšti.

- Prieš keisdami lempas ar atsargines dalis palaukite, kol prietaiso lempos ir metalinės dalys pakankamai atvės.

5.3.1 RedWave Plus

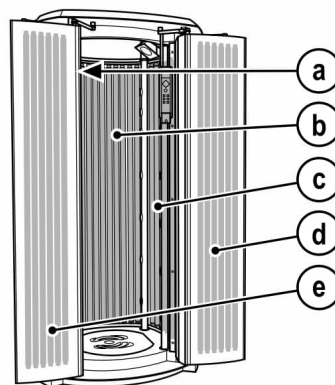


18260 / 0

Lempas

	Skaičius	Pavadinimas	Ilgis	Galia	Valdymas	Užsakymo Nr.
a)	8	Žemaslėgės lempos RED LIGHT TECHNOLOGY 180W C3	2,00 m	180 W	180 W	1516505-..
b)	8	Žemaslėgės lempos RED LIGHT TECHNOLOGY 180W C3	2,00 m	180 W	180 W	1516505-..
c)	8	Žemaslėgės lempos RED LIGHT TECHNOLOGY 180W C3	2,00 m	180 W	180 W	1516505-..
d)	4	Žemaslėgės lempos RED LIGHT TECHNOLOGY 180W C3	2,00 m	180 W	180 W	1516505-..
e)	4	Žemaslėgės lempos RED LIGHT TECHNOLOGY 180W C3	2,00 m	180 W	180 W	1516505-..

5.4 Atsarginės dalys ir priedai

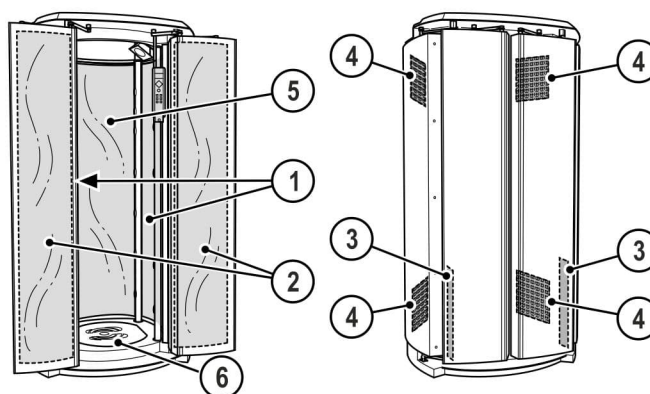

Skaičius		Pavadinimas	Užsakymo Nr.
1	2	Akrilo stiklo plokštės (Šoninės sienelės)	1510487-..
2	2	Akrilo stiklo plokštės (Priekinės durys)	1510485-..
5	1	Akrilo stiklo plokštė (vidinė pusė, durys)	1510486-..
	1	Apsauginiai akiniai	1027211-..
	1	AUX laidas	1001855-..
	1	Vidinis šešiakampis raktas	83828-..
3	2	Filtro įdėklai	1510494-..
4	4	Filtrai	51937-..
6	1	Kilimėlis (iš silikono)	1506532-..
5	1	Kvapų puodelis VITAL	1502665-..

6 Priedas



6.1 JK laiko reguliatoriai

RedWave Plus system serijos prietaisams galima naudoti šią laiko reguliavimo sistemą:

HK MICROTIMER 8250 Užsakymo Nr.: 500001653

7 Rodyklė



A

Akių pažeidimai	29
Akrilo stiklas (priežiūra)	42
Akrilo stiklo paviršiai (priežiūra)	42
Apibrėžtys	5
Aprašymas	25
Apribojimai	9
Apsauginiai akiniai	9, 29, 30
AROMA rezervuaro keitimas	61
Atliekų šalinimas	17
Atsakomybė	23
Atsarginės dalys	44
Atsarginės detalės	
Užsakymo numeriai	66
AUX (muzika)	18

C

Celiulitas	28
------------------	----

D

Direktyvos	17
Dugno plokštė	
Leistina apkrova	63

E

Eksploatacinis aukštis	14
Ekspluatavimo nutraukimas	16
Ekspluatootojo įsipareigojimai	12
Eksportas	18
Elektros įrangos montavimas	13
Elektros įrangos parametrai	63

F

Filtrai	
Valymo intervalai	43
Filtrai, valymas	59
Filtro įdėklai, valymas	60
Funkcijos	34

G

Galia	63
Garso failai	39

J

Jautrumas šviesai	29
-------------------------	----



K

Kištukinė jungtis	13
Klaidų kodai.....	41
Klientų aptarnavimo tarnyba.....	2
Kopijavimo apsauga	18
Kosmetika	9, 29, 30

L

Laikymas	16
Lempos.....	7, 65
Galios pakopos.....	65
Valdymas	65
Vardinė galia.....	65
Lempų keitimas	48
Lempų valymas arba keitimas	
Duryš	51
Šoninė sienelė.....	56
Ligos	29

M

Matmenys	64
Medikamentai	29
Montavimas	12
Muzika	39

N

Naudojimas pagal paskirtį	7
Naudojimo programos įjungimas	36
Naudojimo vieta.....	12, 14
Naudojimosi laikas	11
Naudojimosi prietaisu trukmė.....	15
Niežulys	11, 29
Numatomas netinkamas naudojimas	8
Nuostatos paleidžiant	36

O

Oro ištraukimo technika	13
Oro technika.....	13

**P**

Paaugliai	7, 29
Pakuotė	17
Paleidiklis	65
Parodomasis režimas	33
Paruošimas eksploatuoti	15
Pavojus susižaloti	10
Personalo kvalifikacija	12
Priedai	27, 66
Prietaiso aprašymas	25
Priežiūra	41

S

Šalutinis	11
Saugos nuorodos	
Prietaiso saugos nuorodos	8
Saugos nurodymai	
Bendrieji saugos nurodymai	12
Saugos priemonės atliekant techninės priežiūros darbus	40
Saugumas	13
Saulės nudegimai	29
Simboliai	6
Sutrikimai	41
Sužalojimų rizika	29

T

Techninė priežiūra	40, 44
Techninės priežiūros apžvalga	44
Techninės priežiūros intervalai	44
Techniniai duomenys	63
Tiekimo apimtis	12, 24
Transliavimo teisės	18, 39
Transportavimas	12
Triukšmo lygis	63
Trukmės valdymas	15
Trūkumo pašalinimas	23

U

Utilizavimas	17
Užsakymo numeriai	65, 66

V

Valdymo apžvalga	32
Valymas.....	40, 41
Filtrai	59
Filtro įdėklai	60
Valymo apžvalga.....	43
Valymo intervalai	43
Veido procedūros	9
Vibracijos programos	
Aprašymas	28
Vibroplokštė	10



Z

Žala	23
Žemaslėgių lempų pakeitimas.....	49

