

Lietošanas instrukcija

Originalas lietošanas instrukcijas tulkojums

Prestige Fusion Edge

1034775-00 / lv / 03.2026

Ergoline

Juridisks paziņojums



Ražotājs: JK-Products GmbH

Köhlershohner Straße 60
53578 Windhagen
GERMANY

Tālr.: +49 (0) 22 24 / 818-0

Klientu apkalpošanas dienests /
tehniskais serviss
(rezerves daļu pasūtīšana
detalām):

JK-International GmbH,
Division JK-Global Service
Köhlershohner Straße 60
53578 Windhagen
GERMANY

Tālr.: +49 (0) 22 24 / 818-861

E-pasts: service@jk-globalservice.de

Rezerves daļu pasūtīšana
ekspluatācijas materiāliem

JK-International GmbH,
Division JK-Licht
Köhlershohner Straße 60
53578 Windhagen
GERMANY

Tālr.: +49 (0) 22 24 / 818-600

E-pasts: info@jk-licht.de



BĪSTAMI!



Ja netiek ievērota šī lietošanas instrukcija:

- sekas var būt smagas traumas un nāve,
- iespējami bojājumi ierīcei un kaitējums videi.
- Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.
- Ievērojiet ierīces drošai lietošanai nepieciešamās instrukcijas un rīcības noteikumus.
- Nodrošiniet, lai lietošanas instrukcija un ražotāja sniegtā papildu informācija ir pieejama personāla darba vietā.
- Ja ierīci pārdodat vai nododat tālāk, ir svarīgi, lai jūs nodotu arī šo lietošanas instrukciju.

Autortiesības / Copyright

Autortiesības pieder uzņēmumam JK-Holding GmbH.

Saturu aizliegts pavairot, izplatīt vai bez atļaujas izmantot konkurences nolūkos vai nodot citiem pilnībā vai daļēji.

Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas ilustrācijās un informācijā šajā lietošanas instrukcijā!

Saturs



1	Drošības norādījumi un brīdinājumi	6
1.1	Vispārēja informācija	6
1.1.1	Jēdzienu skaidrojumi	6
1.1.2	Simbolu skaidrojumi	7
1.2	Atbilstoša ekspluatācija	8
1.3	Iepriekš paredzamas kļūdas	8
1.4	Informācija par drošību sauļošanās laikā	9
1.4.1	Izmantošanas aizliegumi	9
1.4.2	Svarīgi norādījumi	10
1.4.3	Ādas tipu apraksts	12
1.4.4	Sauļošanās laiki EN	13
1.5	Vispārīgi drošības norādījumi un brīdinājumi	14
1.5.1	Operatora pienākumi	14
1.5.2	Personāla kvalifikācija	14
1.5.3	Piegādes komplektācija	14
1.5.4	Transports, montāža un uzstādīšana	15
1.5.5	Ekspluatācijas uzsākšana	17
1.5.6	Lietošana un tehniskā apkope	18
1.5.7	Ekspluatācijas izbeigšana	18
1.5.8	Uzglabāšana	18
1.5.9	Utilizācija	19
1.5.10	Direktīvas	20
1.5.11	Eksports	20
1.5.12	Sava mūzika	20
1.5.13	Tehniskās izmaiņas	21
1.6	Plāksnītes un uzlīmes uz ierīces	22
1.7	Defekta izslēgšana	28
1.8	Atbildības izslēgšana	28
2	Apraksts	29
2.1	Piegādes komplektācija	29
2.1.1	Opcionāli	29
2.2	Aprīkojums	29
2.3	Ierīces apraksts	30
2.4	Piederumi (opcija)	32
2.5	Darbības apraksts	32



3	Vadība	33
3.1	Drošības noteikumi lietotājiem.....	33
3.2	Iedegums – bet pareizi!	33
3.3	Pārskats par lietošanu	35
3.3.1	PROFESSIONAL SETUP MANAGER PLUS	36
3.3.2	NFC Connect.....	37
3.4	Funkcijas.....	38
3.4.1	EXTERIOR DISPLAY	40
3.4.2	INTERIOR DISPLAY.....	42
3.5	Pielietojuma veida izvēle (SELECTABLE TANNING PROGRAMS)	48
3.6	Sākums	48
3.7	Savienošana ar Bluetooth® ierīcēm.....	49
3.8	Klausīties mūziku	52
3.9	Smartphone Wireless Charging.....	52
4	Tīrīšana un apkope	53
4.1	Tīrīšanas un apkopes drošības noteikumi.....	53
4.2	Traucējumi	54
4.3	Tīrīšana	54
4.3.1	Virsmu tīrīšana	55
4.3.2	Lampas	55
4.3.3	SPECTRA LED Boards	56
4.4	Tīrīšanas plāns	57
4.5	Apkope	58
4.5.1	Akrila stikla plāksne gulēšanai	59
4.6	REMOTE SERVICE (opcija).....	59
4.7	Apkopes plāns	60
4.8	Sagatavošana tehniskās apkopes un tīrīšanas darbu vajadzībām	63
4.8.1	Piederumu komplekts	63
4.8.2	Plāksnes gulēšanai uzstādīšana un starpplāksnes izņemšana.....	64
4.8.3	Augšējās daļas plāksnes noņemšana	65
4.8.4	Sānu daļas stikla noņemšana.....	66
4.8.5	Vannas atvēršana.....	66
4.9	Norādes lampu nomaiņai.....	68
4.9.1	NFC: Lampu nomaiņa	68
4.9.2	Zema spiediena lampas.....	69
4.10	Lampu tīrīšana vai nomaiņa apakšdaļā	71
4.11	Lampu tīrīšana vai nomaiņa sānu daļā	72
4.12	Lampu tīrīšana vai nomaiņa augšējā daļā	73
4.13	Apakšējās daļas filtra tīrīšana	74
4.14	Augšējās daļas filtra plāksnes tīrīšana	75
4.15	Klimata kontroles ierīce: Kondensāta tvertnes iztukšošana un filtra tīrīšana.....	76

4.16	AQUA / AROMA SYSTEM apkope.....	80
4.16.1	AROMA rezervuāra nomaiņa.....	80
4.16.2	AQUA SYSTEM rezervuāra nomaiņa	81
5	Tehniskie parametri.....	83
5.1	Jauda, pieslēguma vērtības un trokšņu līmenis	83
5.2	Izmēri.....	84
5.3	Lampu sastāvs.....	85
5.3.1	Prestige Fusion Edge.....	85
5.4	Rezerves daļas un piederumi.....	86
6	Pielikums.....	87
6.1	JK laika kontroles ierīces	87
6.2	Atbilstības koda darbības diapazons	87
6.2.1	Luminiscences lampu atbilstības koda apraksts	88
7	Rādītājs	89



1 Drošības norādījumi un brīdinājumi



Lai nodrošinātu drošu iekārtas ekspluatāciju, uzmanīgi izlasiet un ievērojiet šādus drošības norādījumus un brīdinājumus.

Šīs instrukcijas jā saglabā turpmākai lietošanai.

Šeit apkopotie drošības norādījumi, ja nepieciešams, tiek atkārtoti atsevišķajās nodaļās.

1.1 Vispārēja informācija

1.1.1 Jēdzienu skaidrojumi

Operators

Persona, kura saimnieciskās darbības ietvaros nodrošina lietotājiem sauļošanas ierīces. Operators ir atbildīgs par to, lai ierīce būtu labā tehniskā kārtībā, kā arī par tehniskās apkopes intervālu ievērošanu.

Lietotājs

Persona, kura ierīci izmanto saimnieciskās darbības telpās.

Personāls

Personas, kuras ir atbildīgas par ekspluatāciju, tīrīšanu un vispārējo tehnisko apkopi un kuras apmāca lietotāju saistībā ar ierīces izmantošanu.

Elektriķis

Atbilstoši kvalificēta, kompetenta un pieredzējusi persona ar spēkā esošo noteikumu zināšanām, kura spēj konstatēt ar elektrību saistītus apdraudējumus un tos novērst.

Autorizēts, apmācīts speciālistu personāls

Cita uzņēmuma speciālistu personāls, kurus ražotājs apmācījis un autorizējis īstenot noteiktu ierīču montāžu un tehnisko apkopi.

1.1.2 Simbolu skaidrojumi

Šajā lietošanas instrukcijā ir izmantoti šādas veida paziņojumi par piesardzības pasākumiem:



BĪSTAMI!



Apdraudējuma veids un cēlonis

Šis paziņojums par piesardzības pasākumiem brīdina par to, ka pastāv tiešs cilvēka dzīvības apdraudējums.

BĪSTAMI!



Apdraudējuma veids un cēlonis

Šis paziņojums par piesardzības pasākumiem brīdina, ka pastāv elektrības izraisīts cilvēka dzīvības apdraudējums.

UZMANĪBU!



Apdraudējuma veids un cēlonis

Šis paziņojums par piesardzības pasākumiem brīdina par ierīces vai materiālu bojājumiem vai kaitējumu videi.

UZMANĪBU!



Apdraudējuma veids un avots

Šis drošības norādījums brīdina par uzliesmojošām vielām.



NORĀDE:

Šis simbols nav paziņojums par piesardzības pasākumiem, bet gan norāda papildu informāciju labākai procesu izpratnei.



1.2 Atbilstoša ekspluatācija

Šī ierīce kalpo kosmētiskajai sauļošanai. Tā ir paredzēta vienai pieaugušajai personai ar sauļošanai atbilstošu ādu. Papildus informāciju par to varat izlasīt 12. un 33. lpp.

Ierīce paredzēta tikai komerciālai izmantošanai, nevis privātai mājsaimniecībai.

Atsevišķām personām ir aizliegts izmantot ierīci, skat. 9. lpp.

Personām ar fiziskiem, sensoriem vai garīgiem traucējumiem, bez pieredzes un/vai bez atbilstošas kompetences ir aizliegts izmantot ierīci patstāvīgi. Par drošību atbildīgajai personai ir jānodrošina atbilstoša un droša ierīces ekspluatācija, veicot uzraudzību vai apmācību. Ja pastāv jebkādas šaubas, konkrētajai personai ir aizliegts izmantot ierīci!

Ierīci drīkst darbināt tikai ar norādītajām vai līdzvērtīgām lampām. Lietošanas instrukcijā norādītie sauļošanās laiki ir atbilstoši tikai norādītajam lampu aprīkojumam.

Jebkāda cita veida izmantošana tiek uzskatīta par neatbilstošu ekspluatācijas noteikumiem. Ražotājs nav atbildīgs par šāda veida izmantošanas rezultātā izrietošajiem bojājumiem. Risku šajā gadījumā uzņemas tikai operators.

Pie atbilstošas ekspluatēšanas pieder arī ražotāja noteikto norāžu, lietošanas instrukcijas un tehniskās apkopes noteikumu ievērošana. Ierīci drīkst apkalpot, veikt tehnisko apkopi un atjaunot tehniskā darba kārtībā tikai speciālisti, kuri ir atbilstoši apmācīti un kuri pārzina ierīci.

1.3 Iepriekš paredzamas kļūdas

Ir kategoriski aizliegts izmantot ierīci šādi:

- Ierīci aizliegts izmantot vairākām personām vienlaikus. Pretējā gadījumā var saplīst plāksne, uz kuras guļ, un radīt savainojumus.
- Ierīci aizliegts izmantot personām, kuru svars pārsniedz 135 kg. Pretējā gadījumā var saplīst plāksne, uz kuras guļ, un radīt savainojumus.
- Norādītās sauļošanās laika pārsniegšanas rezultātā var rasties apdegumi un ilgtermiņa ādas bojājumi.
- Ierīces lietošanas laikā kabīnē aizliegts uzturēties citām personām, īpaši bērniem.
- Ierīces lietošanas laikā kabīnē aizliegts uzturēties mājdzīvniekiem.

1.4 Informācija par drošību sauļošanās laikā



1.4.1 Izmantošanas aizliegumi

 **BĪSTAMI!**



UV starojums

Paaugstināts ādas un acu savainošanas vai ādas slimību risks!

- Ievērojiet turpmāk minētās norādes.

Ierīci aizliegts izmantot šādām personām:

- personām, kuras jaunākas par 18 gadiem;
 - personām, kuras neiedeg;
 - personām, kuras saulē neiedeg, turklāt sauļojoties vienmēr gūst apdegumus;
 - personām, kuras saulē viegli gūst apdegumus;
 - personām ar akūtu saules apdegumu;
 - personām, kuras bērnībā vairākkārt guvušas nopietnu saules apdegumu;
 - personām, kurām ir dabīgi rudi mati;
 - personām, kurām atsevišķās vietās uz ādas ir nav atbilstošas pigmentācijas;
 - personām, kurām ir vai ir bijis ādas vēzis;
 - personām, kurām ir paaugstināts risks saslimt ar ādas vēzi (piemēram, ādas vēža gadījumi ģimenē);
 - personām, kuru ģimenē ir bijuši melanomas ādas vēža gadījumi;
 - personām, kuras fotosensibilitātes dēļ atrodas ārstēšanā;
 - personām, kuras lieto medikamentus fotosensibilitātes dēļ;
 - personām ar vasaras raibumiem un personām, kurām mēdz rasties vasaras raibumi;
 - personām ar vairāk kā 16 dzimumzīmēm uz ķermeņa (kuru diametrs ir 2 mm vai lielāks);
 - personām, ar netipiskām dzimumzīmēm (netipiskas dzimumzīmes, piemēram, ir asimetriskas dzimumzīmes, kuru diametrs pārsniedz 5 mm, ar dažādu pigmentāciju un nevienmērīgām malām).
- Šaubu gadījumos noteikti konsultējieties ar ārstu!



Šādi cilvēki ierīci drīkst lietot tikai pēc konsultācijas ar ārstu:

- cilvēki ar hroniskām slimībām, īpaši ādas slimībām;
- cilvēki ar imūnsistēmas / autoimūnām slimībām;
- cilvēki ar kolagēnām slimībām (piem., Lupus erythematodes, skleroderma);
- cilvēki ar rozāciju (sarkanajām pinnēm);
- cilvēki ar venozu mazspēju, teleangiektāzijām (piem., kuperoze, M. Osler, ādas zvaigznītes (spider-nāvi));
- cilvēki ar zemu asinsspiedienu, sirds-asinsvadu slimībām;
- cilvēki ar veneriskajām slimībām;
- cilvēki, kuri slimo ar vēzi;
- cilvēki ar neseno iegūtām operācijas brūcēm vai pēc ķirurģiskās iejaukšanās;
- cilvēki ar tetovējumiem vai pīrsingiem, kas vēl pilnībā nav sadzijuši;
- sievietes stāvoklī.

Ja tomēr pastāv medicīniskas šaubas par ierīces panesamību, vispirms veiciet maksimāli 5 minūtes garu izmēģinājuma procedūru un novērojiet reakciju. Ja pēc 48 stundām netiek novērota nevēlama reakcija, iespējams sākt parastu procedūru.

1.4.2 Svarīgi norādījumi

Pārējām personām ir jāievēro šādi noteikumi:

Paaugstināts ādas un acu savainošanas vai ādas slimību risks!

- Pēc pārlietu intensīvas apstarošanas uz ādas var parādīties apdegumi. Pārāk biežs UV starojums saules ietekmē vai UV ierīču ietekmē var izraisīt priekšlaicīgu ādas novecošanu un arī ādas audzēju risku.
- Gadījumā, ja persona ir īpaši jutīga pret UV gaismu un ja tiek izmantota noteikta kosmētika vai lietoti medikamenti, ir jābūt īpaši piesardzīgiem. Šaubu gadījumos noteikti konsultējieties ar ārstu!
- Ja 48 stundu laikā pēc pirmā sauļošanās seansa parādās neparedzēti simptomi, piemēram, nieze, jāmeklē medicīniska palīdzība.
- Pagarinot sauļošanās laiku tiek pagarināts ekspozīcijas laiks (apstarošanas laiks), respektīvi, sasniedzot noteiktu iedeguma pakāpi nav iespējams vairs to pastiprināt. Tomēr apstarošanas laiku ir aizliegts pagarināt pēc saviem ieskatiem atļauto apstarošanas laiku ietvaros! Neapdraudot veselību ir iespējams sasniegt tikai noteiktu, ādas tipam atbilstošu iedeguma pakāpi.
- Nekādā gadījumā nedrīkst lietot sauļošanās ierīci, ja tās korpuss ir salauzts vai bojāts vai ja ir bojāts taimeris!

Rīcība pirms un pēc saulpošanas:

- Saulpošanas laikā kabīnē aizliegts uzturēties citām personām, īpaši bērniem.
- Pirms saulpošanas noņemiet visas rotaslietas (arī pīrsingu).
- Savlaicīgi pirms saulpošanas noņemiet kosmētiku un neizmantojiet pretapdeguma līdzekļus.
- Neizmantojiet līdzekļus, kas paātrina iedegšanu.
- UV gaisma var izraisīt neatgriezenisku kaitējumu ādai un acīm. Neaizsargāto acu virsma var kairināties un noteiktos gadījumos pārmērīga apstarošanas rezultātā var tikt bojāta tīklene. Pēc vairākkārt atkārtotas apstarošanas var veidoties katarakta. Izmantojiet pievienotās UV necaurlaidīgās aizsargbrilles (pasūtījuma Nr. 1027211-..). Kontaktlēcas un saulesbrilles nevar aizvietot aizsargbrilles.
- Aizsargājiet pret apstarošanu jutīgas ādas vietas, piemēram, brūces, tetovējumus un dzimumorgānus.
- Ievērojiet ieteikto saulpošanas laiku.
- Vienas saulpošanas laikā nedrīkst pārsniegt noteikto apstarošanas daudzumu, kas izraisa ādas apsārtumu (MED, minimālā eritēmas deva). Gadījumā, ja no 16 līdz 24 stundas pēc saulpošanas parādās ādas apsārtums, uz vienu nedēļu ir jāpārtrauc izmantot saulpošanas ierīci. Pēc nedēļas atkal ir jāatsāk ar pirmo saulpošanas reizi atbilstoši saulpošanas tabulas norādēm.
- Intervālam starp abām pirmajām saulpošanas reizēm ir jābūt vismaz 48 stundas! Nesaulpoieties vienas dienas laikā atkārtoti!
- Apmeklējiet ārstu, ja parādās ievērojams uztūkums, jēlas vietas vai pigmentētas dzimumzīmes.





1.4.3 Ādas tipu apraksts

BĪSTAMI!



Iespējami ādas apdegumi un ilgtermiņa kaitējumi!
Saulošanās ierīci nedrīkst izmantot personas ar I ādas tipu.

Attiecībā uz personām ar II, III un IV ādas tipu spēkā ir šādi noteikumi:

- Noteikti jāievēro saulošanās laiks.
- Noteikti jāievēro paziņojumi par piesardzības pasākumiem.



NORĀDE:

Noteiktie saulošanās laiki ir spēkā tikai attiecībā uz lampu aprīkojuma uzlīmē norādīto lampu aprīkojumu. Starp saulošanās reizēm ir jābūt vismaz 48 stundu pārtraukumam.

Nedrīkst pārsniegt maksimālo devu 25 kJ/m² gadā.

Maksimālā deva ir vērtēta atbilstoši NMSC.¹

I ādas tips	II ādas tips	III ādas tips	IV ādas tips
Jutīga āda	Bāla āda	Normāla āda	Tumša āda
Saules apdegums ir vienmēr vai bieži	Saules apdegums ir bieži	Saules apdegums ir reti	Saules apdegums praktiski neveidojas
Dabisko saules gaismu iztur tikai nelielos apmēros.	Iztur aptuveni 10-20 minūtes dabīgajā saules gaismā.	Iztur aptuveni 20-30 minūtes dabīgajā saules gaismā.	Iztur aptuveni 40 minūtes dabīgajā saules gaismā.

¹ NMSC – (nemelanomas ādas vēža riska faktori)

1.4.4 Sauļošanās laiki EN



NORĀDE:

Ierīci nedrīkst izmantot personas ar I ādas tipu.

- Noteikti ievērojiet sauļošanās laikus.



Obligāti ievērojiet valsts prasības!

Nedrīkst pārsniegt maksimālās sauļošanās reizes 3 kJ/m² gadā.

Maksimālais sauļošanās laiks nedrīkst būt ilgāks nekā 33 minūtes.

Starp sauļošanās reizēm jābūt vismaz 48 stundu pārtraukumam.

Maksimālais sauļošanās laiks gadā nedrīkst būt ilgāks nekā 833 minūtes.

Prestige Fusion Edge:

- UV zema spiediena spuldzes ERGOLINE TREND
ADVANCED 80-200 EP104 160W R 1511231-..
- Zema spiediena spuldzes
SMART SUN R 28 80-200 160W 1518419-..

Sauļošanās reizu skaits	I ādas tips [min.]	II ādas tips [min.]	III ādas tips [min.]	IV ādas tips [min.]
1	–	5	5	5
2	–	11	11	11
3	–	13	13	13
4	–	13	13	13
5	–	16	16	16
6	–	16	16	16
7	–	20	20	20
8	–	22	22	22
9	–	25	25	25
10	–	25	25	25



NORĀDE:

Atbilstoši standartam EN 60335-2-27:2013 sauļošanās plāns nav atkarīgs no ādas tipa.

Vienāds sauļošanās laiks attiecas uz visiem ādas tipiem, izņemot I tipa ādu.



1.5 Vispārīgi drošības norādījumi un brīdinājumi

1.5.1 Operatora pienākumi

Operators ir atbildīgs par skaidru lietošanas, tīrīšanas un tehniskās apkopes instrukciju un noteikumiem atbilstošas ierīces ekspluatācijas un apkalpošanas nodrošināšanu, tajā skaitā veicot personāla apmācību un instruktāžu.

Operatora noteiktajiem lietošanas noteikumiem ir jānodrošina drošu ierīces ekspluatāciju un apkalpošanu, ņemot vērā attiecīgā uzņēmuma īpašības un atzinumus, kā arī valsts darba drošības un vides aizsardzības noteikumus. ES ietvaros spēkā ir Direktīva 89/391/EEK.

1.5.2 Personāla kvalifikācija

Operators ir atbildīgs par personāla apmācīšanu un informēšanu par spēkā esošajām tiesību normām un noteikumiem par nelaiemes gadījumu novēršanu. Ir jānodrošina, lai personāls izprot šo lietošanas instrukciju un to ievēro. Īpaši tas attiecas uz

- norādēm sadaļā "Atbilstoša ekspluatācija" un "Iepriekš paredzamas kļūdas",
 - paziņojumiem par piesardzības pasākumiem nodaļā "Lietošana",
 - lietošanas noteikumiem,
 - tīrīšanas un tehniskās apkopes noteikumiem.
- Nodrošiniet, lai lietošanas instrukcija un ražotāja sniegtā papildu informācija ir pieejama personāla darba vietā.
 - Regulāri pārbaudiet, vai personāls ievēro lietošanas noteikumus un īsteno drošu darbu, bez apdraudējumiem.
 - Nodrošiniet, lai ievēro tīrīšanas intervālus, it īpaši saistībā ar tīrīšanu pēc katras sauļošanās reizes.
 - Nodrošiniet, lai personāls atbilstoši konsultē klientus, īpaši par sauļošanās laikiem, iespējamajiem riskiem un ierīces apkalpošanu.

1.5.3 Piegādes komplektācija

Informāciju par piegādes komplektu varat izlasīt nodaļā "Apraksts" 29. lpp.

1.5.4 Transports, montāža un uzstādīšana

Ierīci piegādā kvalificēts uzņēmums un to uzstāda un montē ražotāja klientu serviss vai ražotāja autorizēts klientu serviss.

Operators ir atbildīgs par pasūtītāja noteikto ventilācijas un elektrības prasību ievērošanu ierīces uzstādīšanas vietā, skat. 15. lpp.



Montāža

BĪSTAMI!



Risks gūt elektriskās strāvas triecienu un apdegumus!

- Montāžai un elektrības pieslēgumam ir jāatbilst valsts tiesību normām.
- Elektroinstalāciju īsteno pasūtītājs atbilstoši III pārsprieguma kategorijai, izmantojot pieejamo visu polu atdalītāju (izolācija; galvenais slēdzis). Tas nozīmē, ka atbilstoši III pārsprieguma kategorijai katram kontakta atveres polam jābūt pilnīgi atdalītam (izolētam).
- Ja pieslēgumu īsteno ar spraudkontaktsavienojumu, ir jāizmanto standartam EN 60309 atbilstoša spraudkontaktsistēma.
- Ierīces montāžu, uzstādīšanu, papildināšanu vai atjaunošanu tehniskā darba kārtībā drīkst veikt tikai pilnvarots un specializēts personāls.

Informācija par ierīces demontēšanu un montāžu ir izlasāma atsevišķā montāžas instrukcijā. Montāžas instrukcija paredzēta tikai ražotāja klientu servisam vai kvalificētam un ražotāja autorizētam specializētam personālam.

Ventilācijas sistēma

UZMANĪBU!



Gaisa padeves traucējumu rezultātā iespējama pārkaršana!

Iespējami darbības traucējumi.

- Nemainiet, nepārbūvējiet un nepapildiniet ierīces gaisa padeves un novades nodalījumu, neveiciet ierīcei izmaiņas pēc pašu iniciatīvas. Izmaiņu gadījumā ražotājs nav atbildīgs par to rezultātā radītajiem bojājumiem.
- Ievērojiet tehniskos ventilācijas datus.
- Neuzstādiet un nedarbiniet ierīci uz transportēšanas paletes!

Datus par pieplūdes un izplūdes gaisa projektēšanu iespējams iegūt Klientu apkalpošanas dienestā (skatiet 2. lappusi).



Uzstādīšanas vieta

UZMANĪBU!



Sāli saturošs gaiss! Kaitīgas vielas saturošs gaiss! Ierīces un elektrisko detaļu korozijas dēļ var veidoties ierīces bojājumi.

- Neuzstādiet ierīci blakus peldbaseinam.
- Nekad neizmantojiet ierīci vietās ar īpaši agresīviem vides apstākļiem (piemēram, vietās ar hloru saturošu gaisu).

Iespējami ierīces bojājumi!

Ja transportēšanas un uzstādīšanas vietas temperatūru starpība ir liela, nesāciet ierīces ekspluatāciju uzreiz pēc tās uzstādīšanas.

- Nogaidiet vismaz 2 stundas pirms ierīces pieslēgšanas barošanai.

Gaisa padeves traucējumu rezultātā iespējama pārkaršana!

Iespējami darbības traucējumi.

- Nemainiet, nepārbūvējiet un nepapildiniet ierīces gaisa padeves un novades nodalījumu, neveiciet ierīcei izmaiņas pēc pašu iniciatīvas. Izmaiņu gadījumā ražotājs nav atbildīgs par to rezultātā radītajiem bojājumiem.
- Ievērojiet tehniskos ventilācijas datus.
- Neuzstādiet un nedarbiniet ierīci uz transportēšanas paletes!



Vides apstākļi

Iespējami ierīces bojājumi!

Ierīci nedrīkst darbināt brīvā dabā.

Sargājiet ierīci no atklātas liesmas vai aizdegšanās avotiem.

- Optimālā vides temperatūra: no +15 °C un +32 °C
- Uzglabāšanas temperatūra: no -15 °C līdz +60 °C

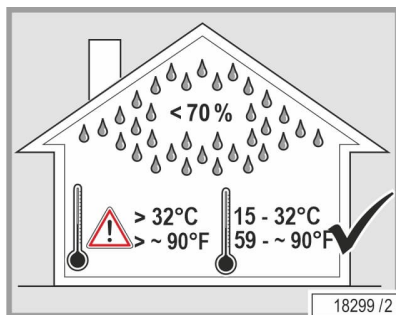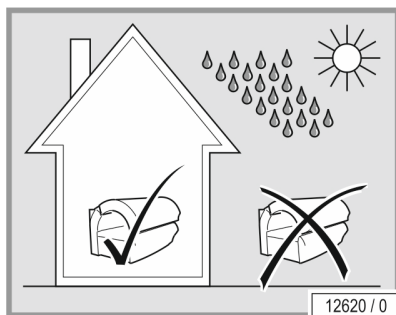

Vietās, kuru augstums pārsniedz 2000 m virs jūras līmeņa, nevainojamai ekspluatācijai nepieciešama pārbūvēšana.

Ierīce nav piemērota ekspluatācijā mobilās iekārtās (kuģos, autobusos, vilcienos). Lai nodrošinātu ekspluatāciju bez traucējumiem mobilās iekārtās, nepieciešama pārbūvēšana.

Pirms ekspluatācijā sākšanas noteikti sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu – skat. 2. lpp.

1.5.5 Eksploatācijas uzsākšana

 **BĪSTAMI!**



Bojāts elektrības vads!

Personām risks gūt elektriskās strāvas triecienu un apdegumus.

- Elektrības vadu drīkst nomainīt tikai ražotājs vai specializēts uzņēmums.



Pirmo eksploatācijas uzsākšanu veic ražotāja klientu serviss vai tā autorizēts klientu serviss. Ierīci nodod darba kārtībā.

Gadījumā, ja ierīce nav ilgāku laiku lietota, pirms atjaunotas eksploatācijas uzsākšanas to ir jāpārbauda mūsu klientu servisam vai autorizētam, specializētam uzņēmumam.

Ierīce ar darbināma ar ārēju laika kontroles sistēmu.

Laika kontroles sistēmai jābūt uzmontētai tā, lai vadības sistēmas darbības pārtraukuma gadījumā pēc <110% no izvēlēta darbības laika ierīce automātiski izslēgtos. Ierīces darbības laikam jābūt nodrošinātam ar laika kontrolierīci atbilstoši standartam EN 60335-2-27.

Atkarībā no vietējā energoapgādes uzņēmuma pieslēguma ierīces var pārnest traucējumus uz ēkas elektrotīklu, kas savukārt ietekmēs energoapgādes uzņēmuma uzstādīto centralizēto vadības sistēmu (TRA). Tādējādi var, piemēram, traucēt nakts režīma apkures sistēmas.

Ja ierīču darbība rada traucējumus, operators ir atbildīgs par skaņas frekvences bloķētāja uzstādīšanu mājas elektriskajā instalācijā. Lūdzu, sazinieties ar savu elektrotehnikas speciālistu. Elektroinstalācijas uzņēmums ir informēts par vietējā enerģijas piegādātāja tehniskajiem pieslēguma nosacījumiem, tādējādi skaņas frekvences bloķētājs var tikt pielāgots jūsu enerģijas piegādātāja elektrotīklam.

Ir iespējama pagaidu vai pastāvīga darbība autonomā vai nesinhronizētā energosistēmā (piemēram, autonomos tīklos, rezerves sistēmās). Pirms eksploatācijā sākšanas noteikti sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu – skat. 2. lpp.



1.5.6 Lietošana un tehniskā apkope

Nosacījums tam, lai darba laikā lietotājiem nerastos savainojumi un netiktu apdraudēta veselība un drošība un varētu nodrošināt pilnīgu ierīces funkcionēšanu bez darbības traucējumiem, ir nekļūdīga lietošana, tehniskā apkope un uzturēšana tehniskā darba kārtībā.

Ievērojiet šajā lietošanas instrukcijā sniegtās norādes un ieteikumus. Nodrošiniet, lai tiktu ievēroti laika intervāli starp kontrolēm, tehniskajām apkopēm un uzturēšanu tehniskā darba kārtībā. Nodrošiniet, lai lampas nomaina pēc noteiktā kalpošanas laika beigām.

Ierīces vai vadības sistēmas pārbūvēšana vai izmaiņu veikšana nav atļauta. Noteikumu neievērošanas gadījumā licence vairs nav spēkā!

Lai novērstu apdraudējumus, neizmantojiet ierīci, ja strāvas pieslēguma vads ir bojāts. Bojāta strāvas pieslēguma vada nomaiņu jāveic ražotājam, ražotāja klientu apkalpošanas dienestam vai apmācītiem speciālistiem.




NORĀDE:

Ja ir aizdomas par ugunsgrēku, nekavējoties atvienojiet barošanu, ja tas ir droši.

Lūdzu, turpiniet ievērot likumā noteiktos, oficiālos un tirdzniecības asociāciju noteikumus, kurus iepriekš minētie paziņojumi neietekmē.

1.5.7 Eksploatācijas izbeigšana

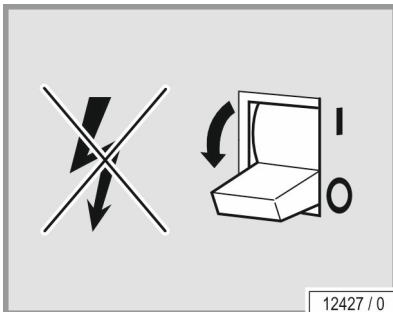

Lai uz laiku pārtrauktu vai pilnībā izbeigtu ierīces eksploatāciju, ierīci ir nepieciešams atslēgt no elektrības.

Galīgās eksploatācijas izbeigšanas gadījumā ir jāievēro spēkā esošie tiesību akti utilizācijas jomā.

1.5.8 Uzglabāšana

Ierīces ir jāuzglabā sausā vietā, kur nav temperatūras svārstības. Lai pasargātu no skrāpējumiem, ierīci var iepakot plēvē.

- Uzglabāšanas temperatūra: no -15 °C līdz +60 °C

! UZMANĪBU!



Uzliesmojošs dzesēšanas šķidrums gaisa kondicionēšanas iekārtā!

Dzesēšanas šķidruma noplūde var izraisīt ugunsgrēku vai sprādzienu.

- Izvairieties no uzliesmošanas avotiem! Uguns, atklāta liesma un smēķēšana ir aizliegta.
- Uzglabāt tikai telpās, kurās nav pastāvīgu aizdegšanās avotu, piemēram, atklātas liesmas, darbojošos gāzes iekārtu vai elektrisko sildītāju.

1.5.9 Utilizācija

Vides aizsardzības noteikumi – lampu un akumulatoru utilizācija



Lampas satur gaismekļus un citus dzīvsudrabu saturošus atkritumus. Akumulatori satur smago metālu savienojumus.

Eiropas Savienības ietvaros ir jāpiemēro Direktīvu 2018/851/EK par atkritumiem. Saskaņā ar valsts likumu par atkritumu apglabāšanu un atbilstošajiem pašvaldības nolikuma par atkritumiem noteikumiem lampas un akumulatori ir jāutilizē, nodrošinot atbilstošus apliecinošus dokumentus.


Vietējā tirdzniecības aģentūra labprāt jums palīdzēs utilizēt lampas un akumulatorus:

- ziņojiet aģentūrai par lampu un akumulatoru skaitu pa telefonu vai rakstiski.

Aģentūra norādīs bezmaksas piegādes vietu, kur no gādāt lampas, vai kopā ar utilizācijas uzņēmumu parūpēsies, lai lampas aizvestu un atbilstoši utilizētu. Šis pakalpojums ir maksas. Ārpus Vācijas robežām spēkā ir attiecīgo valstu tiesību akti. Vērsieties pie vietējās tirdzniecības aģentūras.

Iepakojums

Iepakojums ir 100% no otrreizēji pārstrādājama materiāla. Iepakojumus, kas nav izmantoti un ko JK uzņēmumi laidusi apgrozībā, var atgriezt JK uzņēmumu grupai. Jūsu kontaktpersona aģentūrā vai tirdzniecības pārstāvis labprāt sniegs konsultāciju.

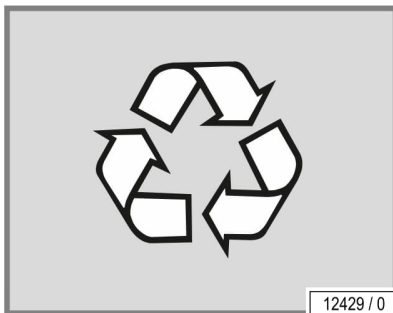


Vecu ierīču utilizācija

Ierīce ir ražota no otrreizēji izmantojama materiāla. JK uzņēmumu grupa labprāt sniegs informāciju par izmantoto materiālu saturu un apdraudējuma potenciālu.

Saskaņā ar Direktīvu 2012/19/ES, ražotāja pienākums ir paņemt atpakaļ noteiktas elektriskas un elektroniskas sastāvdaļas un tās utilizēt.

Attiecīgās detaļas un ierīces ir marķētas ar blakus izvietotiem simboliem.

Pēc JK uzņēmumu grupas lūguma ierīci nodod atbilstošai utilizācijai. Šis pakalpojums bez maksas. Jūsu kontaktpersona aģentūrā vai tirdzniecības pārstāvis labprāt sniegs konsultāciju.

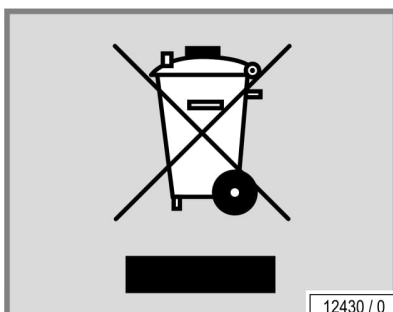

Reģistrācijas numuri

JK uzņēmumu grupas uzņēmumi Vācijā ir reģistrēti kā ražotāji un tie uzņemas visus pienākumus, kas izriet no Vācijas Elektro- und Elektronikgerätegesetz (Elektronisko un elektropreču likuma).

JK-International GmbH, Division JK-Licht GmbH reģistrācijas numurs (lampas):

WEEE-DE 61515020

JK-Products GmbH reģistrācijas numurs (ierīces):

WEEE-DE 62655951



1.5.10 Direktīvas

Skat. pievienoto EK Atbilstības deklarāciju.

1.5.11 Eksports

Vēlamies norādīt, ka ierīce paredzēta tikai Eiropas tirgum un to aizliegts eksportēt uz citām valstīm, piemēram, ASV vai Kanādu, vai šajās valstīs izmantot saimnieciskajai darbībai! Šo noteikumu neievērošanas gadījumā mēs neuzņemamies atbildību! Vēlamies skaidri norādīt, ka noteikumu pārkāpumu gadījumā eksportētājam un/vai operatoram var rasties nopietni atbildības riski.

1.5.12 Sava mūzika

Personīga viedtālruna izmantošanas gadījumā runa nav par publisku atskaņošanu Autortiesību likuma izpratnē, tādēļ solāriju studijas vadītājam nav pienākums informēt un veikt apmaksu kompetentajai organizācijai, lai saņemtu komerciālās atskaņošanas tiesības.

Attiecībā uz publisku formāta datu izmantošanu spēkā ir tie paši nosacījumi kā citiem mūzikas avotiem. Studijas vadītājs/īpašnieks savās telpās un/vai JK-International GmbH ierīcēs iekļautajā 'MP3 mūzikas modulī' drīkst izmantot un atskaņot tikai oriģinālas audio datnes, ja ir iegūtas atbilstošās atskaņošanas tiesības. Tās iespējams saņemt valsts kompetentajā organizācijā, kas piešķir komerciālās atskaņošanas tiesības (Vācijā - GEMA/GVL).

audio datnes ar aizsardzību pret kopēšanu, kā arī šajos medijos ierakstītie darbi, nedrīkst tikt konvertēti MP3 formātā un/vai ierakstīti HDD, audio CD, MC, audio DVD utt., ja šim nolūkam tiek izmantota programmatūra, kas uzlauz vai apiet skaņas vai datu mediju aizsardzību pret kopēšanu.

Jums jebkurā laikā ir jābūt iespējamam pierādīt iegūtās atskaņošanas tiesības ar atbilstošiem dokumentiem, ja tos pieprasa kompetentās organizācijas ārējā dienesta darbinieki vai citi kontroles orgāni.

Ja ievērosiet visas iepriekš minētās norādes un esat ieguvuši visas nepieciešamās tiesības 'MP3 mūzikas moduļa' izmantošanai, tad jūs varat konvertēt atskaņošanas ierīcei nepieciešamajā MP3 formātā oriģinālajās audio datnēs. Katrai tiesiskajā ceļā iegūtajai audio datnei var tikt izgatavota tikai viena kopija (dublikāts vai MP3 formatējums). Medija avoti (oriģinālie datu nesēji) ir jāuzglabā un tos nedrīkst izmantot vienlaikus ar kopijām.



NORĀDE:

Par atskaņotām SD kartēm, kas ir iekļautas JK audio sistēmā, arī ir maksājama nodeva par izmantošanu komercdarbībā, ja tajā ir saturs, uz kuru attiecas AKKA/LAA.

1.5.13 Tehniskās izmaiņas

Ierīce ir uzbūvēta atbilstoši spēkā esošajiem tehniskajiem standartiem un drošības noteikumiem. Ir saglabātas tiesības veikt tehniskus grozījumus saistībā ar šīs lietošanas instrukcijas izklāstu un datiem, kas nepieciešami ierīces uzlabošanai.





Ierīces, kā arī vadības sistēmas pārbūvēšana vai izmaiņu veikšana nav atļauta. Noteikumu neievērošanas gadījumā EK atbilstība vairs nav spēkā!


Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves detaļas. Noteikumu neievērošanas gadījumā EK atbilstība vairs nav spēkā!

1.6 Plāksnītes un uzlīmes uz ierīces

Uz ierīces atrodamas plāksnītes ar būtiskiem apdraudējumu norādījumiem vai informāciju par detaļām. Zemāk ir norādīti plāksnīšu piemēri. Nodrošiniet, lai norāžu plāksnītes vienmēr būtu labi saredzamas un salasāmas. Trūkstošas plāksnītes ar norādēm un uzlīmes nepieciešams nomainīt.

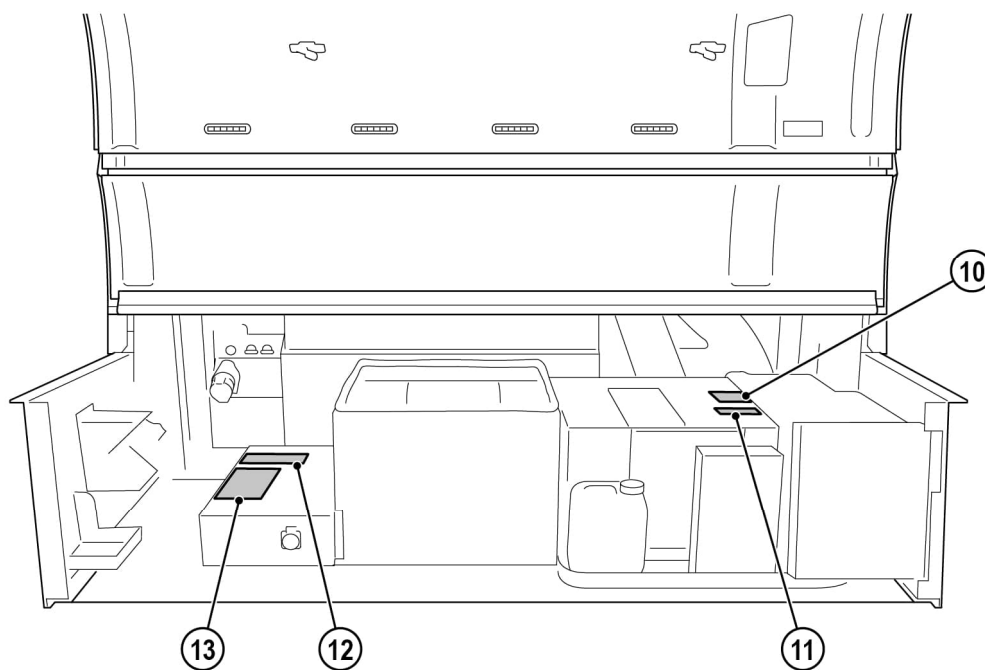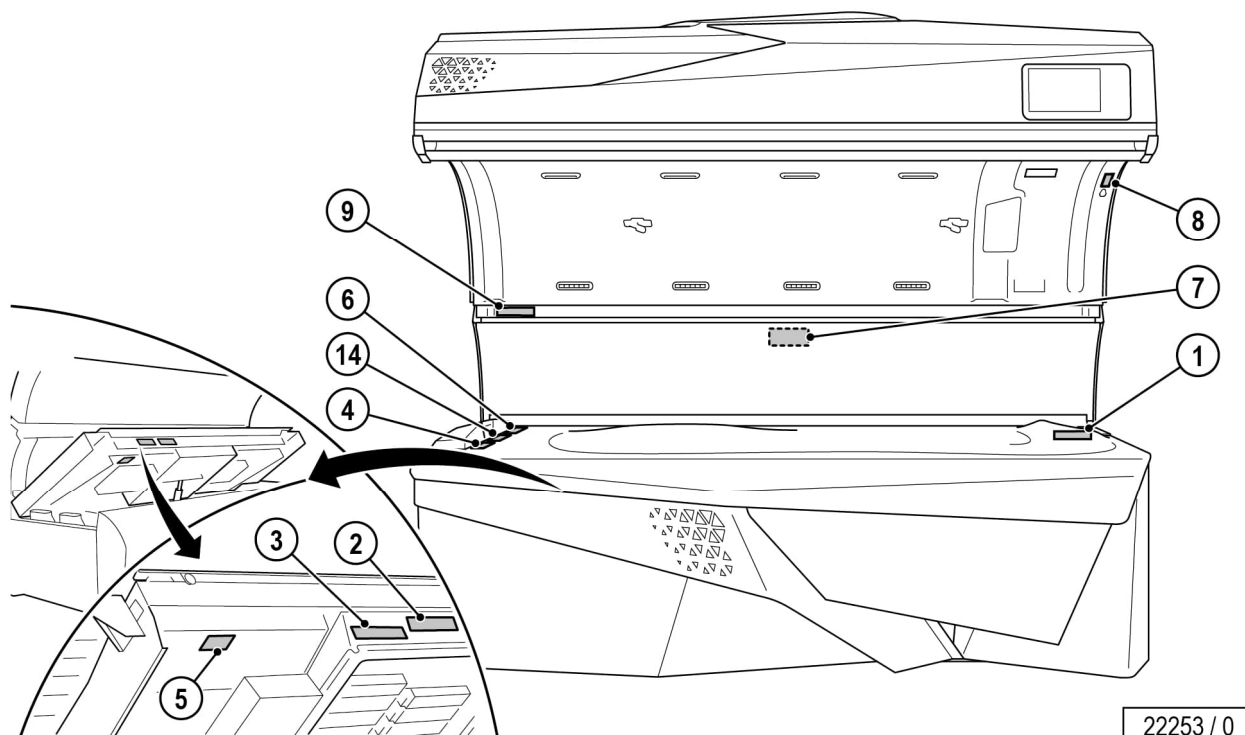

1: ES SPECTRA brīdinājumu norādījumu uzlīmes (1032905-..)

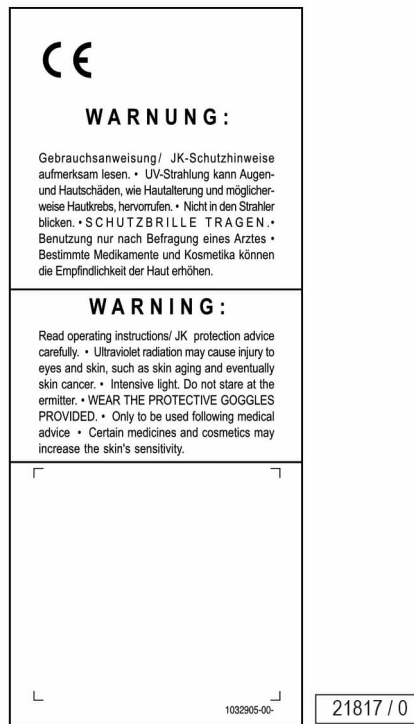

Uzlīme atrodas uz lampas pārsega apakšējā daļā galvas galā.

Šajā uzlīmē ietilpst veidlapa 1032906-.. (skatiet piederumus tehniskajā dokumentācijā).

2: Uzlīme ar norādi par eksportu - Neveic eksportu uz ASV/Kanādu (84829-..)



Uzlīme atrodas vannas priekšpuses apakšējās malas.

3: Uzlīme "Izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas" (801026-..)

Uzlīme atrodas vannas priekšpuses apakšējās malas.



4: Uzlīme uz lampu aprīkojuma

		①	19x		Érgoline ESPERT 770-S DYNAMIC POWER	
		②	8x		Érgoline TRENDS 80-200 W ES	1504250-
		③	22x		Érgoline TRENDS 80-200 W ES	1504250-
		④		4x	Érgoline ULTRA 325W ULTRA PERFORMANCE 802	150445 1504443-
			3x	2x	Érgoline TRENDS 8 W ES	1504264- 1503563-
		⑤	-	-	-	Érgoline TRENDS 80-200 W ES
	⑥		2x	Érgoline ULTRA 180 W ULTRA PERFORMANCE 802 CLASSICAL ASSORTMENT	1504384- 1504310- 1504160-	
JK-Products GmbH / GERMANY					1003006-01	

12846 / 0

Precīzas norādes par lampu aprīkojumu atrodamas atsevišķā pielikumā.

5: AQUA FRESH uzlīme (800839-...)

Uzlīme atrodas vannas apakšpusē.

6: Uzlīme ar tehniskās apkopes norādēm (800701-...)

ACHTUNG!
Dieses Gerät muß regelmäßig nach Hersteller-
vorschrift technisch gewartet bzw. Über-
prüft werden, um jegliche Gefahr körperlicher
Schäden vollständig auszuschließen.
Plakettenbeschriftung = "Geräteproduktion ...
Quartal/Jahr"

ATTENTION!
This sunbed must be checked and serviced
at regular intervals in accordance with the
manufacturer's specifications in order to
rule out entirely any risk of physical injury.
Label wording = "Date of manufacture ...
quarter/year"

12225 / 1

Uzlīme atrodas augšējās daļas iekšpusē kāju daļā.

7: Uzlīme "Noņemt režģi" (842971-...)

Uzlīme atrodas aizmugurējās sienas augšējā daļā.


8: Uzlīme "Ārkārtas izslēgšana" (1032984-..)



Uzlīme atrodas augšējās daļas iekšpusē galvas daļā.

Šajā uzlīmē ietilpst veidlapa 1032985-.. (skatiet mapi "Tehniskā dokumentācija").

9: Tipa plāksnīte

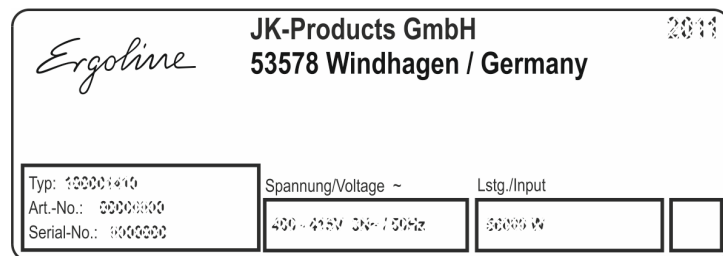

11991 / 2

Augšējās daļas iekšpusē atrodas tipa plāksnīte. Tā satur būtisku informāciju saistībā ar ierīces identificēšanu (piemēram, sērijas numuru = Serial-No.).



10., 11., 12. un 13. uzlīme atrodas zem vannas.

10: Klimata kontroles ierīces uzlīme (1002243-..)

ACHTUNG! Hier oben!
Falls Klimagerät gekippt, vor Inbetriebnahme 8 Stunden in Normalstellung stehen lassen, wegen Rücklauf der Kälteflüssigkeit

ATTENTION! This side up!
In case air condition unit was toppled over, let it 8 hours in home position before initiation, because of the return of the refrigerant.

GEFAHR
Bei geöffnetem Gerät nicht spannungsfrei!

DANGER
Voltage is not switched off, when sunbed is opened.

Regelmäßige Sichtprüfung!
Regular visual check!
Contrôle visuel régulier!

Gefahr von Geräteschäden!
Risk of damage to equipment!
Risque de détérioration de l'appareil!

Abdeckung entfernen!
Remove cover!
Éliminer la couverture!

Filtermatten reinigen!
Renew filter mats!
Nettoyer les mats filtrants!

Kührippen reinigen!
Clean cooling fins!
Nettoyer les barres de refroidissement!

Kondensatbehälter entleeren!
Empty condensation container!
Vidanger le réservoir à condensation!

1002243-01-

13435 / 0

Uzlīme atrodas uz klimata kontroles ierīces.

11: Uzlīme "Kondicionētājs R32 " (1032302-..)

ACHTUNG!
Feuergefährliches Kühlmittel im Klimagerät!
Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten!

ATTENTION!
Flammable refrigerant in the air conditioner!
Fire, naked flames and smoking prohibited!

ATTENTION !
Liquide de refroidissement inflammable dans le climatiseur ! Interdiction de faire du feu, d'allumer des lumières nues et de fumer !

1032302-00-

21748 / 0

12: Uzlīme "Vadības kārbas brīdinājumi" (1033325-..)

GEFAHR! Bei geöffnetem Gerät nicht spannungsfrei!
DANGER ! L'appareil n'est pas hors tension lorsqu'il est ouvert !

DANGER! Voltage is not switched off, when sunbed is opened!
PELIGRO! El voltaje no se apaga cuando se abre la cama solar!

SICHERHEITSHINWEIS: Zum störungsfreien Gerätebetrieb muß der Steuerboxdeckel immer ordnungsgemäß verschlossen sein!
NOTE ON SAFETY: The control box cover must always be properly closed on for fault-free device operation!
CONSIGNE DE SÉCURITÉ: Le couvercle du boîtier de commande doit toujours être correctement fermé pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil!
NOTA DE SEGURIDAD: La cubierta de la caja de control siempre debe estar atomillada para evitar fallas!

ACHTUNG! ESD-empfindliche Bauteile. Vorsichtsmaßnahmen beachten! Arbeiten an den Leiterplatten nur durch geschultes Fachpersonal!
CAUTION! Components sensitive to ESD. Observe precautionary measures! The PCBs may only be worked on by specially trained personnel!
ATTENTION! Composants sensibles aux décharges électrostatiques. Respecter les mesures de précaution! Exécuter les travaux portants sur les circuits imprimés uniquement par un personnel spécialisé ayant reçu une formation appropriée!

¡ATENCIÓN! Componentes sensibles a ESD. Observe las medidas de precaución. Los trabajos en las placas de circuitos sólo deben ser realizados por personal especializado!

1033325-00

21870 / 0

Uzlīme atrodas uz "Vadības ierīces daļiņu nesēja".

13: Norāde "Oriģinālās detaļas" (800702-..)

Hinweis !

Verwenden Sie in diesem Gerät ausschließlich Original-JK-Ersatzteile.
Bei Schäden, die nachweislich durch die Verwendung von nicht Original-Ersatzteilen entstanden sind, wird jegliche Haftung ausgeschlossen.
Eigenmächtige Umbauten und Veränderungen am Gerät oder an der Steuerung sind nicht gestattet.
Bei Missachtung erlischt die Betriebserlaubnis!
Des Weiteren erlischt unsere EU-Konformitätserklärung (CE-Kennzeichen).

Note !

Please use only original JK spare parts in this device.
Any liability for damage or injury proven to be the result of the use of non-genuine spare parts is excluded.
Unauthorized modifications and changes to the device and its control unit are prohibited.
Failure to comply with this voids the operating licence!
In addition, our EU Declaration of Conformity (CE certification) shall also be voided.

JK Teile Nr.: 800702-01

21311 / 0

Uzlīme atrodas uz "Vadības ierīces daļiņu nesēja".

14: zila LED 2. riska grupas uzlīme (1020652-..)

ACHTUNG ! Blaue LED's:
Risikogruppe 2

Möglicherweise gefährliche optische Strahlung. Bei Betrieb nicht für längere Zeit in die Lampe blicken. Kann für Augen schädlich sein.

CAUTION ! Blue LED's:
Risk group 2

Possibly hazardous optical radiation emitted from this product. Do not stare at operating lamp. May be harmful to the eyes.

19327 / 0

Uzlīme atrodas uz lampas pārsega apakšējā daļā kāju galā.

ESD jutīgu detaļu uzlīme (85662-..)

Uzlīme atrodas vairākās ierīces vietās.



1.7 Defekta izslēgšana

Tiktāl, ciktāl pircējs, pamatojoties uz likumā noteikto garantiju un/vai garantijas solījumiem, izvirza pretenzijas par ierīces defektiem, tiek piemēroti šādi noteikumi:

Garantija neattiecas uz dilstošajām detaļām, piemēram, zemspiediena lampām (caurulēm) un palīgmateriāliem (Aroma), kā arī uz akrila stikliem.

Ja precei ir defekts, JK-International sākotnēji ir tiesības un pienākums pēc saviem ieskatiem novērst defektu vai veikt maiņas piegādi. Ja remonts vai rezerves piegāde nav iespējama vai neizdodas, pircējs var atteikties no pirkuma līguma vai attiecīgi samazināt pirkuma cenu.

Garantijas termiņš ir divi gadi no piegādes brīža vai, ja nepieciešama pieņemšana, no pieņemšanas brīža. No garantijas izrietošās klienta tiesības ir spēkā līdz ar tiesībām, ko, iespējams, paredz pirkšanas-pārdošanas līgums, un tās viena otru neskar.

1.8 Atbildības izslēgšana

Jebkura JK grupas atbildība, neatkarīgi no juridiskā pamatojuma, ir izslēgta, ja kaitējums radies viena vai vairāku šādu iemeslu dēļ:

- ierīce nav izmantota atbilstoši noteikumiem;
- ierīce nav uzmontēta, ekspluatēta, lietota un tehniski apkopta atbilstoši noteikumiem;
- ierīce ir darbināta ar bojātiem drošības sistēmas elementiem vai nepareizi iebūvētu vai nefunkcionējošu drošības un aizsardzības sistēmu, tajā skaitā brīdinājuma uzlīmi,
- nav ievērotas lietošanas instrukcijas norādes saistībā ar transportu, uzglabāšanu, montāžu, ekspluatācijas uzsākšanu, lietošanu un tehnisko apkopi;
- darbu ir veicis neapmācīts personāls;
- ierīcei vai vadības sistēmai pēc pašu iniciatīvas veiktas izmaiņas;
- nav pietiekami kontrolētas nodilstošās detaļas;
- ir veikti neatbilstoši remontdarbi;
- nav izmantotas oriģinālās rezerves detaļas
- katastrofu gadījumi, kas radušies svešķermeņu un nepārvaramu apstākļu ietekmē.

2 Apraksts



2.1 Piegādes komplektācija

- Sauļošanās ierīce
- LED SHOULDER TAN ar skaņas sistēmu, ieskaitot Bluetooth® un bezvadu uzlādes staciju
- Servisa komplekts: satur sešstūra atslēgu un piesūcekni akrila plāksnēm
- Klimata kontroles ierīce
- Pieslēguma vads
- Aizsargbrilles
- Mastercard NFC (studijas vadītājs)
- Tehniskā dokumentācija (lietošanas instrukciju, brošūrām ar kļūdu kodiem un PROFESSIONAL SETUP MANAGER PLUS un citiem dokumentiem)

2.1.1 Opcionāli

- REMOTE SERVICE
- Gaisa novadīšanas centrālais uzgalis


2.2 Aprīkojums

Ierīces ir aprīkotās dažādi atbilstoši to tipam.


Šajā aprakstā ir ņemtas vērā visas sērijas ietvaros un opcionāli ražotās detaļas/funkcijas, ko jāņem vērā lietošanas un/vai tehniskās apkopes laikā.

Aprīkojuma atšķirības skar arī vadības sistēmas pulti - Redzami ir tikai tie no aizmugures apgaismotie taustiņi, kurus iespējams izmantot, proti, attiecīgajai funkcijai ir jāietilpst ierīces aprīkojumā.

2.3 Ierīces apraksts

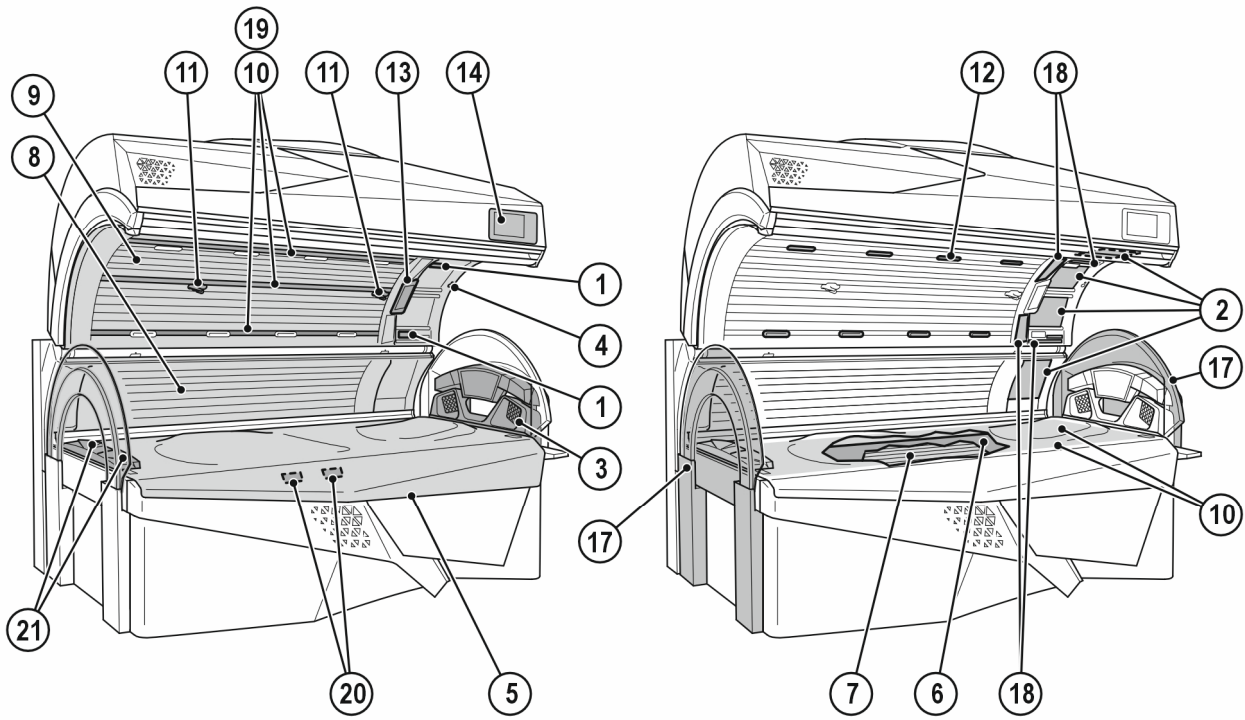

22255 / 0

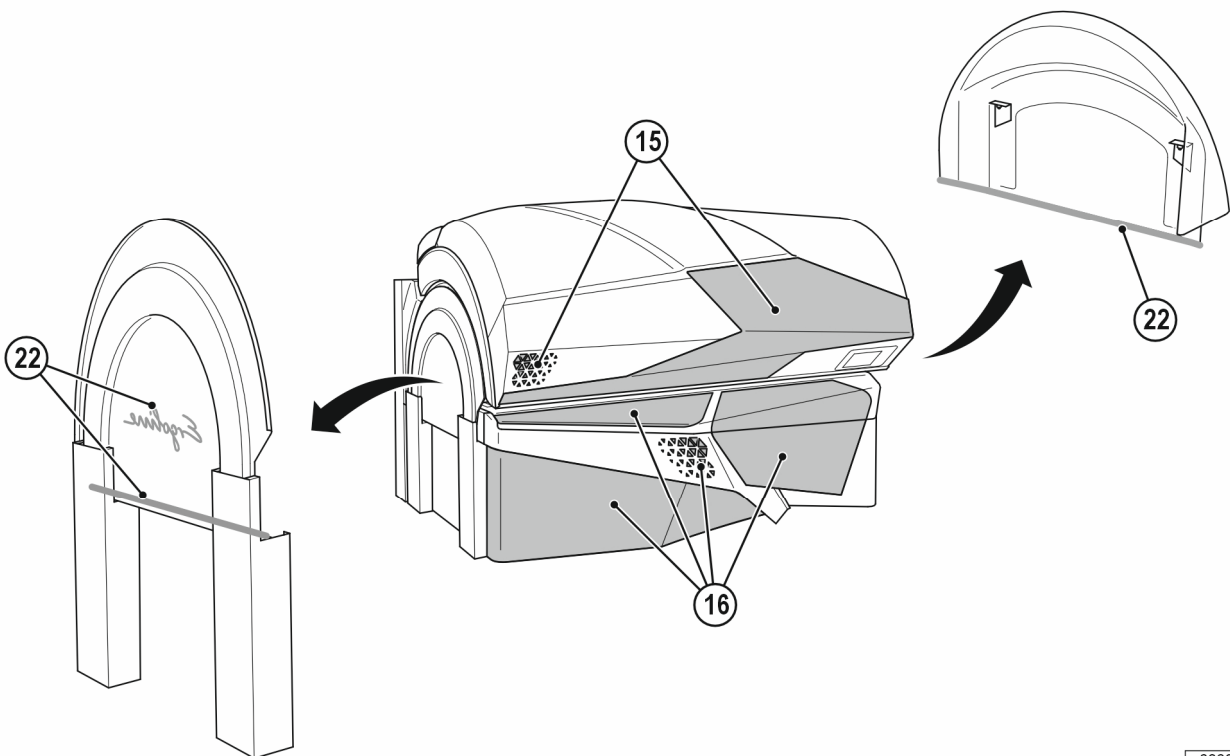


22291 / 0

1. Regulējamas ventilācijas sprauslas, sejas dzesēšanai
2. Sejas sauļošanas ierīce SPECTRA Fusion Edge LED
3. LED SHOULDER TAN ar skaņas sistēmu, ieskaitot Bluetooth®, un bezvadu uzlādes staciju (Wireless Charging) viedtālruniem
4. Taustiņš ĀRKĀRTAS IZSLĒGŠANA
5. Akrila stikla plāksne gulēšanai, apakšējā daļa
6. Starplāksne
7. Zema spiediena spuldzes, apakšdaļa
8. Zema spiediena spuldzes, sānu daļa
9. Zema spiediena spuldzes, augšdaļa
10. Iekštelpas apgaismojums (gaismas diodes)
11. Sprauslas AQUA / AROMA SYSTEM
12. Ventilācijas sprauslas ķermeņa dzesēšanai
13. INTERIOR DISPLAY
14. EXTERIOR DISPLAY & NFC CONNECT
15. Efektīvā apgaismojuma nomainā augšējā daļā (gaismas diodes)
16. Efektīvā apgaismojuma priekšējā noslēgta nomainā (gaismas diodes)
17. Slēgtais sauļošanās tunelis
18. FUSION LIGHT (sarkans un zils) Seja + dekoltē
19. FUSION LIGHT (sarkans un zils) Ķermenis
20. Service Light (tikai, ja ir atvērta vanna)
21. Gaisa sprauslas/ķermeņa atdzesēšana/kāju zona
22. Efektu apgaismojums sauļošanās tunelim (LED)





2.4 Piederumi (opcija)

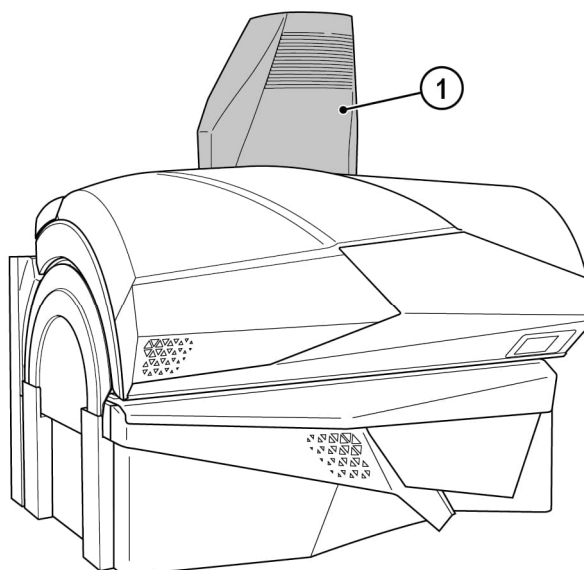

22256 / 0

1. Centrālā gaisa izplūdes sprausla (opcija)

2.5 Darbības apraksts

Sauļošanas ierīces galvenie tehniskie komponenti ir mākslīgais UV starojuma avots un mehāniskā konstrukcija ar fiksētu efektīvo laukumu.

Prestige Fusion Edge gadījumā UV spektru papildina sarkana gaisma (BEAUTY LIGHT) un zila gaisma (ACTIVATING LIGHT).

3 Vadība



3.1 Drošības noteikumi lietotājiem

 **BĪSTAMI!**



UV starojums

Paaugstināts ādas un acu savainošanas vai ādas slimību risks!

- Ievērojiet 1. nodaļā sniegtos drošības norādījumus un brīdinājumus.

Iespējami dzirdes bojājumi!

Mūzikas klausīšanās lielā skaļumā var izraisīt ilgtermiņa dzirdes traucējumus.

- Neuzstādiet skaļumu par augstu.

3.2 Iedegums – bet pareizi!

Lai patiesi varētu izbaudīt solārija priekšrocības, ir jāievēro dažas lietas. Lūk dažas atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem.

Dekoratīvā kosmētika sauļojoties?

Kosmētika satur dažādas sastāvdaļas. Neatkarīgi no tā, vai runa ir par emulgatoriem, taukiem vai tā dēvētajiem aromatizētājiem - savienojumos ar UV stariem tie var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Šā iemesla dēļ drīkst lietot tikai tādus kosmētikas līdzekļus, kas īpaši izstrādāti lietošanai solārijos.

Tādēļ pirms katras sauļošanās ierīces izmantošanas reizes: noteikti noņemiet dekoratīvo kosmētiku! Dekoratīvā kosmētika aizsedz sejas ādas poras. Sauļošanās ierīces UV gaisma atkal atver šīs aizvērtās poras, tādējādi ādā nonāk ne tikai gaisma, bet arī alerģiju izraisošās kosmētikas sastāvdaļas.

Vēl dekoratīvās kosmētikas negatīvās sekās ir tādas, ka ar laiku bojājas sejas ādas kvalitāte kopumā. Pat neliels daudzums dekoratīvās kosmētikas var savienojumā ar UV gaismu radīt kaitējumu, nevis aizsargāt. Tas nozīmē, ka pirms sauļošanās dekoratīvā kosmētika ir jānoņem, lai starojumam ir labāka ietekme.

Mazgāšanās pēc sauļošanās?

Iedegums rodas ādā, nevis uz tās, tādēļ to nav iespējams nomazgāt. Pēc dušas uzklājiet uz ādas mitrinošu krēmu.

Vienlaicīga medikamentu lietošana un sauļošanās?

Par atsevišķiem medikamentiem ir zināms, ka tie paaugstina ādas jutību pret UV. Ļoti augsts risks pastāv antibiotiku, sulfonamīdu, psihofarmaceitisku līdzekļu, nomierinošu līdzekļu, antidiabētisku līdzekļu un diurētisku līdzekļu gadījumā. Ādu jutīgāku padara arī nomierinoši līdzekļi, kas satur psoralēnu vai kumarīnu. Šaubu gadījumos ir nepieciešams vērsties pie ārsta, lai sauļošanās varētu noritēt bez apdraudējumiem.




Kontaktlēcas sauļojoties?


Atbilde ir: jā! Tāpat kā citiem sauļošanās ierīces lietotājiem arī kontaktlēcu nēsātājiem ir jāliek īpašās aizsargbrilles, lai aizsargātu acis pret UV starojumu. Lai nodrošinātu labāku aizsardzību, brillju un kontaktlēcu valkātāji var vērsties pie optiķa, lai iegādātos maiņas lēcas ar UV aizsargfiltru. Maiņas lēcās iestrādātais UV-A un UV-B aizsargfiltrs gandrīz 100% pasargās radzeni un acu iekšpusi no UV starojuma.

Pateicoties tam, sauļošanās ierīces lietotāji gūs labumu ne tikai esot ārā, bet arī sauļojoties solārijā. Šīs lēcas bez ierobežojumiem iespējams valkāt arī sauļojoties solārijā. Papildus informāciju jautājiet savam optiķim vai acu ārstam.

3.3 Pārskats par lietošanu

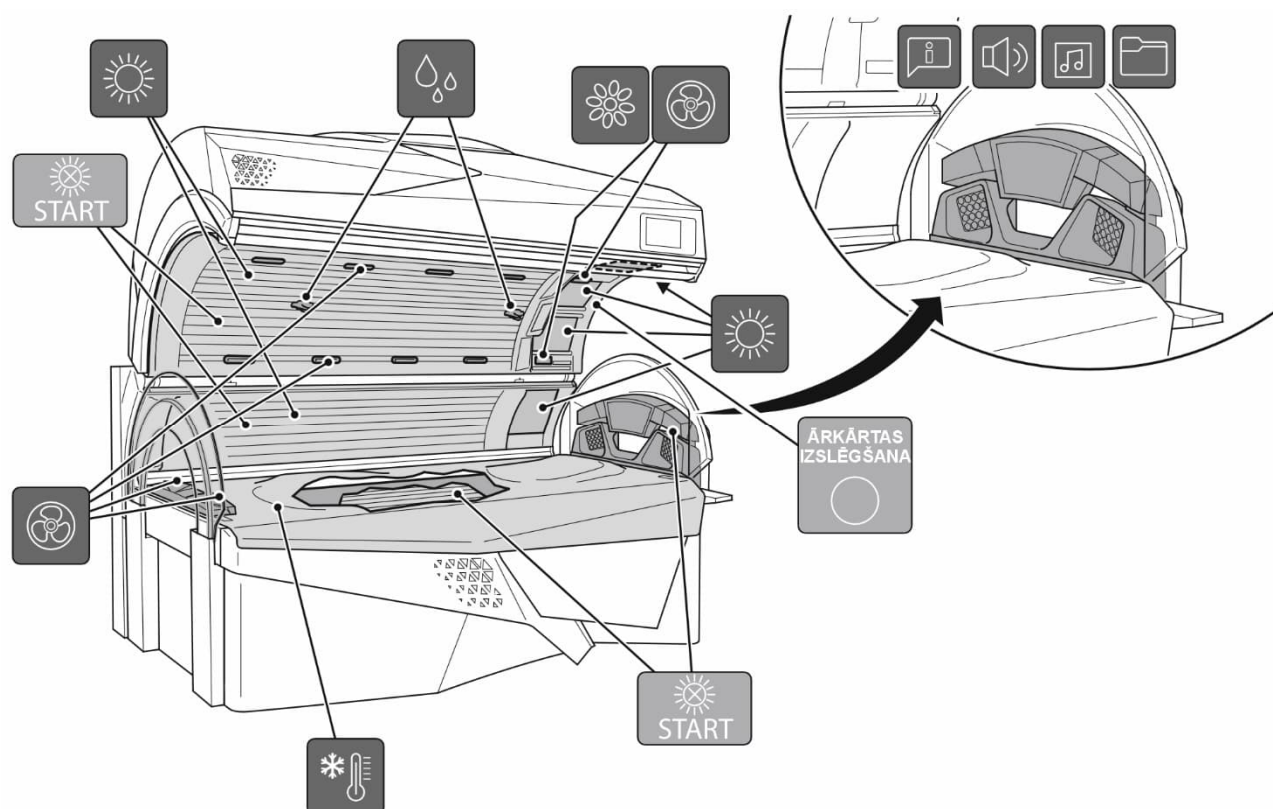

22257 / 0

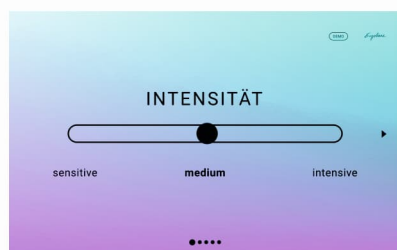


SELECTABLE TANNING PROGRAMS


Pirms sesijas sākuma izvēlieties vēlamo lietojumprogrammas veidu. Ir pieejami 3 veidi: Skatiet 3.5. nodaļu.

NCF CONNECT

Pēc sauļošanās: Savus iestatījumus var saglabāt NFC datu nesējā (piemēram: NFC birka).
Pirms sauļošanās: Uz ierīci varat pārņemt savus iestatījumus.

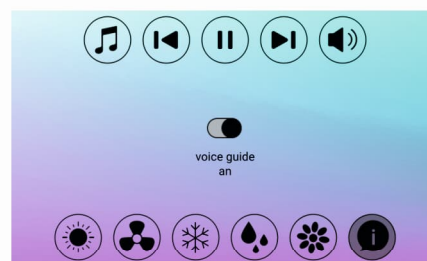

Sauļošanās laikā funkcijas varat aktivizēt vai deaktivizēt, izmantojot INTERIOR DISPLAY.

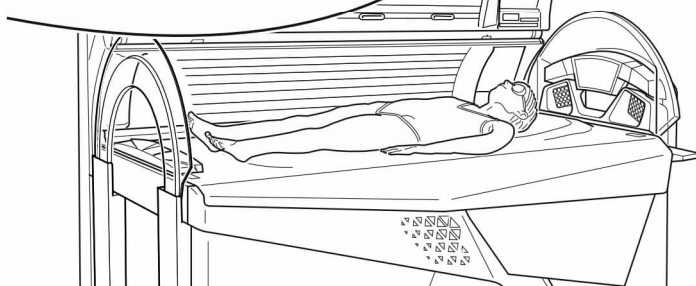


22477 / 0



3.3.1 PROFESSIONAL SETUP MANAGER PLUS

PROFESSIONAL SETUP MANAGER PLUS režīmā iespējams atvērt režīma stāvokļus un veikt iestatījumus.

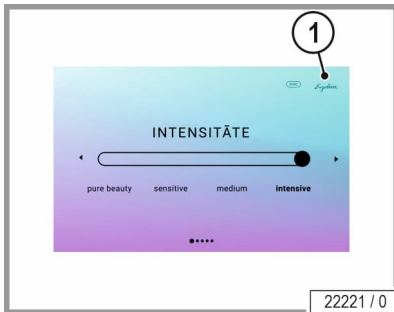

NORĀDE:

Ražotāja iestatījumu režīmu var izsaukt tikai tad, ja nav ieslēgts sauļošanās process.

30 sekundes pēc pēdējās taustiņa nospiešanas ierīce automātiski pārslēdzas miera režīmā un tiek pieņemtas pašreiz iestatītās vērtības.



NORĀDE:

Lai izsauktu PROFESSIONAL SETUP MANAGER PLUS, gaidīšanas režīmā uz 3 sekundēm turiet nospiestu Ergoline logotipu (1).



3.3.2 NFC Connect



NFC¹punkts

Datu pārsūtīšana, izmantojot bezkontakta tuvplūsmas saziņu.

Lietotāja iestatījumus iespējams saglabāt īpašā klienta kartē, lai tos nevajadzētu atkārtot nākamajā lietošanas reizē. Saglabātos datus var pārsūtīt uz citām ierīcēm ar tādām pašām iestatījumu iespējām.

- Turēt klienta karti cieši pie NFC punkta (maks. 3 cm attālums).



NFC statuss

Datu pārsūtīšana ir apzīmēta ar krāsām.



NFC punkts nepārtraukti mirgo:

Gatavs darbam/gaidīšanas režīms

Datus iespējams pārsūtīt datu nesējā.



NFC punkta centrs ir zaļš:

Iestatījumi tika veiksmīgi pārsūtīti no datu nesēja.



NFC punkta centrs ir zils:

Iestatījumi tika veiksmīgi pārsūtīti datu nesējā.



NFC punkta centrs ir oranžs:

a) Pārtraides kļūda

- Atkārtoti turiet karti punktu priekšā un uzgaidiet nedaudz ilgāk.

b) Datu nesējs ir tukšs.

- Pēc lietošanas iestatījumus iespējams saglabāt datu nesējā.

Informāciju par iestatīšanas iespējām meklējiet atsevišķajā "PROFESSIONAL SETUP MANAGER PLUS" lietotāju rokasgrāmatā (pārsūtījuma numurs: 1020179-..), kas atrodas tehniskajā dokumentācijā.

¹ Saziņas sistēma: NFC (Near Field Communication, tuvplūsmas saziņa); maksimālais darbības diapazons: aptuveni 50 mm, frekvenču diapazons: 13,56 MHz

3.4 Funkcijas


INTERIOR DISPLAY gaidīšanas režīmā



NORĀDE:

Ja pirms sauļošanās nav izvēlēts sauļošanās veids, lietotājs var izvēlēties vēlamo sauļošanās programmu arī INTERIOR DISPLAY.


Papildu informācija par pielietojuma veidiem: skatiet nodaļu 3.5 lappusē 48.

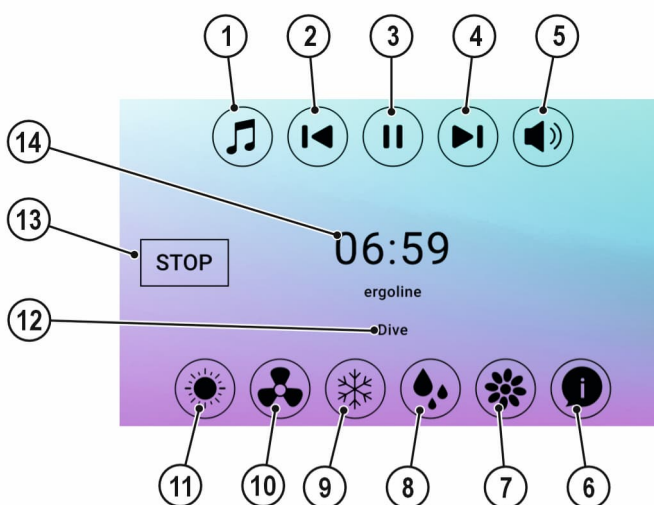

22219 / 0

1. Piktogramma "Audio avots"
2. Piktogramma "Audio atpakaļ"
3. Piktogramma "Audio pauze/atskaņot"
4. Piktogramma "Audio uz priekšu"
5. Piktogramma "Skaļuma regulēšana"
6. Piktogramma "VOICE GUIDE"
7. Piktogramma "AROMA SYSTEM"
8. Piktogramma AQUA SYSTEM
9. Piktogramma "Klimata kontroles ierīce"
10. Piktogramma "Ventilācija"
11. Piktogramma "Intensitātes izvēle"
12. Displejs - Mūzikas skaņdarbs
13. Piktogramma START/STOP
14. Displejs - Sauļošanās laiks

EXTERIOR DISPLAY

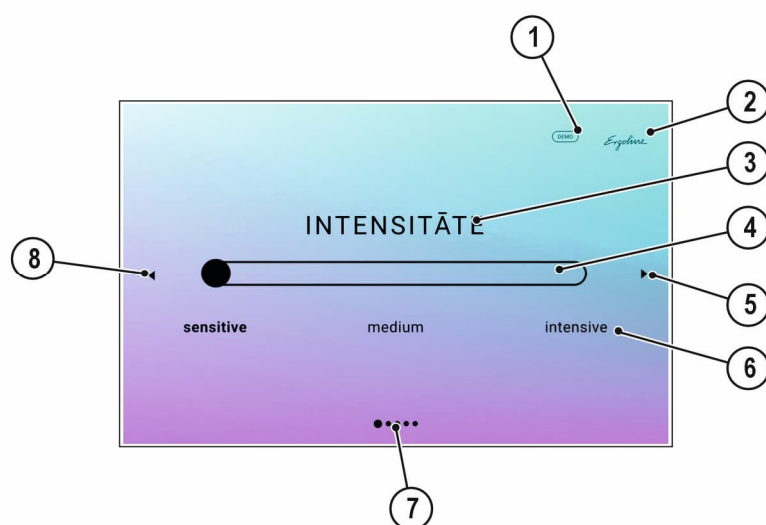

22220 / 0

1. Demonstrācijas režīms
2. PROFESSIONAL SETUP MANAGER PLUS (PROFESSIONAL iestatījumi)
3. Atlasītās funkcijas apraksts
4. Slīdnis
5. Nākamie iestatījumi
6. Iespējamie iestatījumi
7. Iestatījumu lappuse (1. lappuse no 3)
8. Pēdējie iestatījumi

**NORĀDE!**

Ar aktīvu video opciju:

Lai pārtrauktu vai pabeigtu video, nedaudz pieskarieties displejam.

Papildu informāciju par video opciju skatiet PROFESSIONAL SETUP MANAGER PLUS (pasūtījuma Nr. 1020179-..).

**NORĀDE!**


Lai aktivizētu demonstrācijas režīmu, divas reizes īsi nospiediet 'DEMO' (poz. 1).


Demonstrācijas režīmā varat pārbaudīt audio, ventilatora un balss ceļveža darbību.

Jums ir 30 sekundes, lai izvēlētos funkciju.




3.4.1 EXTERIOR DISPLAY






Svarīgākos iestatījumus var veikt ar PROFESSIONAL SETUP MANAGER PLUS (pasūtījuma nr. 1020179-..).

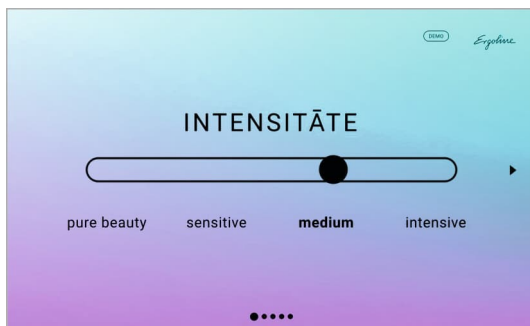

Piktogrammu izvēle/ taustiņu secība	Apraksts/ displeja rādījums	Informācija
	Īsi nospiediet Ergoline logotipu:	Tikai operatoram atveras PROFESSIONAL SETUP MANAGER PLUS

EXTERIOR DISPLAY gaidīšanas režīmā

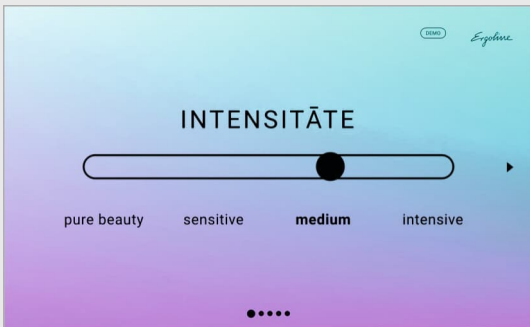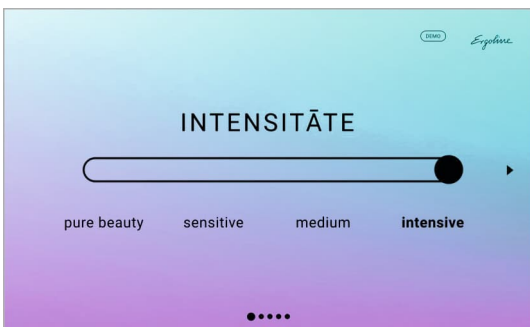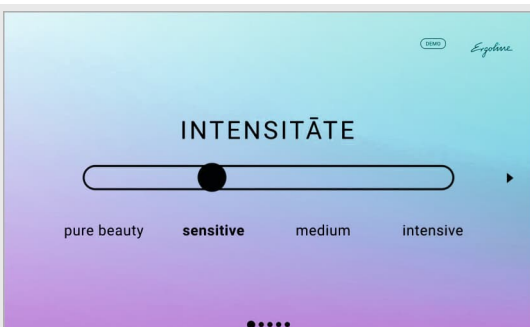	Intensitāšu izvēle Pārvietojiet slīdņi vai nospiediet tieši uz attiecīgās programmas. Izvēle 'vidējs'	Aktivizējiet pieskaroties.
	Izvēle 'intensīvs'	Aktivizējiet pieskaroties.
	Izvēle 'jutīgs'	Aktivizējiet pieskaroties.

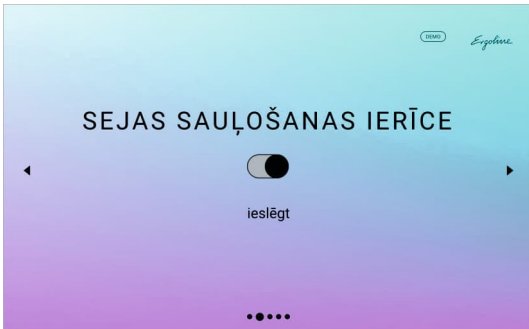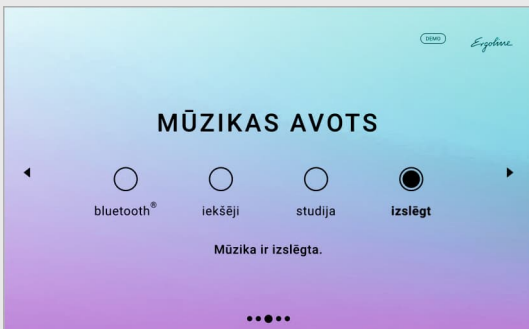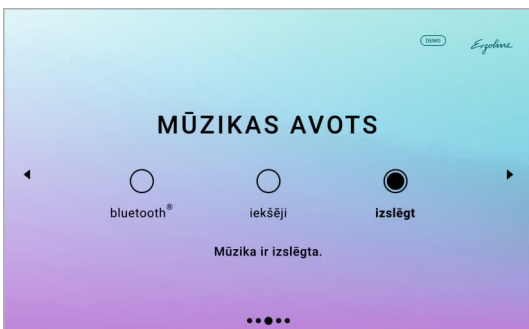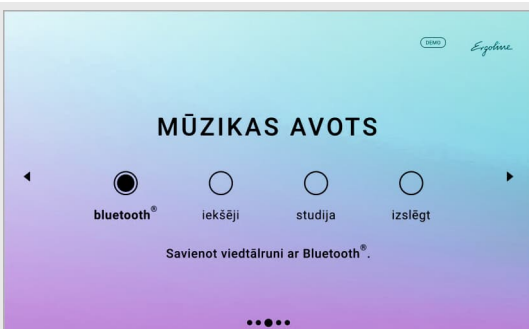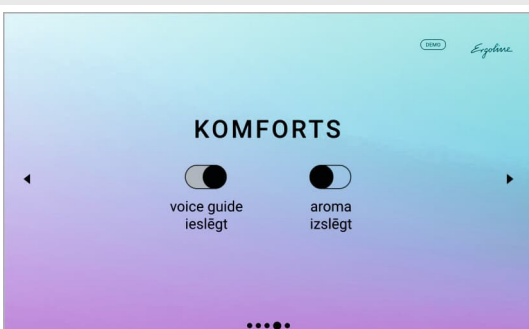Piktogrammu izvēle/ taustiņu secība	Apraksts/ displeja rādījums	Informācija
	Sejas sauļošanas ierīce aktīvēta	Pārvietojot slīdni, funkciju iespējams ieslēgt vai izslēgt.
	bluetooth® = viedtālruna savienojums iekšēji = iekšējā mūzika studija = studijas kanāli izslēgts = mūzika izslēgta	Aktivizējiet pieskaroties.
	Rādījums bez studijas kanāliem	Aktivizējiet pieskaroties.
	Savienojums ar lietotāja viedtālruni	Aktivizējiet pieskaroties.
	VOICE GUIDE aktivizēts AROMA aktivizēts	Pārvietojot slīdni, funkciju iespējams ieslēgt vai izslēgt.




Piktogrammu izvēle/ taustiņu secība	Apraksts/ displeja rādījums	Informācija
	<p>AQUA FRESH ķermeņa daļai izslēgta</p> <p>AQUA FRESH sejai daļai izslēgta</p>	<p>Pārvietojot slīdņi, funkciju iespējams ieslēgt vai izslēgt.</p>

3.4.2 INTERIOR DISPLAY

Piktogrammu izvēle / taustiņu secība	Apraksts / displejā rādījums	Informācija
<p>INTERIOR DISPLAY sauļošanas laikā</p>		
	<p>AROMA</p>	<p>Ieslēgt / izslēgt AROMA</p>

Piktogrammu izvēle / Apraksts / displejā rādījums
taustiņu secība

Informācija

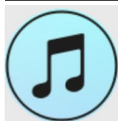

Audio avotu izvēle



Bluetooth®

Iekšējā mūzikas izvēle

Studijas kanālu izvēle


Audio avoti 'izslēgts'




Mūzikas avota izvēle 'Iekšēji'



Ventilators (sejas, ķermeņa un kāju ventilators)

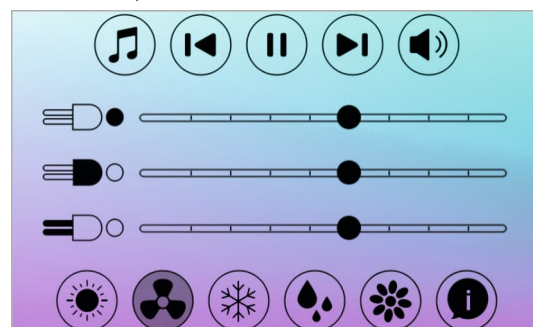

Ventilāciju iespējams regulēt atsevišķi sejai, ķermenim un kājām. Ja lietotājs neko nemaina, ventilācija tiek automātiski pielāgota temperatūrai.

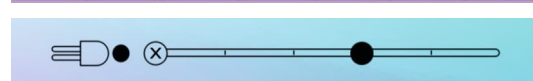

Sejas ventilatora regulēšana:
0. – 9. pakāpe




Ķermeņa ventilatora regulēšana:
0. – 9. pakāpe



Kāju ventilatora regulēšana:
0. – 9. pakāpe




VOICE GUIDE
Ieslēgt / izslēgt VOICE GUIDE

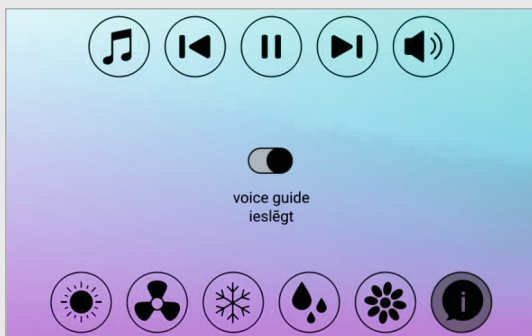

VOICE GUIDE pavada lietotāju visā darbības gaitā. Šo funkciju iespējams ieslēgt un izslēgt jebkurā laikā.



Intensitāte

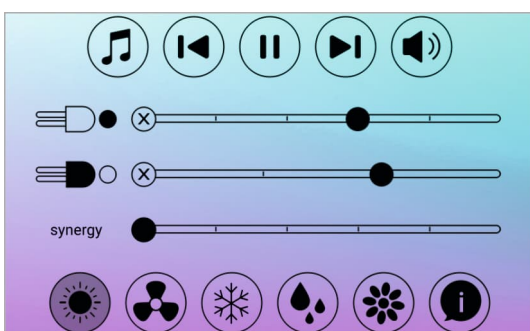

Intensitātes regulēšana sejas zonā, 0. – 5. pakāpes




Intensitātes regulēšana ķermeņa zonā, 0. – 5. pakāpes




FUSION LIGHT regulēšana, 0. – 5. pakāpe

FUSION LIGHT izmanto sarkanās un zaļās gaismas sinerģiju.

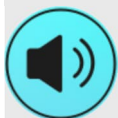

Skaļums

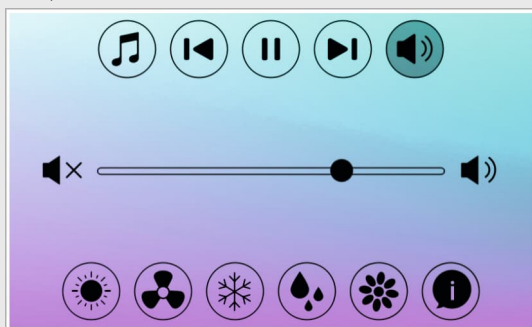


0. – 14. pakāpe

Piktogrammu izvēle / Apraksts / displejā rādījums
taustiņu secība


Informācija



AQUA SYSTEM

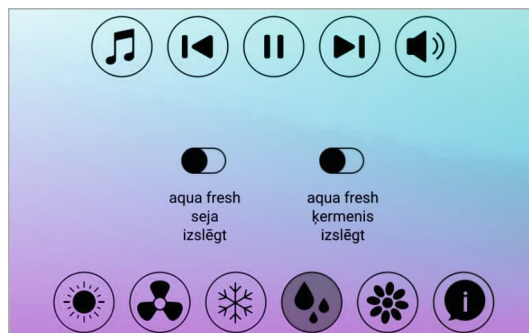

AQUA FRESH ķermenim un sejai
IESL./IZSL.

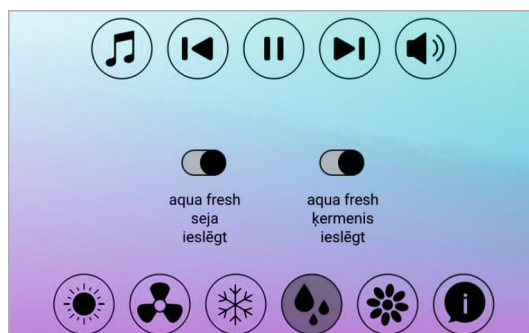

Gaisa kondicionētājs



Gaisa kondicionētājs IESL./IZSL.





ĀRKĀRTAS IZSLĒGŠANA



Nospiežot taustiņu ĀRKĀRTAS IZSLĒGŠANA, ierīce izslēdzas, izņemot INTERIOR DISPLAY. Šajā stāvoklī displejs rāda, ja ir nospiests taustiņš ĀRKĀRTAS IZSLĒGŠANA.

Vienlaikus taustiņa ĀRKĀRTAS IZSLĒGŠANA kontūra mirgo sarkanā krāsā.

Sauļošanās laiks turpinās.

VOICE GUIDE ziņo par balss atbalstu.


ĀRKĀRTAS IZSLĒGŠANU iespējams atcelt pēc 2 sekunžu bloķēšanas laika. Pēc tam ierīce sāk darboties sauļošanās režīmā.

Piktogrammu izvēle/
taustiņu secība

Apraksts/
displeja rādījums

Informācija

EXTERIOR DISPLAY un INTERIOR DISPLAY pēc sauļošanās

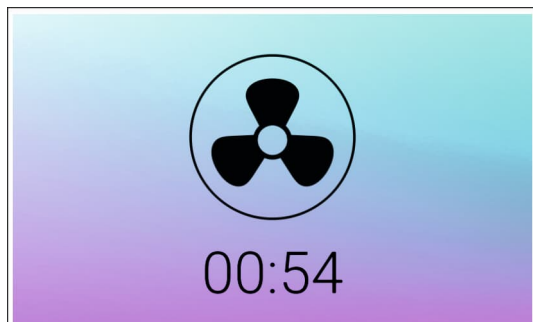


PĒC SAUĻOŠANĀS:
Ventilatora inerces




Nospiediet 'OK', lai atgrieztos

Ja PROFESSIONAL SETUP
MANAGER PLUS ir aktivizēts tīrīšanas režīms un ierīces ventilatora darbības laiks ir beidzies, pēc katras sauļošanās tīrīšana jāapstiprina, nospiežot START/STOP taustiņu.

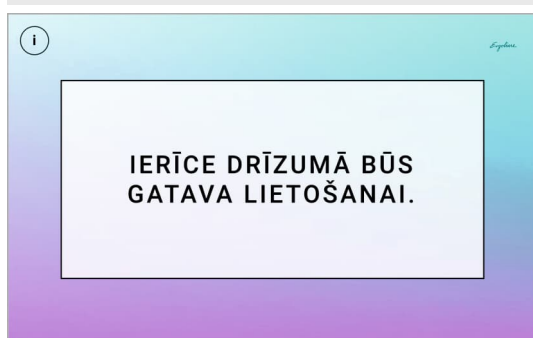


Kļūdas ziņojums

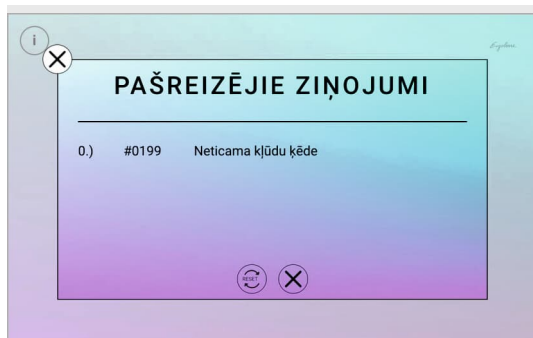

Pašreizējais kļūdas ziņojums



3.5 Pielietojuma veida izvēle (SELECTABLE TANNING PROGRAMS)

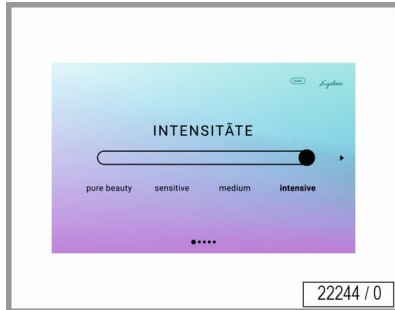

Pirms sesijas sākuma izvēlieties vēlamo lietojumprogrammas veidu.


- INTENSIVE: Maksimāla UV intensitāte
 - MEDIUM: Vidēja UV intensitāte
 - SENSITIVE: Zema UV intensitāte
 - PURE BEAUTY: Programma bez UV starojuma
- Nospiediet izvēlētā lietošanas veida taustiņu.



NORĀDE:

FUSION LIGHT LED katrā programmā sāk darboties ar 100% jaudu. Sejas sauļošanas ierīcei un FUSION LIGHT LED sauļošanās laikā jebkurā brīdī iespējams mainīt intensitāti vai pilnībā izslēgt. Ja netiek veikta pielietojuma veida izvēle, ierīce sāk darboties pielietojuma veidā "INTENSIVE".

3.6 Sākums

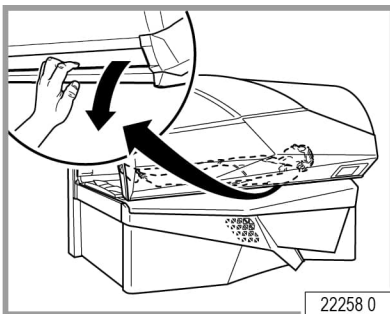

- Aizveriet augšējo daļu.
- Nospiediet taustiņu START/STOP.

Sauļošanās sākumā ir ieslēgtas šādas funkcijas:

- Lampas un gaismas diode
- Sejas sauļošanas ierīce
- Klimata kontroles ierīce
- Ķermeņa dzesēšana
- Ventilācija
- Audio sistēma
- VOICE GUIDE

3.7 Savienošana ar Bluetooth® ierīcēm



BĪSTAMI!



- Iespējami dzirdes bojājumi!
Mūzikas klausīšanās lielā skaļumā var izraisīt ilgtermiņa dzirdes traucējumus.
- Neuzstādiet skaļumu par augstu.

Lietotāji var savienot savu privāto viedtālruni ar audio sistēmu. Ierīču savienošanai jānotiek pirms sauļošanās.

Savienojums star solāriju un lietotāja privāto viedtālruni ir iespējama tikai, izmantojot Bluetooth® 1Connect. Izmantojot Bluetooth® Connect, lietotājs var bezvadu režīmā pārraidīt savu iecienītāko mūziku. Vadība sauļošanās laikā ērti tiek nodrošināta, izmantojot INTERIOR DISPLAY.



NORĀDE:

- Ergoline nevar garantēt pilnīgu savietojamību ar visām Bluetooth® ierīcēm.
- Pirms kādas ierīces sapārošanas ar šo sistēmu jāizlasa lietotāja rokasgrāmata, lai iegūtu vairāk informācijas par Bluetooth® savietojamību.
- Pārlicinieties, vai jūsu ierīcē ir aktivizēta Bluetooth® funkcija un ierīce ir redzama visām citām Bluetooth® ierīcēm.

Savienošana ar Bluetooth® atskaņotāju

Aktivizējiet Bluetooth® funkciju un izvēlieties Bluetooth® ierīču meklēšanas funkciju.

Bluetooth® funkcijas aktivizēšana iPhone®:

iPhone®:

Iestatījumi → Vispārīgi → Bluetooth® → IESL. (tiek sākta ierīču meklēšana)

Bluetooth® funkcijas aktivizēšana Android® viedtālrunim:

Android® viedtālrunis:

Nospiediet Bluetooth® simbolu → SKENĒT (tiek sākta ierīču meklēšana)


¹ Sakaru sistēma: Bluetooth® standarta versija 3.0, versija 2.1 un EDR; maksimālais darbības diapazons: apm. Darbības diapazons: aptuveni 10 m; Frekvenču diapazons: 2,4 GHz diapazons (2,4000 GHz - 2,4000 GHz). 2,4835 GHz); saderīgi Bluetooth profili: A2DP, AVRCP; vienlaikus atbalstītās ierīces (savienošana pārī): viena ierīce




NORĀDE:

Sauļošanās ierīce maksimāli var saglabāt desmit savienotas Bluetooth® ierīces. Atkārtoti savienojot pārī, sauļošanās ierīce vispirms jāizdzēs no Bluetooth® ierīces. Pēc tam aktivizēšanas process jāatkārto.


Programmā PROFESSIONAL SETUP MANAGER aktivizējiet Bluetooth® Connect

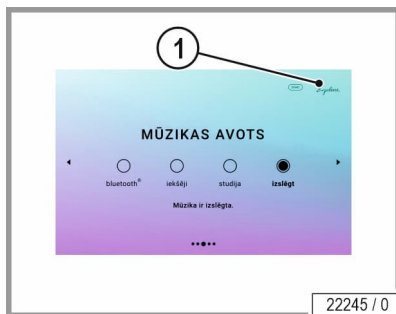


- Īsi nospiediet Ergoline logotipu (poz. 1), lai atvērtu PROFESSIONAL SETUP MANAGER PLUS.

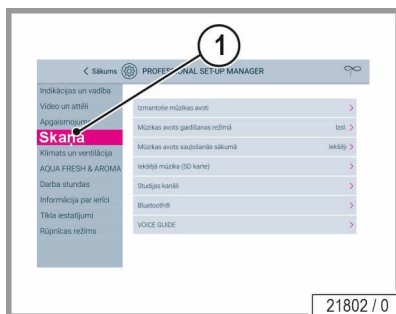

Nospiediet 'Sound' (1) User Profil.

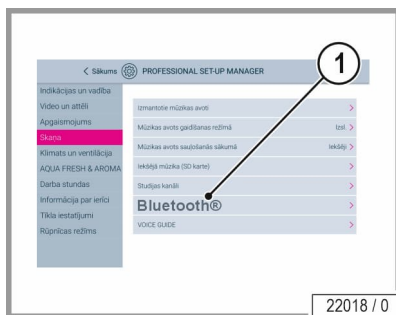


Atlasiet Bluetooth® (1).

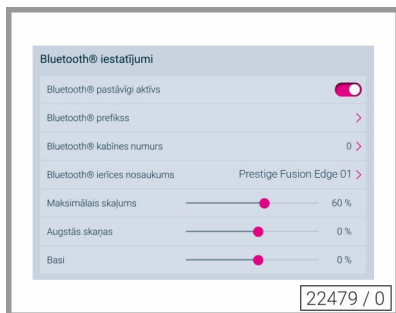

- Pārvietojiet slīdņi, lai ilgstošai darbībai aktivizētu vai deaktivizētu funkciju.


Veiksmīgs Bluetooth® savienojums INTERIOR DISPLAY

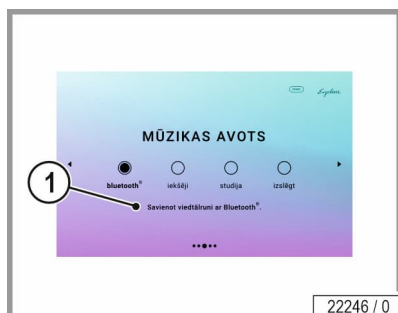

- Statusa rādījums (1), ja ierīces ir veiksmīgi savienotas.



Audio avoti: Bluetooth® izvēle INTERIOR DISPLAY.

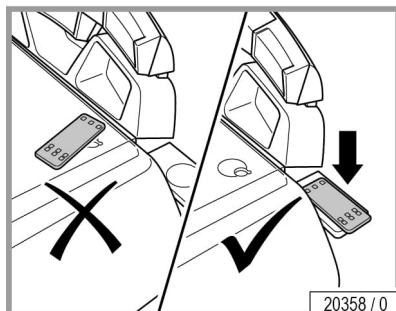

3.8 Klausīties mūziku

BĪSTAMI!



Iespējami dzirdes bojājumi!

Mūzikas klausīšanās lielā skaļumā var izraisīt ilgtermiņa dzirdes traucējumus.

- Neuzstādiēt skaļumu par augstu.

UZMANĪBU!



Iespējami viedtālruna karstuma bojājumi.

- Nenovietojiet ierīci tieši apstarošanas zonā.

3.9 Smartphone Wireless Charging

Uzlādējiet viedtālruni bezvadu režīmā, izmantojot šo tehnoloģiju funkciju.

Vienkārši novietojiet Qi saderīgu viedtālruni uz bezvadu uzlādes stacijas centra ar displeju uz augšu, un uzlādes process sāksies automātiski. Ja nepieciešams, nedaudz nolīdziniet viedtālruni, līdz viedtālrunī tiek aktivizēta uzlādes funkcija.



NORĀDE:

Uzlādes stacijas nenovietojiet nekādas magnētiskās joslas vai mikroshēmas kartes (ID kartes, kredītkartes utt.) vai metāla priekšmetus. Daži mobilo tālrunu vāciņi var pasliktināt uzlādes veiktspēju.

4 Tīrīšana un apkope




4.1 Tīrīšanas un apkopes drošības noteikumi

BĪSTAMI!



Visa ierīce ir pakļauta elektriskam spriegumam
Risks gūt elektriskās strāvas triecienu un apdegumus.

- Pirms darbu uzsākšanas atslēdziet visu spriegumu vadošās līnijās un vadus.
- Nodrošiniet, lai atslēgtie vadi un līnijas netiktu nejauši pieslēgti no jauna.
- Pārbaudiet, vai ierīce vairs nav pakļauta spriegumam.
- Visiem darbiem un elektrības pieslēgumiem ir jāatbilst attiecīgā operatora valsts tiesību aktiem (piemēram, Vācijā - VDE noteikumi (Vācijas elektrotehniķu apvienības noteikumi)), un tos ir jāveic atbilstoši apmācītam speciālistu personālam.

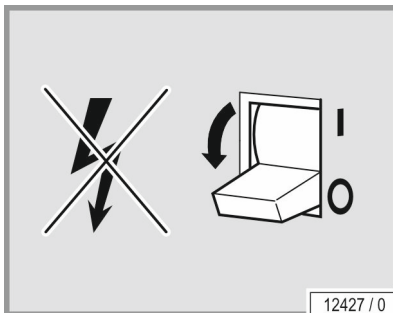

12427 / 0

Ja ierīcei paredzēts veikt apkopes vai tīrīšanas darbus, tai ir jābūt atslēgtai no elektrības. Tas nozīmē, ka jābūt izslēgtām un atslēgtām visām spriegumu vadošām līnijām un vadiem.

Nav pietiekami, ja izslēdz tikai ierīci, jo noteiktās vietās var rasties spriegums. Tādēļ šādu darbu veikšanas gadījumā noteikti ir jāizslēdz drošinātāji un, ja iespējams, tie arī jāizņem.

Nesankcionēta atkārtota ieslēgšana var izsaukt smagus nelaimes gadījumus. Pēc izslēgšanas visus slēdzus vai drošinātājus ir jānodrošina pret atkārtotu ieslēgšanu.

- Drošinātāju kaste ir jānoslēdz ar slēdzeni.


Gadījumā, ja automātiskos drošinātājus nav iespējams izskrūvēt, virs darba sviras var uzlīmēt uzlīmi "Neieslēgt! Pastāv apdraudējums!"

Vienmēr ir stabili jāizvieto aizlieguma izkārtne ar uzrakstu:

"Norit darbi!"

"Vieta:"

"Izkārtņi drīkst noņemt tikai"

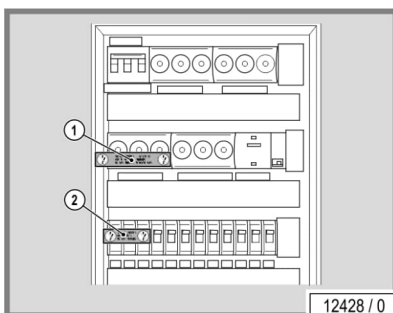

12428 / 0



4.2 Traucējumi

Lai varētu vieglāk konstatēt kļūdu cēloni, ekrānā uzrādās kļūdu kodi:

- Traucējuma gadījumā displejā parādās kļūdas kods.
- Gadījumā, ja ir vairākas kļūdas, ziņojumi ekrānā uzrādās pārmaiņus.
- Kļūdas novēršana tiek apstiprināta, nospiežot START/STOP taustiņu.
- Ja kļūdu nav iespējams novērst, ir jāinformē klientu serviss - skat. 2. lpp.

Detalizētāku informāciju ar kļūdu aprakstiem un risinājumiem varat izlasīt "Kļūdu kodos" (pasūtījuma Nr. 1028225-..).

4.3 Tīrīšana

 **BĪSTAMI!**



Saskares ar ādu rezultātā var tikt pārnēsātas infekcijas!

Pēc katras sauļošanās reizes jādezinficē visus priekšmetus un ierīces detaļas, kas sauļošanās laikā ir nonākušas saskarē ar lietotāju:

- Plāksne gulēšanai
- Rokturi un vadības pults
- Aizsargbrilles
- Regulējamās ventilācijas sprauslas

Ātrai un pamatīgai dezinfekcijai mēs iesakām izmantot piemērotu ātru virsmas dezinfekcijas tīrīšanas līdzekli.



NORĀDES:

- Pilnīgai dezinficēšanai nepieciešams ievērot iedarbības laiku. Ievērojiet ražotāja lietošanas instrukcijas norādes.
- Pēc noteiktā iedarbības laika notīriet visus atlikušos tīrīšanas/dezinfekcijas līdzekļa atlikumus.
- Šim nolūkam izmantojiet mīkstus un tīrus vienreiz lietojamus papīra dvieļus.
- Veiciet vizuālu pārbaudi. Atkārtojiet tīrīšanas procesu, ja konstatējat netīras vietas vai tīrīšanas/dezinfekcijas līdzekļa atliekas.
- Veiciet papildu vizuālu pārbaudi.

4.3.1 Virsmu tīrīšana

Akrila plākšņu virsma



 **UZMANĪBU!**




Neslaucīt sausu – var saskrāpēt!

Noteikumu neievērošanas gadījumā garantijas tiesības vairs nav spēkā.

- Lai ātri un higiēniski notīrītu akrila stikla virsmas, izmantojiet tikai ātru virsmu dezinfekcijas tīrīšanas līdzekli akrila stikliem.
- Tīrīšanai nekādā gadījumā nedrīkst lietot dezinfekcijas un šķīdināšanas līdzekļus (piem., Lysoform, etilalkoholu vai citus alkoholu saturošus šķidrumus).

Akrila stikla plāksnes top neizmantojamas, ja nosmērētas!

- Rūpīgi notīriet pirkstu nospiedumus, tīrīšanas līdzekļa atlikumus un citus netīrumus.

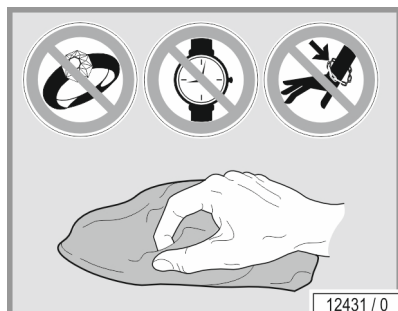

Plastmasas virsmas

Krāsotu un nekrāsotu plastmasas virsmu tīrīšanai vislabāk izmantot tikai siltu ūdeni un ādas drānu. Nekādā gadījumā nelietojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu vai ēteriskās eļļas. Tā rezultātā rodas bojājumi, uz kuriem neattiecas garantijas prasības.

Tīrīšanas laikā ir sagaidāma neliela ādas auduma melna iekrāsošanās, ko rada gumijas blīvējumi; tas ir saistīts ar ražošanas procesu. Izvairieties no akrila stikla un plastmasas virsmu bojājumiem.

- Pirms tīrīšanas darbu sākšanas noņemiet gredzenus, rokas pulksteņus, rokassprādzes utt.

4.3.2 Lampas

Lampas vajadzības gadījumā varat notīrīt ar mitru lupatu, neizmantojot tīrīšanas līdzekļus.



4.3.3 SPECTRA LED Boards

UZMANĪBU!



SPECTRA LED Boards ir ļoti jutīgas optiskas sastāvdaļas.


Saskrāpēšanas risks!

Noteikumu neievērošanas gadījumā garantijas tiesības vairs nav spēkā.



- Netīriet mehāniski vai ar mitru drānu!
- Neapsmidziniet!
- Netīriet un neberziet!
- Nelietojiet putekļu sūcēju!
- Putekļu notīrīšanai izmantojiet sausu un tīru mikrošķiedras drānu.
- SPECTRA LED Boards izmantojiet tikai mikrošķiedras drānu!
- Mazgājiet izmantoto mikrošķiedras drānu saskaņā ar drānai paredzētajiem mazgāšanas norādījumiem.
- Neievietojiet mikrošķiedras drānu tieši atstarotāja ligzdās. Saskrāpēšanas risks!
- Viegli ar otu notīriet atstarotāja virsmu, nespiediet!
- Ja nepieciešama SPECTRA LED Boards mehāniska tīrīšana, pirms tīrīšanas sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu - skatiet 2. lappusi.

4.4 Tīrīšanas plāns

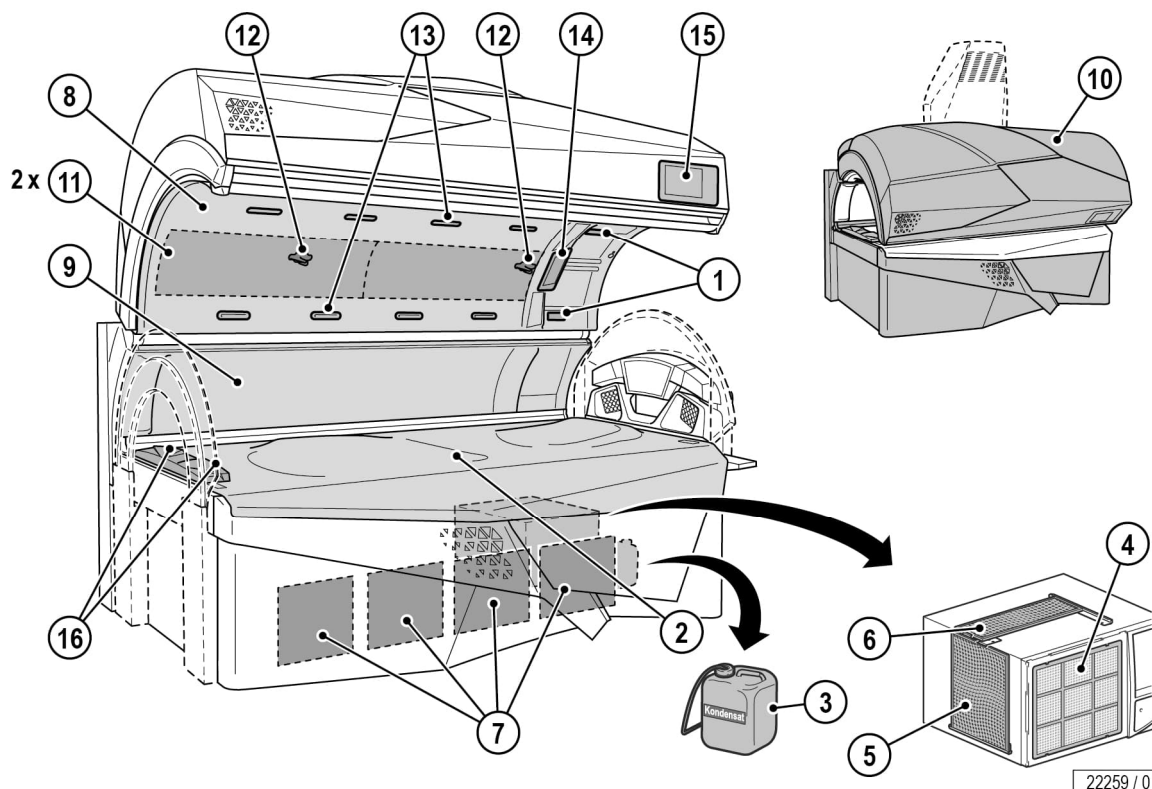

22259 / 0

Detaļa		Intervāls		Darbība	Skat. lpp.	
		Pēc katras saules saulēšanas reizes	Pēc vajadzības			
			50 h			
1	Regulējamas ventilācijas sprauslas/ AROMA	X		Noīrīt un dezinficēt	54	
2	Plāksne gulēšanai	X		Noīrīt un dezinficēt	55	
3	Kondensāta tvertne		X	Iztukšot	76	
4	Filtra plāksne		X	Noīrīt	76	
5, 6	Filtrs			X	Izņemiet filtru un notīriet	76
7	Filtrs			X	Izņemiet filtru un notīriet	74
8, 9, 10	Virsmas		X		Noīrīt	55
11	Filtru plāksnes		X	X	Noīrīt	75
12	Sprauslas AQUA / AROMA SYSTEM		X		Noīrīt	54
13	Ventilācijas sprauslas ķermeņa dzesēšanai		X		Noīrīt	54



Detaļa		Intervāls		Darbība	Skat. lpp.
		Pēc katras sauļošanās reizes	Pēc vajadzības	50 h	
14	INTERIOR DISPLAY	X		Notīrīt un dezinficēt	54
15	EXTERIOR DISPLAY	X		Notīrīt un dezinficēt	54
16	Gaisa sprauslas / ķermeņa atdzesēšana / kāju zona		X	Notīrīt	54
	Aizsargbrilles	X		Notīrīt un dezinficēt	54

**NORĀDE:**

Ja PROFESSIONAL SETUP MANAGER PLUS ir aktivizēts tīrīšanas režīms un ierīces ventilatora darbības laiks ir beidzies, pēc katras sauļošanās tīrīšana jāapstiprina, nospiežot START/STOP taustiņu.

4.5 Apkope

Tehniskā apkope un kopšana ir būtiski nosacījumi, lai ierīce varētu īstenot noteiktās prasības. Tādēļ ir ļoti būtiski ievērot tehniskās apkopes intervālus un rūpīgi veikt tehnisko apkopi un kopšanu.

Aktuālo nostrādāto stundu skaitu detaļām, kurām veicama tehniskā apkope, var uzzināt ražotāja iestatījumu režīmā (skatiet 'PROFESSIONAL SETUP MANAGER PLUS', pasūtījuma Nr. 1020179-..).

Vēlamies norādīt, ka atbilstoša stāvokļa saglabāšanas nolūkos ierīci ik pēc 12 mēnešiem (skaitot no ekspluatācijas uzsākšanas) atkārtoti ir jāpārbauda mūsu klientu servisam vai autorizētam specializētam uzņēmumam!

Veiktās pārbaudes un apkopes ir jāieraksta ierīces, ekspluatācijas un servisa grāmatiņā (Pasūt. nr. 1010932-..).

4.5.1 Akрила stikla plāksne gulēšanai

UZMANĪBU!



Uz virsmas var veidoties plaisas kosmētikas līdzekļu dēļ!

Pie ilgstošas izmantošanas kosmētikas līdzekļi un aizsarglīdzekļi pret saules apdegumu var radīt bojājumus (piemēram, plaisas uz virsmas).

- Ievērojiet, lai pirms sauļošanās būtu noņemti visi kosmētikas līdzekļi un pretapdeguma līdzekļi.

Akrila stiklu virsmas ir izgatavotas no akrila stikla, kas īpaši izstrādātas šai pielietojuma jomai. Izmantotos akrilus raksturo īpaši augsta gaismas caurlaidība un izturība, viegli kopjamas, higiēniskas un ādai draudzīgas virsmas.

Tehniski sarežģītā ražošanas procesā akrila stikla plāksnēm tiek piešķirta ierīcei specifiska forma. Neraugoties uz visaugstāko ražošanas kompetences līmeni, akrila plāksnēm neizbēgami var būt vairāki nelieli plankumi, ieslēgumi vai svītras. Turklāt ekspluatācijas laikā gulēšanas virsmā var rasties plaisas.

Šīs parādības ir neizbēgamas materiāla un apstrādes tehnoloģijas dēļ, taču tās būtiski neietekmē lietošanas lietderību, tāpēc tās nevar atzīt par defektu.

Akrila stikla plāksnes ar laiku lietošanas rezultātā kļūst aizvien vairāk laiž cauri gaismu un tādēļ klientu servisam to ir regulāri jānomaina.

4.6 REMOTE SERVICE (opcija)

Kā studijas īpašniekam jums ir iespēja piekļūt savai Prestige Fusion Edge, izmantojot REMOTE SERVICE. Varat iegūt informāciju par ierīci, piemēram, darba stundas, un veikt ierīces konfigurāciju attālināti. Servisa gadījumā tehniskais dienests tiešsaistē var veikt attālinātu diagnostiku, izmantojot REMOTE SERVICE.



NORĀDE:

Papildu informāciju par reģistrāciju un lietošanu, kā arī REMOTE SERVICE lietotāja rokasgrāmatu (pasūtījuma Nr. 1019772-..) varat atrast Globalservice mājas lapā: www.jk-globalservice.de.




4.7 Apkopes plāns

UZMANĪBU!



Izmantojiet tikai tā paša tipa oriģinālās rezerves detaļas! Citu detaļu izmantošanas gadījumā ierīce vairs neatbilst atbilstības deklarācijai un to vairs nav atļauts darbināt, ekspluatēt!

Bojājumu gadījumos, kas saasaņā ar pierādījumiem radušies neoriģinālo rezerves detaļu izmantošanas rezultātā, ražotājs neuzņemas atbildību.

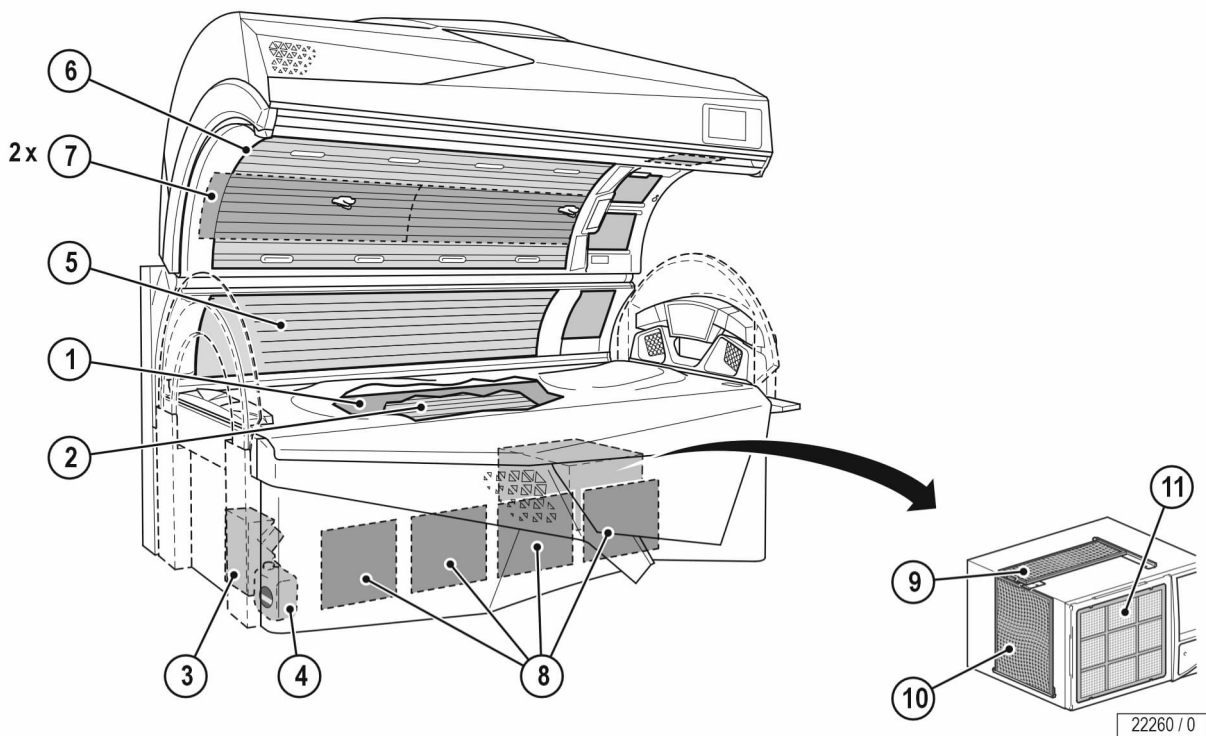

Detaja	Intervāls	Darbība	Skat. lpp.
	Pēc vajadzības		
	300 darba stundas		
	1000 darba stundas		
	3000 darba stundas / 2 gadi		
1 Starplāksne		X	Nomainīt 64
2 Zema spiediena spuldzes, apakšdaļa		X	Nomainīt 71
4 AROMA tvertne	X		Nomainīt 80
5 Zema spiediena spuldzes, sānu daļa		X	Nomainīt 72

Detaļa	Intervāls				Darbība	Skat. lpp.
	Pēc vajadzības	300 darba stundas	1000 darba stundas	3000 darba stundas / 2 gadi		
3 AQUA SYSTEM	X				Nomainīt	80
6 Zema spiediena spuldzes, augšdaļa			X		Nomainīt	73
7 Filtra plāksne			X		Nomainīt	75
8 Filtrs				X	Nomainīt	74
9 Filtrs				X	Nomainīt	76
10 Filtrs				X	Nomainīt	76
11 Filtra plāksne				X	Nomainīt	76





Tehnisko apkopi atļauts veikt tikai autorizētiem, apmācītiem un kvalificētiem darbiniekiem!

 **UZMANĪBU!**



Apdraudējums cilvēkiem, ja netiek veikti apkopes darbi!

Ja apkopes darbi netiek veikti, var rasties materiālie bojājumi un traumas!

- Apkopes darbus drīkst veikt tikai pilnvaroti, apmācīti speciālisti, kuri ir pilnvaroti, apmācīti un kvalificēti uzņēmuma JK-International GmbH nodaļa JK-Global Service!
- Par apkopes intervālu ievērošanu ir atbildīgs operators!

Tehniskās apkopes darbus atbilstoši pārbaudes punktu sarakstam 1019858-.. jāveic ražotāja servisa tehniķim vai personai, kuru ražotājs ir autorizējis, apmācījis un kvalificējis.

Pārbaudes punktu sarakstā 1019858-.. ir jāieraksta un jāapstiprina atbilstoši norādījumiem veiktos tehniskās apkopes darbus.

Tehniskās apkopes darbu veicami šādos intervālos:

- Pēc 1500 darba stundām
- Ik gadu vai ik pēc 2000 darba stundām, atkarībā no tā, kurš no kritērijiem iestājas pirmais
- Pēc 3000 darba stundām
- Pēc 5000 darba stundām
- Pēc 10 gadiem vai ik pēc 20 000 darba stundām, atkarībā no tā, kurš no kritērijiem iestājas pirmais.

Ja, vadoties pēc ražošanas datuma, ierīce ir sasniegusi 10 gadu vecumu, ierīces stāvokli nepieciešams novērtēt sertificētam JK-International GmbH servisa tehniķim, JK-Global Service nodaļā. Tikai pēc novērtēšanas atļauts turpināt izmantot ierīci.


Ja netiks veikta ierīces novērtēšana, iespējami materiāli bojājumi vai personu savainošanās.

Ražotājs neuzņemas jebkādu atbildību, ja ierīce ir 10 gadus veca, skatot no ražošanas datuma, un lietotājs to ir turpinājis izmantot, neveicot stāvokļa novērtēšanu.


4.8 Sagatavošana tehniskās apkopes un tīrīšanas darbu vajadzībām



4.8.1 Piederumu komplekts

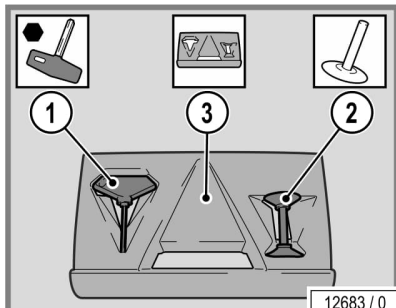


1. Sešskaldņu uzgriežņu atslēga
2. Piesūcekņi akrila stikla plāksnei un augšējās daļas plāksne
3. Iekāpšanas zonas aizsardzība pret skrāpējumiem (augšējās daļas plāksnes novietošanas polsteris)

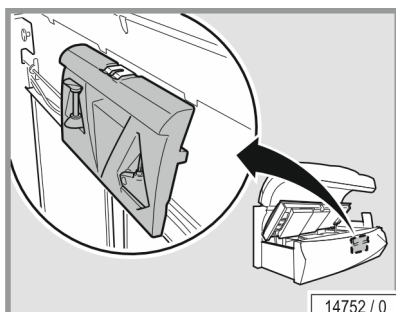


Piederumu komplekts ir novietots pie priekšējā noslēgta iekšpuses.


- Atveriet vānu: sk. 66. lpp.

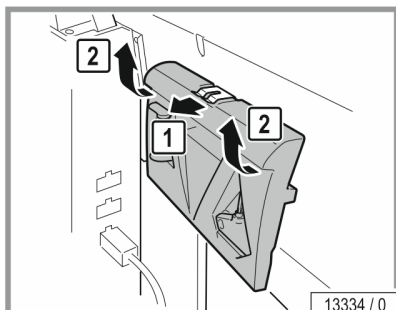

- Izņemiet piederumu komplektu no turētāja.

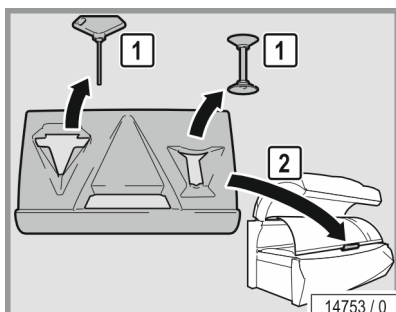


- Izņemiet sešskaldņu uzgriežņu atslēgu un piesūcekņi.

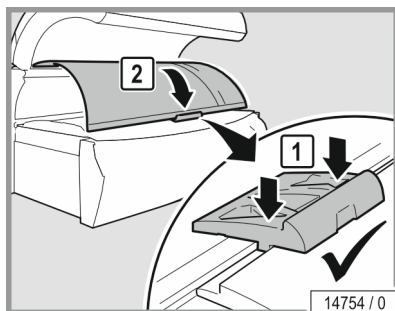


- Augšējās daļas plāksnes atvēršanas gadījumā izmantojiet polsteri, lai tiktu izmantots aizsargs pret saskrāpēšanu.


4.8.2 Plāksnes gulēšanai uzstādīšana un starpplāksnes izņemšana

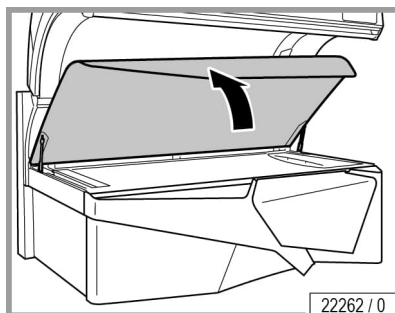


- Paceliet gulēšanas virsmu līdz atdurim. Gulēšanas virsma tiek turēta automātiski.

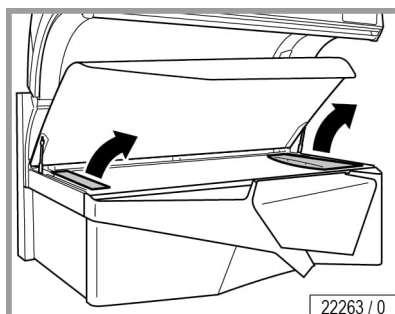

- Noņemiet lampu pārsegu kāju un galvas daļā.

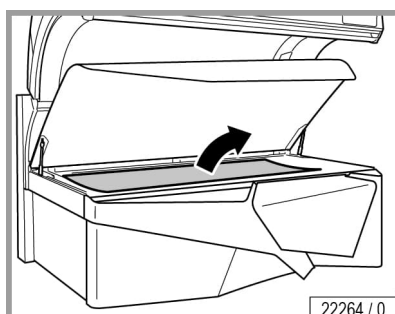


- Ar piesūcekni pacelt starpplāksni.
- Izņemiet starpplāksni.

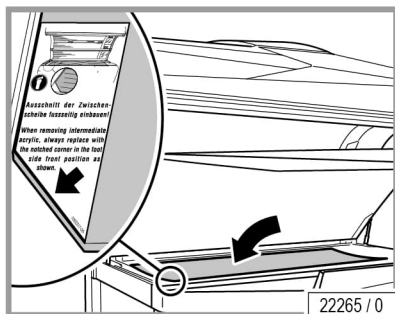

Montāža norit pretējā secībā.


Montāžas laikā ievērojiet:

- Ievietojot starpplāksni, nodrošiniet, lai atvere atrastos kāju daļā.

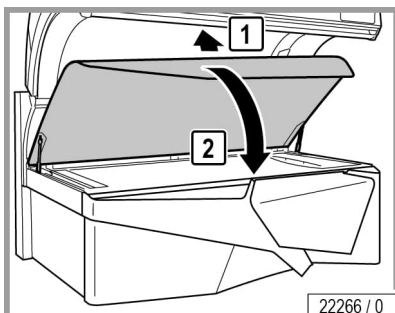


- Vispirms nedaudz paceliet plāksni gulēšanai un pēc tam aizveriet to.


4.8.3 Augšējās daļas plāksnes noņemšana

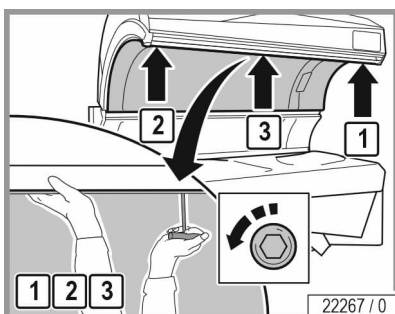

- Pagrieziet slēgšanas mehānismus par 90°: vispirms ārpusē, tad vidū.
- Ar vienu roku atbalstiet augšējās daļas plāksni, lai tā nenokristu.

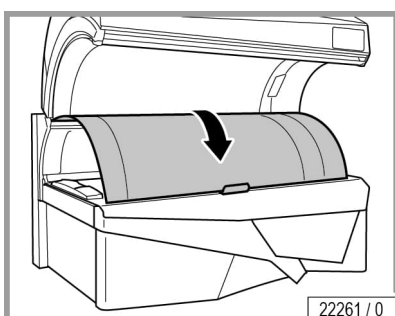

- Plāksni uzmanīgi novietojiet uz aizsargs pret saskrāpēšanu aprīkojuma (piederumu komplekts).

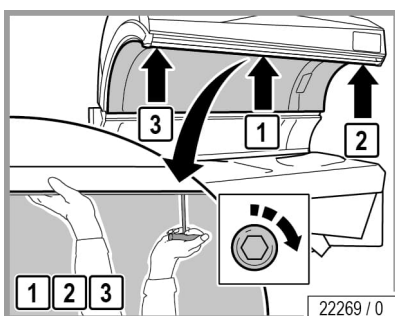



Montāža norit pretējā secībā.

Montāžas laikā ievērojiet:


- Ar vienu roku atbalstiet augšējās daļas plāksni, lai tā nenokristu.
- Atkārtoti aizveriet slēgšanas mehānismus: vispirms vidū, pēc tam ārpusē.

4.8.4 Sānu daļas stikla noņemšana

- Pagrieziet slēgšanas mehānismus par 90°.

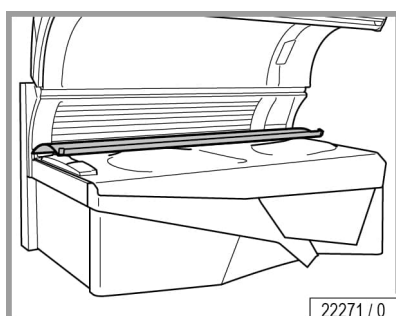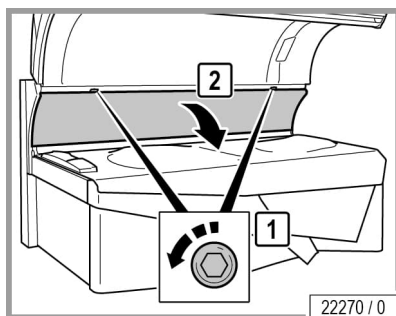

- Atveriet stiklu un to rūpīgi nolieciet malā.

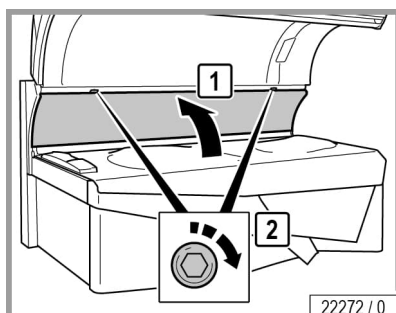



Montāžas laikā ievērojiet:

- Atkārtoti aizveriet slēgšanas mehānismus.


4.8.5 Vannas atvēršana

- Ievietojiet vannas āķi atverē un iekariniet to bloķēšanas stienī.

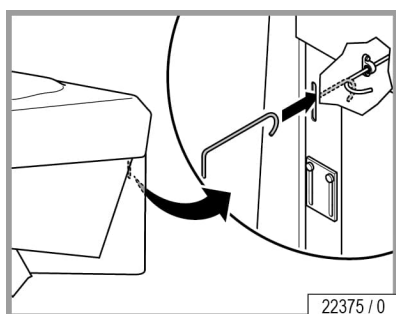


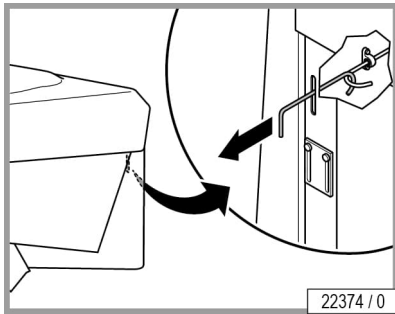


- Izvelciet vannas āķi.
- Viegli nospiediet vannu uz leju

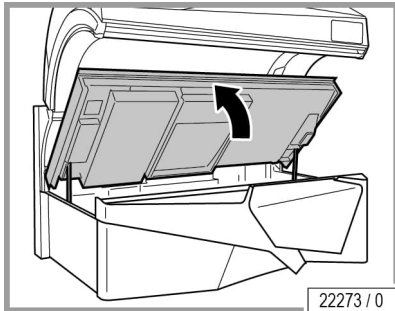

Vanna atvērsies patstāvīgi.

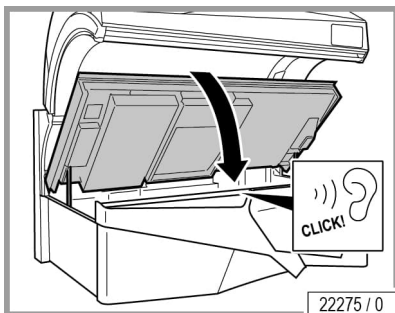

- Aizveriet vannu. Vannai dzirdami jānofiksējas.

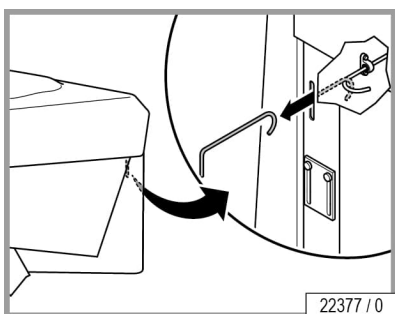

- Izņemiet vannas āķi no atveres.



4.9 Norādes lampu nomaiņai

BĪSTAMI!



Karstas lampas un virsmas var izraisīt apdegumus! Veicot lampu nomaiņu, iespējami pirkstu un roku apdegumi.

- Pirms apkopes darbu veikšanas ļaujiet ierīcei atdzist.



NORĀDE:

Ja lampas stikls saplīst, var izdalīties neliels dzīvsudraba daudzums! Lūdzu, ņemiet vērā šādas norādes:

- Nekavējoties atvienojiet ierīci no elektriskās strāvas.
- Bērniem nekavējoties jāiziet no telpas.
- Vēdiniet telpu vismaz 15 minūtes.
- Uzvelciet vienreiz lietojamus cimdus.
- Pie atvērta loga: Utilizējiet lauskas un izplūdušo dzīvsudrabu noslēdzamā tvertnē.
- Nogādājiet tvertni lietoto lampu savākšanas vietā.

4.9.1 NFC: Lampu nomaiņa

Katrs jauns lampu komplekts jāaktivizē, izmantojot pievienoto NFC lampas karti. Katru NFC lampas karti var izmantot tikai vienu reizi, pēc tam tā ir nederīga.

Vispirms jāuzstāda lampu komplekts, pēc tam lampas jāaktivizē ar NFC lampas karti. Šim nolūkam jāveic darba stundu atiestate.

Darba stundu atiestate



NORĀDE:

Lai atiestatītu lampu darbības stundas, nepieciešama piekļuve PROFESSIONAL SETUP MANAGER PLUS.

- Atveriet PROFESSIONAL SETUP MANAGER PLUS.
- Aktivizējiet izvēlnē DARBA STUNDAS.





- Turiet NFC lampas karti pie NFC punkta.



NFC punkta vidus ir zaļā krāsā:
lampas darba stundas ir atiestatītas uz 0.



NORĀDE:

Jāaktivizē abas NFC lampas kartes. Turiet A tipa lampu komplekta NFC lampas karti un B tipa lampu komplekta NFC lampas karti vienu pēc otras pie NFC punkta.


4.9.2 Zema spiediena lampas

BĪSTAMI!




Karstas lampas un virsmas var izraisīt apdegumus!
Veicot lampu nomaiņu, iespējami pirkstu un roku apdegumi.

- Pirms apkopes darbu veikšanas ļaujiet ierīcei atdzist.

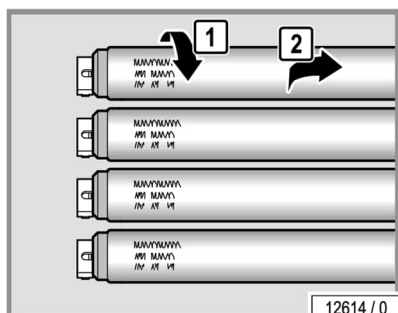

- Bojātas zemspiediena lampas nekavējoties jānomaina.
- Pēc norādītā kalpošanas laika beigām noteikti ir jānomaina viss lampu komplekts.
- Pagrieziet par 90° un uzmanīgi izņemiet no ietvariem.

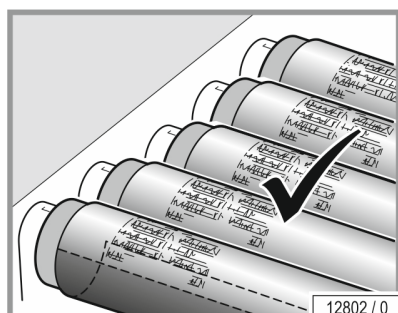


- Zemspiediena lampām ir atstarotāji, kas mērķtiecīgi novirza gaismu uz āru.
- Lampas jāievieto tā, lai atstarotāja aizmugurējā daļa atrastos ierīces iekšpusē.

BĪSTAMI!




Ugunsgrēka risks nepareizi novietotu lampu dēļ!
Nepareizi novietotas lampas rada nestabilus kontaktus. Tas var izraisīt pārkaršanu un dzirksteļu veidošanos.


- Pārbaudiet, vai pamatne ir pareizi novietota!

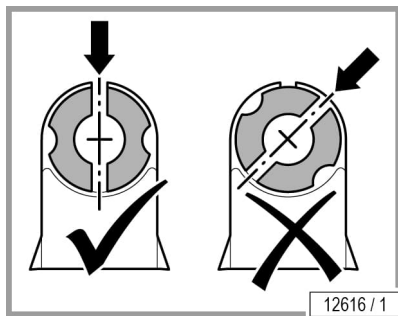


- Pirms jaunas lampas ievietošanas jāpārbauda pamatnes iekšējās daļas novietojums.

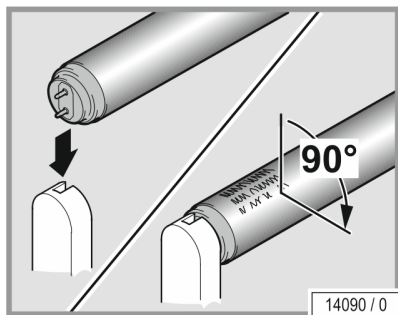

- Lampu kontaktdakšas ievietojiet pamatnē vertikāli no augšas.
- Lai nodrošinātu pareizu kontaktu, lampa jāpagriež par 90° ap savu asi.
- Uzraksts jānovieto uz āru (t. i., uz sauļošanās telpu vai lietotāju).

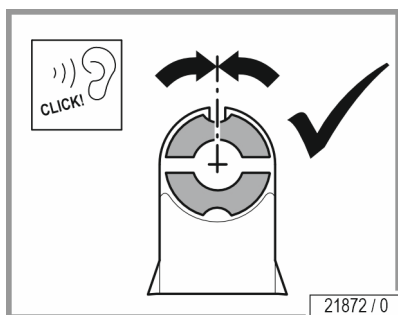


4.10 Lampu tīrīšana vai nomaiņa apakšdaļā

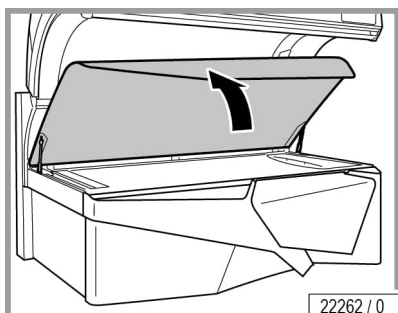

- Paceliet plāksni gulēšanai, demontējiet lampu pārsegus un starpplāksni: sk. 64. lpp.


Lampu nomaiņa: sk. 69. lpp.

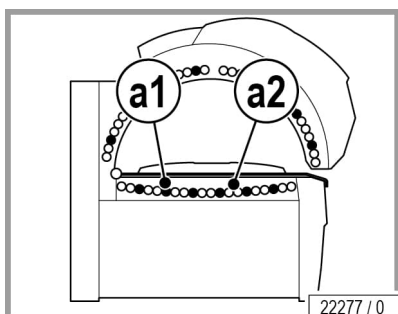

- Ievērot SMART SUN lampu un UV zema spiediena spuldzes secību.

a1: UV zema spiediena spuldzes

a2: SMART SUN-Zema spiediena spuldzes

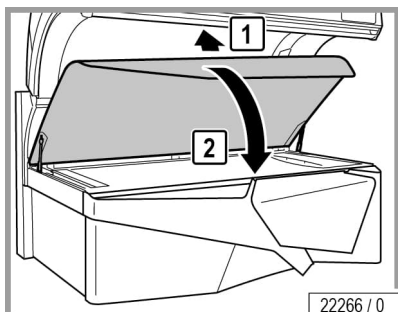


Montāža norit pretējā secībā.

Montāžas laikā ievērojiet:


- Ievietojot starpplāksni, nodrošiniet, lai atvere atrastos kāju daļā.
- Vispirms nedaudz paceliet plāksni gulēšanai un pēc tam aizveriet to.




4.11 Lampu tīrīšana vai nomaiņa sānu daļā

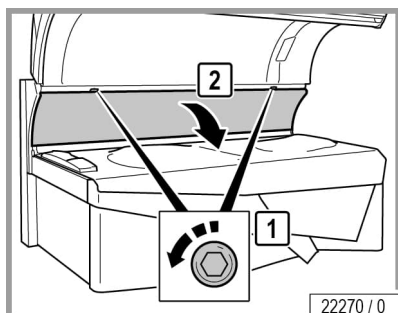


- Sānu daļas stikla noņemšana: sk. 66. lpp.

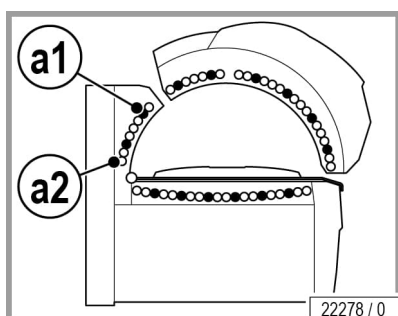

- Ievērot SMART SUN lampu un UV zema spiediena spuldzes secību.
a1: UV zema spiediena spuldzes
a2: SMART SUN-Zema spiediena spuldzes

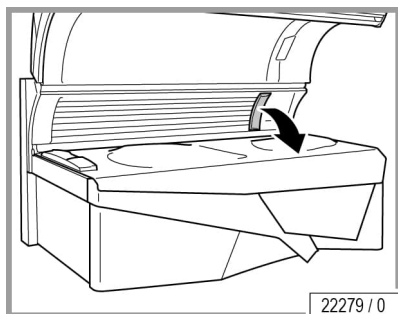


- Noņemiet lampu pārsegu.
Lampu nomaiņa:
Zemspiediena lampas: skatiet 69 lpp.

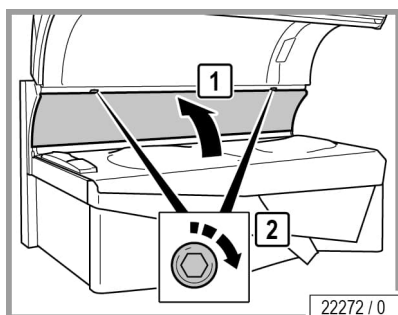


- Montāžas laikā ievērojiet:
- Atkārtoti aizveriet slēgšanas mehānismus.

4.12 Lampu tīrīšana vai nomaiņa augšējā daļā

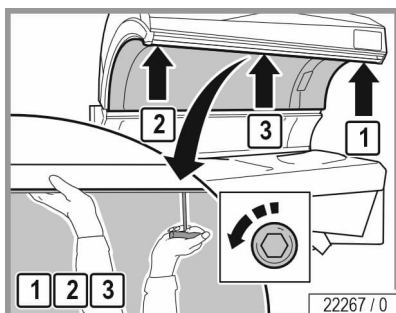

Augšējā daļā atrodas šādas apkopes plāna sastāvdaļas:


- 1,80 m zemspiediena lampas

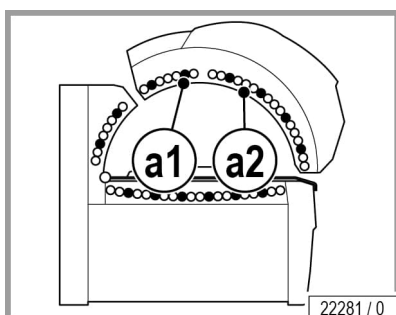


- Ievērot SMART SUN lampu un UV zema spiediena spuldzes secību.

a1: UV zema spiediena spuldzes

a2: SMART SUN-Zema spiediena spuldzes

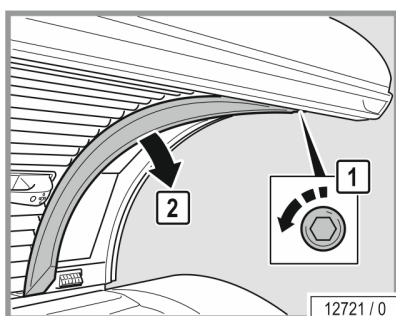

- Izskrūvējiet skrūvi un uzmanīgi uzlieciet lampas pārsegu uz augšējās daļas plāksnes.

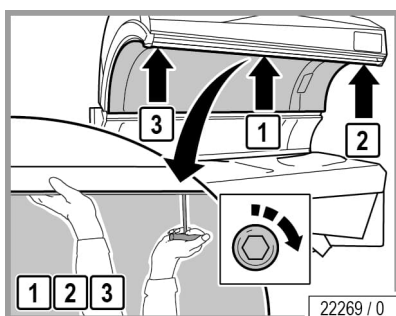


Montāža norit pretējā secībā.


Montāžas laikā ievērojiet:

- Ar vienu roku atbalstiet augšējās daļas plāksni, lai tā nenokristu.
- Atkārtoti aizveriet slēgšanas mehānismus: vispirms vidū, pēc tam ārpusē.


4.13 Apakšējās daļas filtra tīrīšana

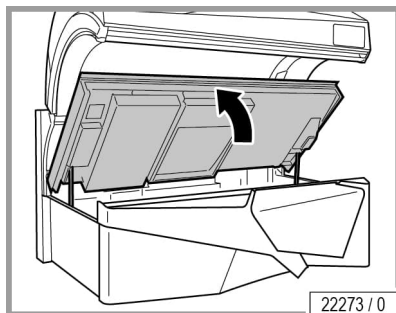

- Atveriet vannu: sk. 66. lpp.

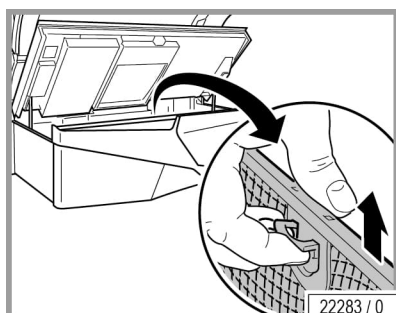


- Izņemiet filtru.

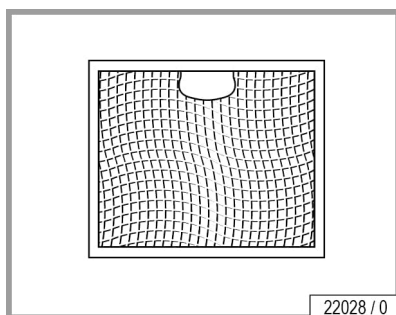

- Filtru jātīra sausā vai mitrā veidā.

Sausā tīrīšana: ar putekļusūcēju (atkarībā no piesārņojuma)
Mitrā tīrīšana: ar ūdeni un skalošanas līdzekli, arī trauku mazgājamo mašīnu

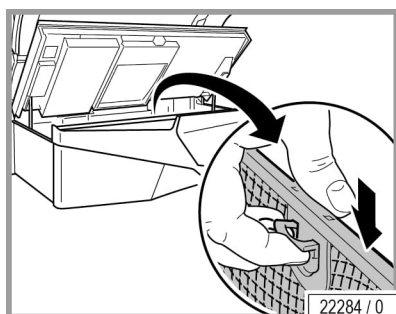


⚠ UZMANĪBU!



Mitruma ietekmē iespējami ierīces bojājumi!
Ievietojot atpakaļ, notīrītajiem filtriem ir jābūt sausiem.


- Tīrus un sausus filtrus atkal ievietojiet ierīcē.
- Aizveriet vannu. Vannai dzirdami jānofiksējas.

4.14 Augšējās daļas filtra plāksnes tīrīšana

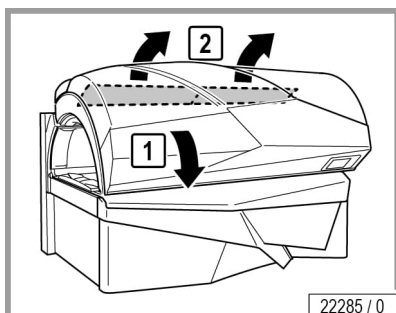

22285 / 0

- Ja nepieciešams nosedziet augšējo daļu, lai novērstu krāsas skrāpējumus.
- Izņemiet augšējās daļas aizmugurē esošās filtra plāksnes.

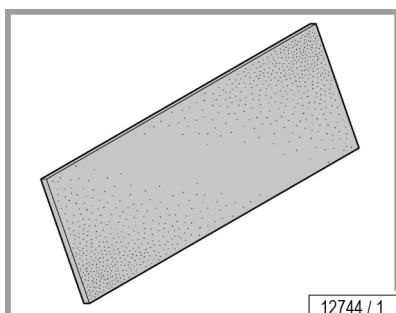


12744 / 1

- Veiciet sauso vai mitro tīrīšanu vai uzstādiet jaunas filtra plāksnes.

Sausā tīrīšana: ar putekļusūcēju (atkarībā no piesārņojuma)
Mitrā tīrīšana: ūdens un mazgāšanas līdzeklis

- Nemazgājiet trauku mazgājamajā iekārtā!

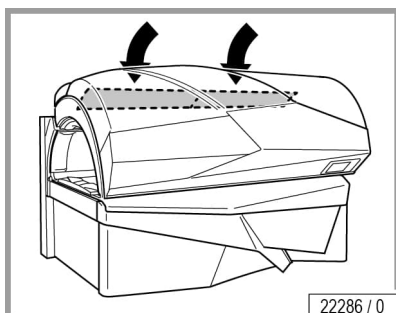

22286 / 0

! UZMANĪBU!



Mitruma ietekmē iespējami ierīces bojājumi!
Ievietojot atpakaļ, notīrītajiem filtriem ir jābūt sausiem.

- No jauna ievietojiet ierīcē tīras un sausas filtra plāksnes.



4.15 Klimata kontroles ierīce: Kondensāta tvertnes iztukšošana un filtra tīrīšana

UZMANĪBU!



Uzliesmojošs dzesēšanas šķidrums gaisa kondicionēšanas iekārtā!

Dzesēšanas šķidruma noplūde var izraisīt ugunsgrēku vai sprādzienu.

- Izvairieties no uzliesmošanas avotiem! Uguns, atklāta liesma un smēķēšana ir aizliegta.
- Neveiciet nekādus apkopes darbus uz dzesēšanas kontūra sastāvdaļām, piemēram, kompresoram, spiediena monitoram vai frekvences pārveidotājam.
- Ierīcei nedrīkst veikt lodēšanas un metināšanas darbus.



NORĀDE:

Uz filtra virsmām nedrīkst būt netīrumu. Regulāri tīriet filtrus saskaņā ar tīrīšanas plānu.



NORĀDE:


Gaisa kondicionētājs satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes. Neļaujiet gāzēm izplūst atmosfērā. Informācija par izmantotā aukstumaģenta tipu: šobrīd tiek lietoti aukstumaģenta tipi R32 (¹GWP: 675) ar uzpildes daudzumu 0,45 kg apmērā.




NORĀDE:

Aukstumaģenta veidu un daudzumu varat atrast gaisa kondicioniera tipa plāksnītē.


- Atveriet vānu: sk. 66. lpp.

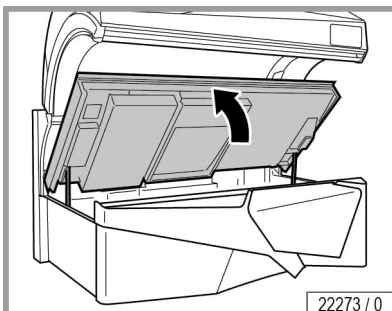


¹ GWP = global warming potential (globālās sasilšanas potenciāls)

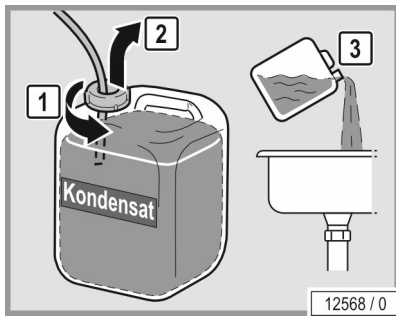


- Izvelciet kondensāta tvertni.
- Atvienojiet no kondensāta tvertnes šļūteni.
- Iztukšojiet kondensāta tvertni.

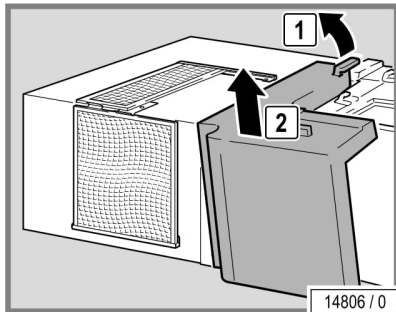

- Noņemiet pārsegu.

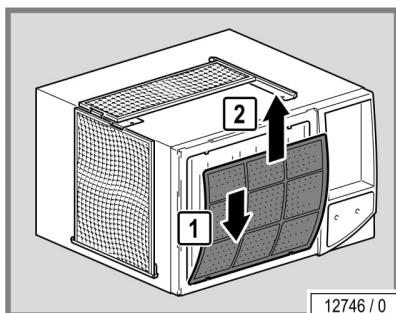


- Izņemiet filtru no turētāja.

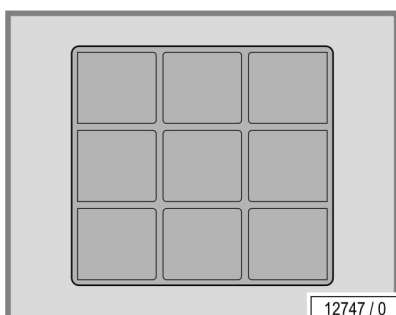


- Filtru jātīra sausā vai mitrā veidā.

Sausā tīrīšana: ar putekļusūcēju (atkarībā no piesārņojuma)
Mitrā tīrīšana: ūdens un mazgāšanas līdzeklis

- Nemazgājiet trauku mazgājamajā iekārtā!

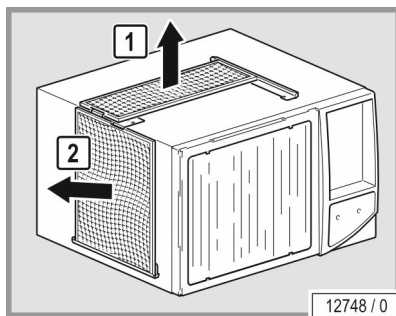


- Izņemiet filtru no turētāja.

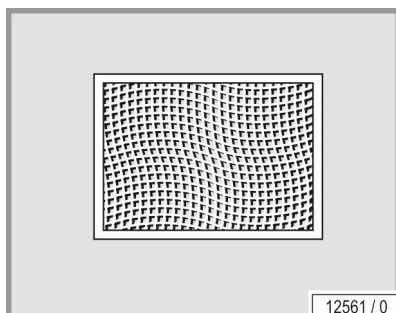


- Filtru jātīra sausā vai mitrā veidā.

Sausā tīrīšana: ar putekļusūcēju (atkarībā no piesārņojuma)
Mitrā tīrīšana: ar ūdeni un skalošanas līdzekli, arī trauku mazgājamu mašīnu

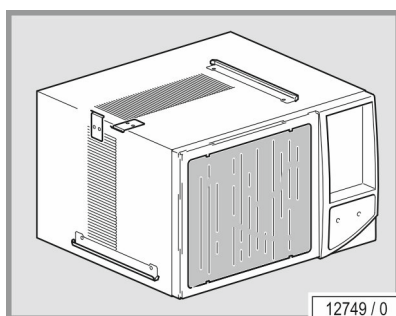

- Klimata kontroles ierīces dzesēšanas ribas ir jātīra ar plāksnīšu ķemmi.


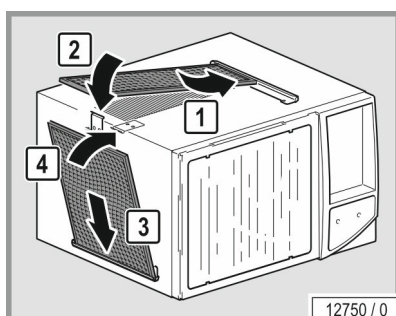


! UZMANĪBU!




Mitruma ietekmē iespējami ierīces bojājumi!
Ievietojot atpakaļ, notīrītajiem filtriem ir jābūt sausiem.

- Tīrus un sausus filtrus atkal ievietojiet ierīcē.
- Ievērojiet, lai filtri pareizi nokfiksētos turētājos.

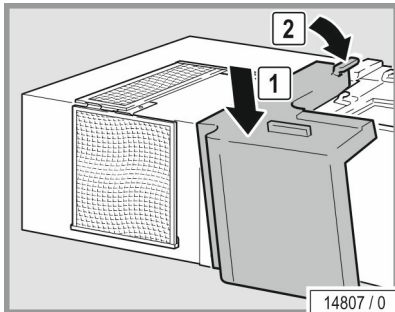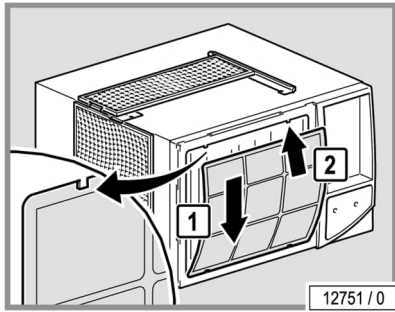

- Uzstādiet pārsegu.

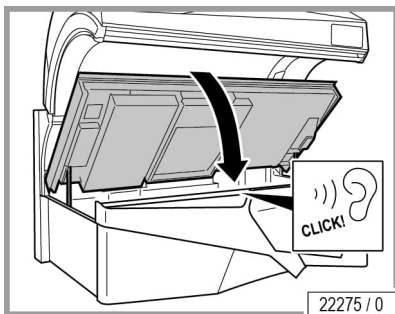

- Pieslēdziet kondensāta tvertnei šķūteni.
- Novietojiet kondensāta tvertni atpakaļ.
- Aizveriet vannu. Vannai dzirdami jānofiksējas.



4.16 AQUA / AROMA SYSTEM apkope

AQUA SYSTEM funkcijai ķermeņa dzesēšanai ierīces iekšpusē tiek izsmidzināts AQUA SOLAR WITH SKIN+ ADDITIVE (sk. "PRODUKT-INFORMATION AQUA SYSTEM", pasūt. Nr. 1011201-..).

! BĪSTAMI!



Bīstams Jūsu klientu veselībai!

Lietojot ierīci, ar baktērijām piesātināts ūdens var izsaukt ādas izsitumus un citas alerģiskas reakcijas!


- Tādēļ neiepildiet AQUA SYSTEM rezervuāros citus šķidrumus vai ūdensvada ūdeni.
- Nomainiet AQUA SYSTEM rezervuāru tikai ar oriģinālo rezervuāru.
- Atlikumu no veca rezervuāra neiepildiet jaunā rezervuārā!
- Transportējot un uzglabājot, lūdzam nepārsniegt norādīto augstāko temperatūru.
- Ievērojiet rezervuāra derīguma termiņu.

AQUA / AROMA SYSTEM arī smarža "RELAX", kura tiek izsmidzināta ar galvas sprauslas palīdzību.


Alternatīvi tiek piedāvāti papildu aromāti: Sīkāku informāciju varat saņemt uzņēmumā JK-International GmbH, nodaļā JK-Licht (sk. 2. lpp.).


4.16.1 AROMA rezervuāra nomaiņa

- Atveriet vanni: sk. 66. lpp.

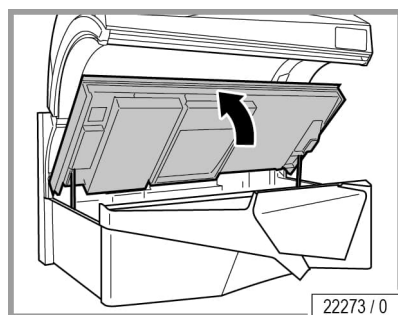


- Izņemiet AROMA rezervuāru.

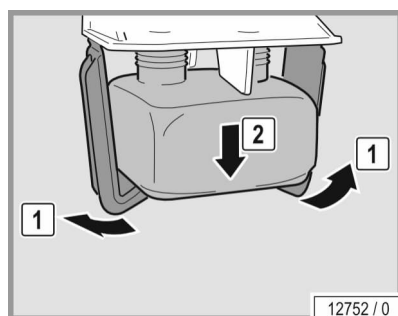

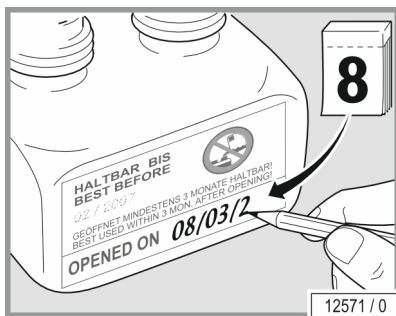


- Noskrūvējiet jaunā rezervuāra vāku.
- Uzrakstiet uz rezervuāra aktuālo datumu.

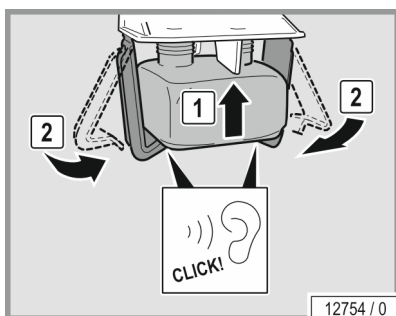


- Ievietojiet jauno rezervuāru stiprinājumā.
- Aizveriet vannu. Vannai dzirdami jānofiksējas.


4.16.2 AQUA SYSTEM rezervuāra nomaiņa

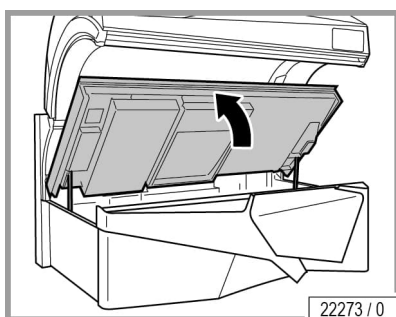


- Atveriet vannu: sk. 66. lpp.

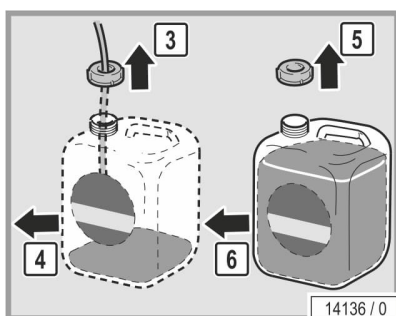

- Izņemiet rezervuāru.
- Noskrūvējiet jaunā rezervuāra vāku.
- Noņemiet no vecā rezervuāra vāku ar šļūteni.

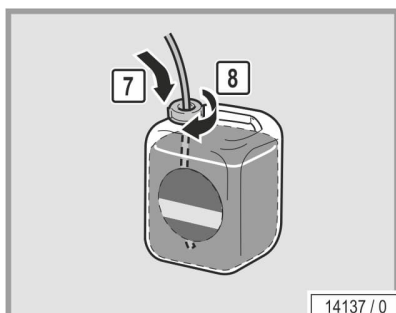

- Uzstādiet uz jaunā rezervuāra vāku ar šļūteni.
- Iebīdīet šļūteni tik tālu, lai tā saskartos ar rezervuāra grīdu.
- Ievietojiet rezervuāru ierīcē.
- Aizveriet vannu. Vannai dzirdami jānofiksējas.

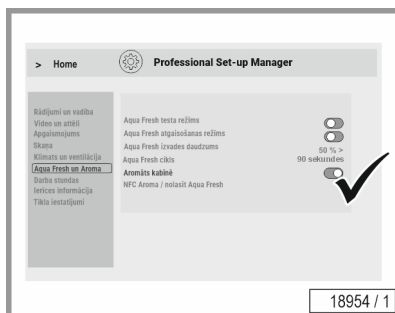


Atgaisošana



NORĀDE:

Lai veiktu atgaisošanu, jums ir nepieciešama pieeja PROFESSIONAL SETUP MANAGER PLUS.

- Atveriet PROFESSIONAL SETUP MANAGER PLUS.
- Izvēlnē AQUA FRESH & AROMA aktivizējiet uzpildes režīmu.

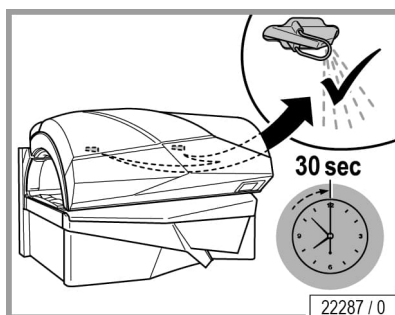

- Aizveriet augšējo daļu.

Sistēma 30 sekundes tiek atgaisota. Šajā laikā no sprauslām izplūst AQUA SYSTEM šķidrums.

- Noslēgumā pārbaudiet AQUA SYSTEM pārbaudes režīmā. Pārbaudes režīmā sprauslas darbojas 3 sekundes. Ja tās nedarbojas, atkārtojiet atgaisošanu.





5 Tehniskie parametri



5.1 Jauda, pieslēguma vērtības un trokšņu līmenis

Prestige Fusion Edge			
Nominālā patērējamā jauda ar Climatronic:			13600 W
Nominālā frekvence:			50 Hz
Nominālais spriegums:	400-415 V 3N~		230-240 V ~3
Nominālie drošinātāji:	3 x 35 A (inerts)		3 x 50 A (inerts)
Pieslēguma vads:	H05VV-F 5G 4 mm ² (Piegādes komplektācija)	vai	H05VV-F 4G 10 mm ²
Trokšņa līmenis 1 m attālumā no ierīces:			66,9 dB(A)
Trokšņa līmenis ierīcē:			<70 dB(A)
Guļamās virsmas:			max. 135 kg
Svars:			610 kg

5.2 Izmēri

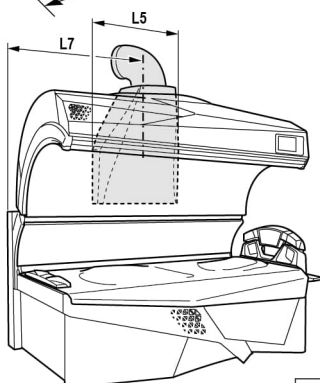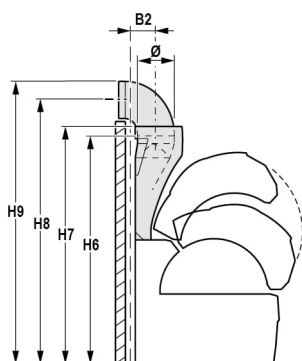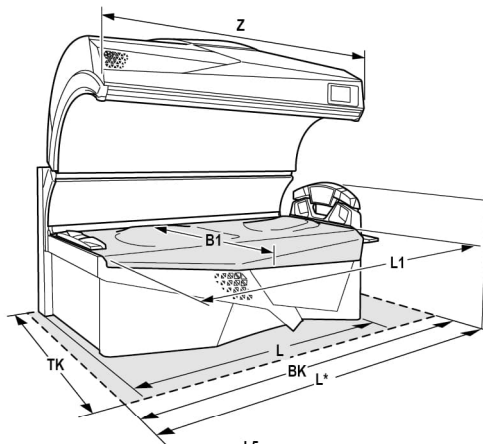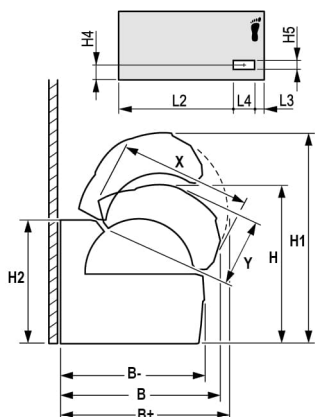

B + = 1555 mm	H5 = 100 mm
B = 1545 mm	H6 = 1873 mm
B - = 1495 mm	H7 = 2005 mm
B1 = 875 mm	H8 = 2219 mm
B2 = 225 mm	H9 = 2362 mm
L = 2247 mm	X = 1132 mm
L* = 2411 mm	Y = 785 mm
L1 = 2200 mm	Z = 2238 mm
L2 = 1767 mm	D = 300 mm
L3 = 235 mm	BK = 2500 mm
L4 = 245 mm	TK = 2300 mm
L5 = 645 mm	
L7 = 1120 mm	
H = 1540 mm	
H1 = 2055 mm	
H2 = 1108 mm	
H4 = 445 mm	

*(ar plecu sauļošanās ierīci un slēgtu slēgtais sauļošanās tuneli)

5.3 Lampu sastāvs


 UZMANĪBU!



Atbilstības deklarācija attiecas uz norādītajām lampām. Citu lampu izmantošanas gadījumā darbības licence vairs nav spēkā.


Turklāt lampām jābūt marķētām ar atbilstošu atbilstības kodu, sk. pielikumu lpp. 87.

5.3.1 Prestige Fusion Edge

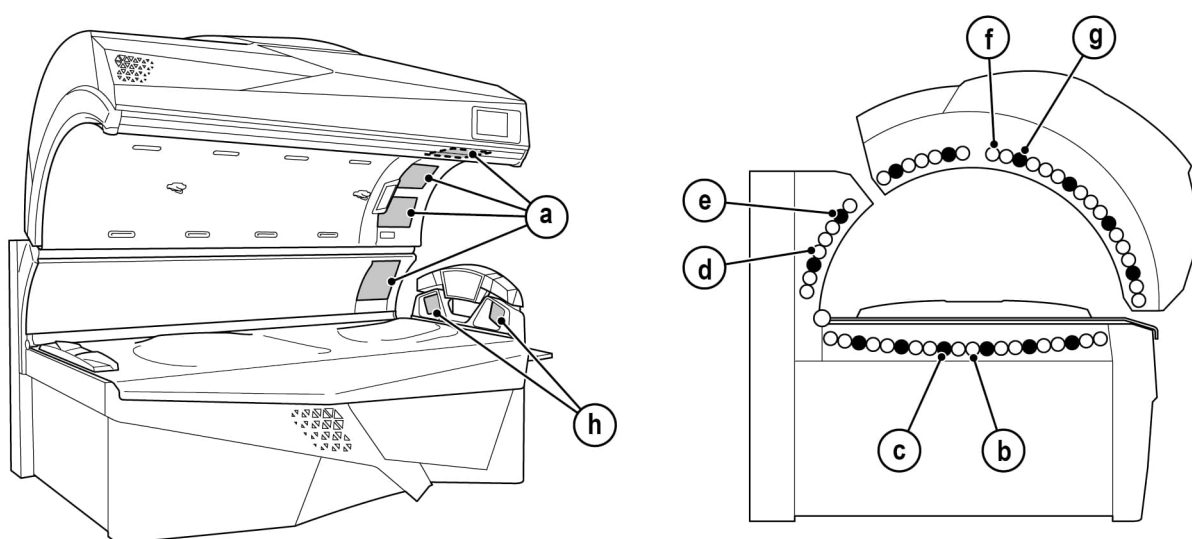


22543 / 0

Lampu aprīkojums

	Skaitis	Nosaukums	Garums	Jauda	Vadība	Pasūtījuma Nr.
a)	4	Ergoline UV-LED Board SPECTRA FUSION EDGE			Nav dilstošā detaļa 	1033763-..
b)	14	UV zema spiediena spuldzes ERGOLINE TREND ADVANCED 80-200 EP104 160W R	1,80 m	160 W	80-200 W	1511231-..
c)	6	Zema spiediena spuldzes SMART SUN R 28 80-200 160 W	1,80 m	160 W	80-200 W	1518419-..
d)	6	UV zema spiediena spuldzes ERGOLINE TREND ADVANCED 80-200 EP104 160W R	1,80 m	160 W	80-200 W	1511231-..
e)	2	Zema spiediena spuldzes SMART SUN R 28 80-200 160 W	1,80 m	160 W	80-200 W	1518419-..
f)	18	UV zema spiediena spuldzes ERGOLINE TREND ADVANCED 80-200 EP104 160W R	1,80 m	160 W	80-200 W	1511231-..
g)	6	Zema spiediena spuldzes SMART SUN R 28 80-200 160 W	1,80 m	160 W	80-200 W	1518419-..
h)	2	ERGOLINE UV-LED Board plecu saūļošanas ierīce			Nav dilstošā detaļa	1513795-..

5.4 Rezerves daļas un piederumi

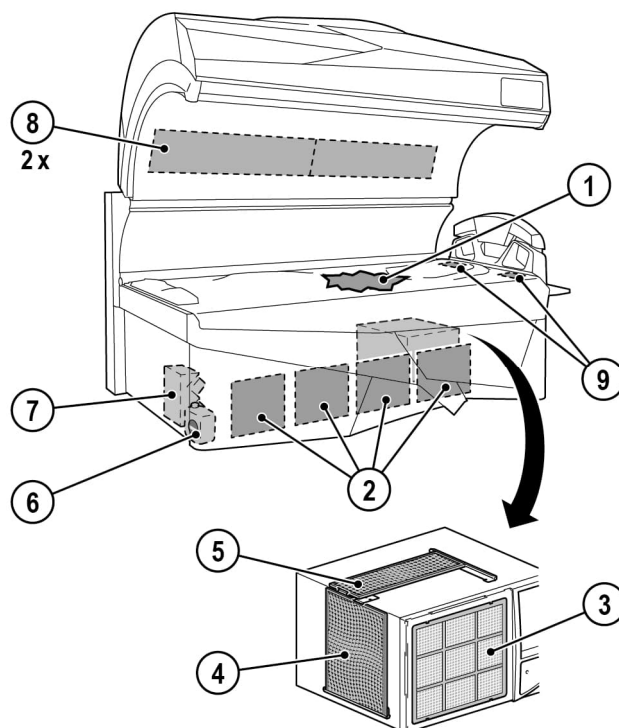

22290 / 0

Skaitis	Nosaukums	Pasūtījuma Nr.
1	1 Starpplāksne	1500339-..
2	4 Filtrs	52104-..
3	1 Filtra plāksne	—
4	1 Filtrs	51937-..
5	1 Filtrs	55567-..
6	1 AQUA SYSTEM, 6000 ml	800617-..
7	1 AROMA, 100 ml RELAX	701357-..
8	2 Filtru plāksnes	843150-..
	1 Aizsargbrilles	1027211-..
	1 Vannas āķi	1517832-..
	1 UV lampu komplekta NFC lampas karte	1511265-..
	1 SMARTSUN lampu komplekta NFC lampas karte	1511266-..

6 Pielikums



6.1 JK laika kontroles ierīces

PRESTIGE sērijas ierīcēm iespējams izmantot šādas laika kontroles sistēmas:

HK MICROTIMER 8250, pasūtījuma Nr.: 500001653

6.2 Atbilstības koda darbības diapazons

Atbilstības koda darbības diapazona aprēķina piemērs (1), sk. lampu aprīkojuma uzlīmi.

Ja lampas atbilstības kods, ar kuru ierīce marķēta tipa pārbaudes laikā,

ir 100-R-47/2,7

darbības diapazonu, ar kuru marķējama ierīce, aprēķina šādi:

X zonas zemākā vērtība: $0,75 \times 47 = 35,25$

Y zonas zemākā vērtība: $0,75 \times 2,7 = 2,03$

Y zonas augstākā vērtība: $1,25 \times 2,7 = 3,38$

X noapaļo līdz nākamajam augstākajam skaitlim, Y noapaļo līdz pirmajam decimāldaļskaitlim aiz komata.

Tas nozīmē, ka luminiscento lampu atbilstības koda diapazons ir:

100-R-(35-47)/(2,0-3,4)

				Ergolite ESPRIT 770-S DYNAMIC POWER		
	①	18x		Ergolite TREND 80-200 W ES	1504288-	100-R- (35-47)/(2,0-3,4)
	②	8x		Ergolite TREND 80-200 W ES	1504288-	100-R- (35-47)/(2,0-3,4)
	③	20x		Ergolite TREND 80-200 W ES	1504288-	100-R- (35-47)/(2,0-3,4)
	④		2x	Ergolite ULTRA 80W ULTRA PERFORMANCE 800	1500365- 1500364-	
	④	3x	2x	ULTRA PERFORMANCE 800 Ergolite TREND 8 W ES	1500365- 1500366-	
	⑤	-	-	Ergolite TREND 80-200 W ES	-	100-R- (35-47)/(2,0-3,4)
 E.ON EN 60335-2-27, max. 5,0A, 0,990A?	⑥		2x	Ergolite ULTRA 100 W ULTRA PERFORMANCE 800	1500364- 1500365-	
JK-Products GmbH / GERMANY					1500366-01	

13192 / 1



6.2.1 Luminiscences lampu atbilstības koda apraksts

Turpmāk ir aprakstīts luminiscento lampu atbilstības koda darbības diapazons sauļošanai. Tas ir detalizēti atspoguļots IEC 61228 un lasāms un ilgtermiņam marķēts uz lampas.

Atbilstības kodu veido šādi dati:

vatu skaits-reflektora tipa kods-UV kods.

Atbilstības kodam izmantojami šādi reflektora tipa kodi.

O lampām bez reflektora;

B lampām ar platu reflektora leņķi $\alpha > 230^\circ$;

N lampām ar šaurāku reflektora leņķi $\alpha < 200^\circ$;

R lampām ar standarta reflektora leņķi $200^\circ \leq \alpha \leq 230^\circ$.

Atbilstības kodam izmantojami šādi UV kodi.

UV kods = X/Y;

X = kopējais UV starojuma stiprums, kas var izraisīt eritēmu, diapazonā virs 250 nm līdz 400 nm;

Y = UV starojuma stipruma attiecība, kas neizraisa melanomu, ādas vēzi ≤ 320 nm un > 320 nm.

X norāda mW/m^2 un noapaļo līdz nākamajam pilnajam skaitlim, Y noapaļo līdz pirmajam decimāldaļskaitlim aiz komata. Spēkā esošās vērtības attiecas uz attālumu 25 cm un optimāliem UV starojuma stipruma apstākļiem.

Piezīme

Atbilstības koda piemērs ir minēts zemāk;

- 100 W reflektora lampa ar reflektora leņķi 220°
- eritēmu izraisošs UV starojuma stiprums (250 nm līdz 400 nm) = $47 \text{ mW}/\text{m}^2$
- Īsviļņu UV starojuma stiprums, kas neizraisa melanomu, ādas vēzi (≤ 320 nm) = $61 \text{ mW}/\text{m}^2$
- garviļņu UV starojuma stiprums, kas neizraisa melanomu, ādas vēzi (> 320 nm) = $19 \text{ mW}/\text{m}^2$
- Lampu atbilstības kods: ir 100–R–47/2,7

7 Rādītājs



A

Acu bojājumi	33
Ādas jutība	12
Ādas tips	12
Aizsargbrilles	11
Akrila stikla gulēšanas plāksne	59
Akrila stikls (kopšana)	55
Akrila stikls (norādes par izstrādājumu)	59
Alerģijas	33
Apkope	53, 54, 58
Apkopes intervāli	60
Apkopes pārskats	60
Apraksts	30
Apstarošanas zonā	52
AQUA / AROMA SYSTEM apkope	80
AQUA SYSTEM rezervuāra nomainīšana	81
AROMA rezervuāra nomainīšana	80
Atbildība	28
Atbilstības koda darbības diapazons	87
Atbilstoša ekspluatācija	8
Attālināta piekļuve	59
Audio datnes	20
Augšējās daļas plāksnes noņemšana	65

B

Bērni	11
Bluetooth®	49
Bojājumi	28

D

Defekta izslēgšana	28
Dekoratīvā kosmētika	33
Direktīvas	20
Drošība	15
Drošības norādījumi	
Ierīces specifiskie drošības norādījumi	9
Vispārīgi drošības norādījumi	14
Drošības soļi tehniskās apkopes veikšanas laikā	53
Duša	33



E	
Ekspluatācijas izbeigšana.....	18
Ekspluatācijas uzsākšana.....	17
Eksports	20
Elektroinstalācijas	15
EXTERIOR DISPLAY	40
F	
Filtrs	
Notīrīt	74, 75
Tīrīšanas intervāli	57
Funkcijas	38
G	
Gaismjuūtība	33
I	
Iepakojums	19
Iepriekš paredzamas kļūdas	8
Ierīces apraksts	30
Ierīces darbības laiks	17
Ierobežojumi	10
INTERIOR DISPLAY	42
Izmantošanas aizliegumi	9
Izmēri	84
Izpildes tiesības	20
J	
Jauda.....	83
Jaunieši	8
Jēdzienu skaidrojumi	6
K	
Klientu apkalpošanas dienests.....	2
Kļūdu kodi	54
Kondensāta tvertnes iztukšošana	76
Kontaktlēcas	33
Kontaktu savienojumi	15
Kosmētika	11

L

Laika kontrole.....	17
Lampas.....	8
Jaudas pakāpes	85
Nominālā jauda	85
Vadība	85
Lampu nomaiņa	68
Lampu sastāvs.....	85
Lampu tīrīšana vai nomaiņa	
Augšējā daļa	73
Sānu daļa	72



M

Medikamenti	33
Montāža	15
Mūzika	20, 52

N

NFC	68
NFC Connect	37
Nieze.....	33
Nomainiet zema spiediena lampas	69
Nostrādātā gaisa sistēma	15
Notīrīt vai nomainīt lampas	
Apakšdaļa	71

O

Operatora pienākumi	14
Optiskās sastāvdaļas (apkope)	56
Otrreizējā pārstrāde	19

P

Pārskats par lietošanu.....	35
Pārskats par tīrīšanu	57
Pasūtījumu numuri	85, 86
Personāla kvalifikācija.....	14
Piederumi	32, 86
Piederumu komplekts	63
Piegādes komplektācija	14, 29
Pieslēguma lielumi	83
Plāksne gulēšanai	
Pieļaujamā slodze	83
Plāksnes gulēšanai uzstādīšana	64
Plastmasas virsmas (kopšana)	55
PROFESSIONAL SETUP MANAGER PLUS.....	36
Pusaudži.....	33



R

Rezerves daļas.....	60
Pasūtījumu numuri.....	86

S

Sākuma iestatījumi.....	48
Sānu daļas stikla noņemšana.....	66
Sauļes apdegums.....	33
Sauļošanās instrukcija.....	11
Sauļošanās laiki.....	13
Sauļošanās sākums.....	48
Savainošanās risks.....	33
Simboli.....	7
Skaļums.....	52
Slimības.....	33
SPECTRA LED Boards (kopšana).....	56
Starteris.....	85

T

Tehniskie parametri.....	83
Tīkls.....	59
Tīrīšana.....	53, 54
Filtra plāksnes.....	75
Filtrs.....	74, 76
Klimata kontroles ierīce.....	76
Lampas.....	55
Tīrīšanas intervāli.....	57
Transports.....	15
Traucējumi.....	54
Trokšņa līmenis.....	83

U

Utilizācija.....	19
Uzglabāšana.....	18
Uzstādīšana.....	15
Uzstādīšanas vieta.....	16
Uzstādīšanas vietas augstums.....	16

V

Vannas atvēršana.....	66
Ventilācijas sistēma.....	15